



Tag mål til ILSA

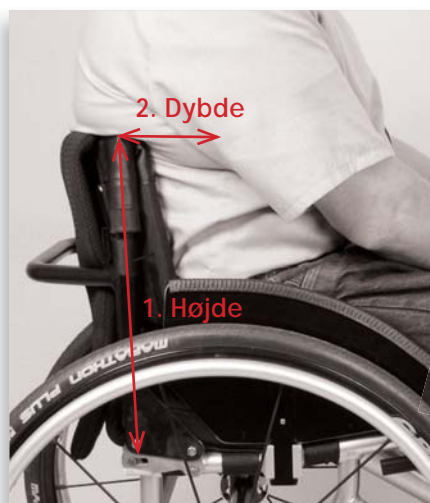

1. Højde på rygrør
Mål fra sæderør under pude til fire cm under skulderblad eller til det ønskede støttepunkt

2. Dybde
Mål fra rygrør til støttepunktet på brystkassen.

ILSA fås som standard med dybder på 3, 5 eller 7 cm, men laves også på individuelle dybdemål.

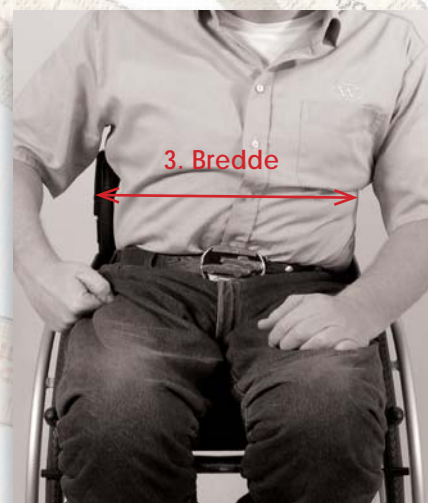

3. Bredde: Mål ryggens bredde

Tilpasning af ILSA

Tilpas højde og bredde i ét beslag



Juster **højden** trinløst med en umbracconøgle



Ryggens **dybde** justeres let efter brugeren

Fleksibel stroproyg



Dybden justeres med 5 cm brede og stærke velcro-remme



Bredden og dybden kan justeres trinløst og asymmetrisk efter behov

ILSA retter op på hverdagen



Før og efter ILSA rygstøtte



Illustrationsfotos

Hjælper brugeren til **symmetri og stabil siddekomfort**

Optimal **støtte** til hele ryggen

Nemt at justere højde, bredde og dybde

Forbedrer **balance** og **køreegenskaber**

Fås til **fastramme-, foldbare og el-kørestole**



Produceret i Danmark

wolturnus