

Cuscini a depressione per carrozzine

Manuale d'uso e descrizione tecnica



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca
www.mobilex-care.com

Descrizione

Cuscino a depressione per carrozzina contenente una speciale spugna-gel. Fodera anti-incontinenza nera con base antiscivolo. I cuscini sono smussati anteriormente per un corretto posizionamento di gambe e bacino. Adatti per utenti con basso rischio di piaghe permettono stabilità ed aiutano e ridurre scivolamenti e sfregamenti.

Uso

Se seduto sul cuscino, l'utente usando la valvola che si trova sul lato destro del cuscino può adattare la pressione interna del cuscino in funzione del peso dell'utente in modo da raggiungere una seduta ottimale e confortevole. L'adeguamento della pressione aiuta a trovare una posizione di seduta più stabile e con migliore supporto per i fianchi. Assicuratevi che una volta eseguita la regolazione della pressione il coperchietto rosso della valvola sia ben chiuso. Se non in uso ed a valvola aperta il cuscino si riempirà d'aria per riprendere la sua forma iniziale.

Per raggiungere una seduta ottimale procedete come segue:

- prima di sedervi sul cuscino controllate che la valvola sia chiusa ed il cuscino sia normalmente gonfiato (senza utente ed a valvola aperta non deve esserci flusso d'aria)
- a valvola chiusa sedetevi sul cuscino ed aprite la valvola lasciando fuoriuscire l'aria. La quantità d'aria che uscirà è in dipendenza peso dell'utente e del tempo che la valvola rimarrà aperta
- quando avrete raggiunto la seduta più confortevole ed adatta al vostro peso, richiudete la valvola. Il cuscino ora manterrà la forma raggiunta assicurandovi una posizione di seduta ottimale
- a volte può rendersi necessario ripetere più volte l'operazione gonfiamento/sgonfiamento per raggiungere la posizione di seduta più confortevole
- anche se ogni regolazione è fortemente individuale ed in dipendenza dell'utente, indicativamente con un tempo di apertura della valvola di ca. 20 secondi in genere si raggiunge la forma migliore, per cui come prima prova sedetevi sul cuscino, aprite la valvola, contate lentamente fino a 20, poi richiudete la valvola

Nota: In dipendenza delle condizioni d'uso a volte può presentarsi una leggera fuoriuscita di liquido dalla valvola dovuto a formazione di condensa all'interno del cuscino. Ciò non influenza la normale funzionalità del cuscino. Assicuratevi comunque che soprattutto il cuscino interno non presenti danneggiamenti o lacerazioni nel qual caso il cuscino dovrà essere sostituito.


Pulizia

Assicuratevi che la valvola posta sul lato destro del cuscino sia sempre pulita ed una volta regolata la pressione sia ben chiusa. La fodera del cuscino può essere pulita con un panno umido e con detergenti neutri. In fase di pulizia la valvola dovrà rimanere chiusa.

Precauzioni per la sicurezza

- Prima di sedersi sul cuscino assicurarsi che il coperchietto della valvola sia in posizione e possa essere aperto. Dopo la regolazione della pressione assicurarsi che il coperchietto della valvola sia ben chiuso
- Non usate oggetto appuntiti o taglienti che possono danneggiare il cuscino
- Il cuscino non è adatto ad un uso in ambienti con temperature inferiori a -10° C

I cuscini a depressione Mobilex sono disponibili nelle seguenti misure:

codice	descrizione	alt. x largh. x prof.	immagine
27840B	cuscino a depressione con valvola di deflusso, fodera anti-incontinenza con base anti-scivolo	8 x 40 x 40 cm	
27845B	come sopra	8 x 45 x 45 cm	
27850B	come sopra	8 x 50 x 48 cm	