




Danish CARE Supply®

- fremtidens hjælpemidler

Instruktionsguide

Påklædningsbøjle / Garment lifter®

Hjælp til at holde klæderne

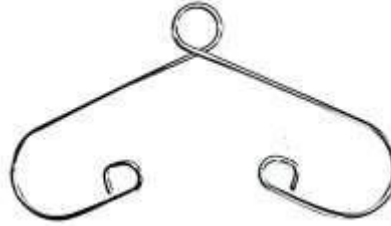

Påklædningsbøjlen / Garment Lifter hjælper med at holde tøjet oppe ved fx toiletbesøg, vask og bleskifte.

Kan anvendes af borgeren og den er også en god hjælp til hjælperen.

Materiale: Rustfrit stål
Størrelse: L: 180mm,
B:100mm, D: 3mm
Varenr: 160000
HMI nr: 87930



Brugsanvisning - ved bl.a. toilet besøg, bad og ble skifte:

- Den ene bøjning placeres i tøjets underkant.
- Løft og placer den anden bøjning i kragen på tøjet.
- Sådan får man to frie hænder!

Ved lange klæder som fx lange kjoler anvendes evt. 2 påklædningsbøjler /Garment Lifter®.

Toiletbesøg	Tøjet er ikke i vejen ved toiletbesøg.
Rengøring	Tøjet ryger ikke ned i toilettet, som det ellers kan gøre.
Personale	Man behøver kun én hjælper i stedet for to.
Pladsproblemer	På toilettet i hjemmet er der ofte ikke plads til to hjælpere.
Bleskifte	Bleskifte er nemmere på både voksne og børn når de står op.
Hygiejne	Rustfri og tåler alle former for rengøring.

Vidste du, at Danish CARE Supply har et bredt sortiment indenfor personlige hjælpemidler til f.eks. på- og afklædning, personlig pleje, spiseredskaber, og meget mere.

Besøg vores hjælpemiddelbutik i Randers eller vores hjemmeside, hvor du har mulighed for at købe alle produkterne i vores e-shop; www.danishcaresupply.dk.