

Brugervejledning af Drymed produkter;

Før brug:

- Af hygiejniske årsager, skal DryMed[®] washable incontinence, produkter vaskes før brug, første gang.
- Hægt ,DryMed[®] incontinence ble "velcro båndene" sammen for at undgå beskadigelse af produktet, forårsaget af disse "velcro bånd".
- For at opnå bedste vaskeresultat, bør produktet vaskes med "vrangen" ud
- Produktet bør opbevares med "vrangen" ud , for at sikre at al fugt er ude af produktet.
- DryMed[®] washable incontinence produkter er produceret i gængse størrelser
- vær opmærksom på at "fastgørings krogen" på bleen, ikke har kontakt med huden, for at undgå irritation.
- undgå folder og rynker på trussen omkring benene, ved brug
- Dette forhindrer lækager
- indpakning holdes væk fra børn, for at undgå kvælning

I brug:

- efter påføring af enten afføring eller urin, bør DryMed[®] incontinence produkter skiftes indenfor 4 timer.
- selv uden "uheld", bør produktet skiftes min. hver 4. time.
- DryMed[®] incontinence produkter kan vaskes med alm. maskinvaskemiddel i vaskemaskine
- Undgå brug af skyllemiddel, da dette vil reducere effektiviteten af sugевnen i produktet
- Kan vaskes op til 95 gr.. Af miljø og økonomiske hensyn kan vask ved 60 gr. tilrådes og anbefales
- Blegning: brug venligst ikke klorholdige midler, da dette kan beskadige produktet
- Tørre tumbler: Max 90 gr.
- Strygning: produktet bør ikke stryges, for at undgå beskadigelse af overfladen.