

Vigtigt – læs før ibrugtagning

Generelt

- DryMed® inkontinensprodukter bliver produceret i normale tøjstørrelser.
- Indpakkingsmaterialet skal holdes væk fra børn for at undgå kvælning.
- Ved at følge vejledningen nedenfor, kan DryMed® inkontinensprodukter anvendes og vaskes op til 300 gange uden at miste absorberingsevne og kvalitet.

Før brug

- Af hygiejniske årsager og for at opnå den optimale absorberingsevne skal DryMed® produkter vaskes 2 gange før ibrugtagning.

Under brug

- Ved tilsmudsning af fæces og/eller urin skal DryMed® inkontinensprodukter skiftes efter max. 4 timer. Det tilrådes at skifte produktet umiddelbart efter brug.
- Selvom produktet IKKE er blevet tilsmudset, anbefales det at skifte produktet efter max. 4 timer.
- Undgå rynker og folder på DryMed® inkontinensproduktet omkring ben og hofter for at forhindre lækage.

Specielt for "DryMed® Vaskbar UNISEX Inkontinensble":

- For at undgå beskadigelse af produktet eller andet tøj, er det vigtigt at hæfte velcrobåndene rigtigt sammen.
- For at undgå irritation, vær her opmærksom på, at velcrobåndene ikke har kontakt med huden.

Plejeanvisninger



- For at opnå det bedste vaskeresultat, skal DryMed® produkterne vaskes med vrangen ud.
- Kan vaskes med alm. vaskemiddel i vaskemaskine.
- Det er muligt at vaske med op til 95°, men af miljø og økonomiske hensyn er vask ved 60° tilstrækkeligt og anbefales.
- Anvend IKKE skyllemiddel, da dette vil forringe absorberingsevnen væsentligt.



- Kan tørretumbles ved max. 90°.



- Inkontinensprodukterne må IKKE stryges, da den sarte tekstiloverflade vil blive ødelagt ved direkte varme.



- Ved blegning: Klorholdige midler må IKKE benyttes, da den vandtætte PU-belægning bliver beskadiget og mister sin egenskaber (dvs. påvirker permeabiliteten).

Tørring/Opbevaring

- DryMed® inkontinensprodukter skal tørres/opbevares med vrangen ud for at sikre, at alt fugt fordamper, og at produktet tørrer helt.
- Produkterne bør ikke opbevares ved over 90° C.
- Produkterne må ikke være i kontakt med åben ild.
- Undgå direkte kontakt med andre varmekilder (varmeelementer etc.).

Specielt for "DryMed® Vaskbar UNISEX Inkontinensble":

- Hæft velcrobåndene sammen under opbevaring for at undgå, at bleens sarte stof beskadiges af velcrobåndene.

Risici

- Hvis Drymed® inkontinensprodukter forbliver i direkte kontakt med kroppen over længere tid, kan der opstå hudirritationer.

Bortskaffelse

- DryMed® inkontinensprodukter kan bortskaffes ved stort brændbart affald på genbrugspladser.

Til kvinder:

Varenr.	HMI-nr.	Str.	Beskrivelse – link til webshop	Farve
19480	88225	S	DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg	Sort
19481	88238	M	DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg	Sort
19482	88239	L	DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg	Sort
19483	88242	XL	DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg	Sort
19410	109880	S	DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg	Hvid
19411	109883	M	DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg	Hvid
19412	109886	L	DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg	Hvid
19413	109889	XL	DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg	Hvid
19400	88243	S	DryMed Inkontinenstrusse m/integreret indlæg	Hvid
19401	88244	M	DryMed Inkontinenstrusse m/integreret indlæg	Hvid
19402	109854	L	DryMed Inkontinenstrusse m/integreret indlæg	Hvid
19403	88245	XL	DryMed Inkontinenstrusse m/integreret indlæg	Hvid
19420	88252	S	DryMed Pull Up trusse med udskifteligt indlæg	Hvid
19421	88286	M	DryMed Pull Up trusse med udskifteligt indlæg	Hvid
19422	88253	L	DryMed Pull Up trusse med udskifteligt indlæg	Hvid
19423	88288	XL	DryMed Pull Up trusse med udskifteligt indlæg	Hvid
19450	109979	OS*	DryMed Indlæg til varenr. 19400-19403	Hvid
19460	109989	S	DryMed Indlæg til varenr. 19420-19423	Hvid
19461	109992	M/L	DryMed Indlæg til varenr. 19420-19423	Hvid
19462	109995	XL	DryMed Indlæg til varenr. 19420-19423	Hvid

TIL mænd:

Varenr.	HMI-nr.	Str.	Beskrivelse – link til webshop	Farve
19440	88254	S	DryMed Inkontinens Boxershorts m/mulighed for ekstra indlæg	Blå
19441	88255	M	DryMed Inkontinens Boxershorts m/mulighed for ekstra indlæg	Blå
19442	88256	L	DryMed Inkontinens Boxershorts m/mulighed for ekstra indlæg	Blå
19443	88257	XL	DryMed Inkontinens Boxershorts m/mulighed for ekstra indlæg	Blå
19430	88290	S	DryMed Inkontinens underbukser m/mulighed for ekstra indlæg	Hvid
19431	88258	M	DryMed Inkontinens underbukser m/mulighed for ekstra indlæg	Hvid
19432	88354	L	DryMed Inkontinens underbukser m/mulighed for ekstra indlæg	Hvid
19433	88259	XL	DryMed Inkontinens underbukser m/mulighed for ekstra indlæg	Hvid
19470	109981	S	DryMed Indlæg til varenr. 19430-19433, 19440-19443	Hvid
19471	109983	M/L	DryMed Indlæg til varenr. 19430-19433, 19440-19443	Hvid
19472	109986	XL	DryMed Indlæg til varenr. 19430-19433, 19440-19443	Hvid

Til UNISEX:

Varenr.	HMI-nr.	Str.	Beskrivelse – link til webshop	Farve
10201	88260	S	DryMed Inkontinensble m/mulighed for ekstra indlæg	Hvid
10202	88261	M	DryMed Inkontinensble m/mulighed for ekstra indlæg	Hvid
10203	88262	L	DryMed Inkontinensble m/mulighed for ekstra indlæg	Hvid
10204	88289	XL	DryMed Inkontinensble m/mulighed for ekstra indlæg	Hvid
10205	88263	XXL	DryMed Inkontinensble m/mulighed for ekstra indlæg	Hvid
12203	109996	OS*	DryMed Indlæg, 13 x 50 cm til varenr. 10201-10205	Hvid

Andre tekstiler:

Varenr.	HMI-nr.	Str.	Beskrivelse – link til webshop	Farve
41298	109890	90x75 cm	DryMed Inkontinens liggestykke/underlag	Hvid
41295	109879	90x75 cm	DryMed Inkontinens underlag med vinger	Hvid
43104	88268	**	DryMed Inkontinens lagen, faconsyet	Hvid
46102	-	32x60 cm	DryMed Vaskepose med indvendig fugtbarriere – 40 L	Hvid

Varenr. 19410-19413 – UDGÅR, og findes kun så længe lager haves

* Onesize

** 90/100 x 200 cm – højde 14-20 cm

Producent

Texamed GmbH
Lilienthalstr. 29
D-85399 Hallbergmoos
Tyskland

Producent/leverandør er IKKE ansvarlig for skader eller kvæstelser som følge af forkert brug eller misbrug.

Der tages forbehold for eventuelle fejl og stavefejl. Oversættelsen er foretaget af Carepartner ApS og er uden ansvar for Carepartner ApS.