



0000144290000001

144290DK / 02.15



### Retningslinjer for brug

Med Fjernbetjening 2.0 kan man skifte program og justere lydstyrken i Oticons trådløse høreapparater. Den fungerer til alle Oticon trådløse høreapparater og er et tilbehør til høreapparater uden knapper.

### Sådan får du mest ud af din fjernbetjening


Denne brugsanvisning beskriver, hvordan du får mest ud af din nye fjernbetjening.

### Vigtigt


Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, før du begynder at bruge din fjernbetjening. Den indeholder forklaringer og vigtige oplysninger om brugen og vedligeholdelsen af din fjernbetjening og batterier.

### Hvad er der i kassen?

Fjernbetjening 2.0

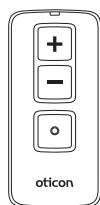


Batterier

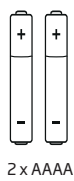

Denne brugsanvisning




### Produktoversigt

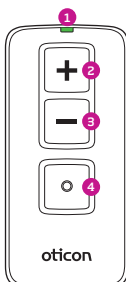

Forside

- 1: Statuslys
- 2: Volumenkontrol op
- 3: Volumenkontrol ned/Mute
- 4: Knap til programskift

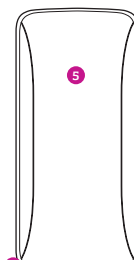

Bagside



- 5: Batteridæksel
- 6: Strophul

### Sådan isættes og udskiftes batterierne


Et opbrugt batteri bør fjernes omgående og afleveres der, hvor du normalt afleverer batterier.

Sådan isættes nye batterier: Åbn forsigtigt batteriskuffen. Sørg for at "+"-tegnet på batteriet passer til "+"-tegnet i batteriskuffen.

Fjernbetjeningen bruger to Alkaline AAAA batterier.

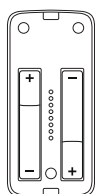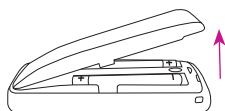

Placer batterierne i batteriskuffen, således at de vender rigtigt.

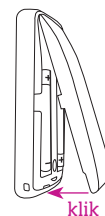


Sæt batteriskuffens dæksel på plads igen, og tryk forsigtigt, indtil det siger klik og batteriskuffen lukkes.

### Vigtigt

Batteridækslet må aldrig tvinges op. Hvis det er nødvendigt at bruge kraft til at lukke dækslet, skal du flytte det en smule, så det klikker nemt på plads. Batteriets levetid vil variere alt efter betingelserne.

### Dækningsområde

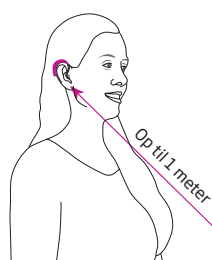


Med fjernbetjeningen kan du betjene høreapparaterne fra en afstand af op til 1 meter.

Fjernbetjeningen og høreapparaterne behøver ikke at befinde sig inden for synsvidde af hinanden.

Hvis du har høreapparater i begge ører, vil fjernbetjeningen justere begge samtidig.

### Statuslys

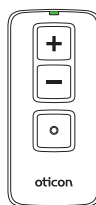

Statuslyset viser, at fjernbetjeningen er i drift. Det vil blinke, hver gang der trykkes på en knap.

Statuslyset vil blinke langsomt (hvert 2. sekund), når batteriet skal udskiftes.

Fjernbetjeningen vil ikke fungere, før batterierne er blevet udskiftet.

### Sådan skiftes program




Tryk for at skifte.

For at skifte mellem høreapparatets programmer med fjernbetjeningen skal du trykke på "•"-knappen.


Hvert tryk medfører skift til det næste program i cyklusen.

For at komme tilbage til program 1 og det oprindelige lydniveau skal du holde "•"-knappen inde i 3-4 sekunder.

### Sådan justeres lydstyrken

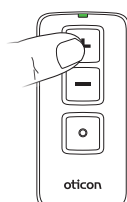


Tryk "+" for at skru op for lydstyrken.

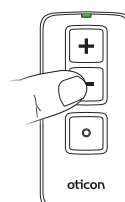

Tryk "-" for at skru ned for lydstyrken.

Med fjernbetjeningen kan du justere lydstyrken på dine høreapparater ved hjælp af volumenkontrol-knapperne.

### Sådan mutes høreapparatet\*

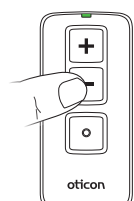

Hold "volumen ned" knappen inde i 3-4 sekunder.

\* Mute-funktionen gør, at du kan afbryde lyden i høreapparatet midlertidigt. Den er kun tilgængelig med visse høreapparater, som er produceret efter 2013. Kontakt din hørespecialist for yderligere information.


### Sådan slås mute-funktionen fra igen

Tryk på valgfri knap på fjernbetjeningen for at slå mute-funktionen fra igen.

### Vigtigt

Høreapparatets mute-funktion slukker ikke for apparatet. Åbn batteriskuffen for at slukke for høreapparatet.

## Strophul

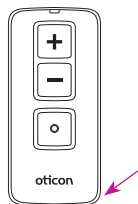

Fjernbetjeningen har et strophul i nederste højre hjørne.

Enhver egnet strop kan anvendes.

## ⚠ Advarsler

Før du tager din Fjernbetjening 2.0 i brug, skal du omhyggeligt sætte dig ind i nedenstående generelle advarsler og i de øvrige oplysninger i denne brugsanvisning.

### Risiko for kvælning

Fjernbetjeningen er ikke legetøj og skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade dem selv. Særlig opmærksomhed bør rettes mod mindre komponenter for at forhindre børn i at sluge dem og blive kvalt.

Søg omgående læge, hvis nogen kommer til at sluge en del.

### Brug af batterier

- Brug kun de batterier, din hørespecialist har anbefalet. Batterier af dårlig kvalitet kan lække og ætse huden.
- Et afladet batteri bør fjernes så hurtigt som muligt.
- Forsøg ikke at genoplade batterier, der ikke er genopladelige. De kan eksplodere og forårsage alvorlige personskader.
- Brugte batterier må aldrig brændes. De kan eksplodere og forårsage alvorlige skader.

### Aktive implantater

Der rådes til forsigtighed og anbefales, at brugerne følger samme retningslinjer som producenter af icd-enhed og pacemaker anbefaler vedrørende brugen af mobiltelefoner. Hvis du har et aktivt implantat, skal fjernbetjeningen holdes mindst 15 cm fra dette.

### Eksplodingsrisiko

Fjernbetjeningen indeholder ikke nok strøm til at forårsage brand under normale betingelser. Fjernbetjeningen er dog ikke afprøvet i henhold til internationale standarder for omgivelser med eksplodingsrisiko. Vi anbefaler, at fjernbetjeningen ikke bruges de steder, hvor der er eksplodingsfare.

### Udsæt ikke for stærk varme

Udsæt aldrig fjernbetjeningen for ekstrem varme ved at putte den i ovnen, mikroovnen eller brænde den. Den kan eksplodere og forårsage alvorlig skade.

### Rengøring og vedligeholdelse

Regelmæssig rengøring med en fugtig klud uden opløsningsmidler anbefales.

Fjernbetjeningen må ikke udsættes for eller rengøres med kemiske rengøringsmidler eller alkohol. Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, aftershave, lotion, solcreme og mygespray kan ødelægge din fjernbetjening. Du bør altid tage din fjernbetjening af, inden du bruger denne slags produkter og give sørg for, at du er tør, inden du bruger den igen.

Nedsænk ikke fjernbetjeningen i vand eller andre væsker.

### Brug af stropper

Hvis du anvender en strop, skal du sikre dig, at den er designet og egnet til formålet. Brug aldrig en nakkestrop pga. risiko for kvælning.

### Røntgen, CT-, MR-, PET-scanning og elektroterapi

Bær ikke fjernbetjeningen under røntgen, CT-, MR-, PET-scanning, elektroterapi eller operation.

### Brug i biler

Brug af fjernbetjeningen under kørslen kan distrahere dig. Hvis kørselsforhold eller færdselsregler kræver det, skal du køre ind til siden og parkere, før du bruger fjernbetjeningen.

### Brug om bord på fly

Fjernbetjeningen bør ikke bruges om bord på fly, medmindre det specifikt er tilladt af flypersonalet.

### Beskyttelse af miljøet

Hjælp med at beskytte miljøet ved ikke at smide fjernbetjeningen eller batterierne i det usorterede husholdningsaffald. Aflever din fjernbetjening og batterier på genbrugsstationen eller giv dem til din hørespecialist, så denne kan bortskaffe dem. Kontakt din hørespecialist for yderligere oplysninger.

## Sådan passer du på din fjernbetjening

- Hold fjernbetjeningen over en blød overflade, når du skifter batterier eller rengør den, så den ikke går i stykker, hvis du taber den.
- Rengør fjernbetjeningen jævnligt med en tør klud.
- Undgå at fjernbetjeningen bliver våd.
- Forsøg aldrig at tørre fjernbetjeningen med en hårtørrer, i en mikroovn eller lignende.

### Vigtigt

Fjernbetjeningen må ikke udsættes for ekstrem varme, som fx på instrumentbrættet eller i handskerummet i bilen.

### Vigtig yderligere information

Fjernbetjeningen bruger digitale induktive signaler til at overføre kommandoer til høreapparaterne. Selvom det er yderst usandsynligt, er der blevet udvist bekymring for at dette signal muligvis kan forstyrre medicinsk udstyr, såsom pacemakere.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefaler vi, at brugere af pacemakere ikke bærer og bruger fjernbetjeningen i en brystlomme eller omkring halsen.

Fjernbetjeningens sendestyrke ligger under de internationale emissionsgrænser for eksponering af mennesker. Til sammenligning er fjernbetjeningens stråling lavere end utilsigtet, elektromagnetisk stråling fra fx hårtørrere, elektriske barbermaskiner, osv. Fjernbetjeningen opfylder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet.

### USA og Canada

På grund af den begrænsede plads på selve enheden findes alle relevante mærkninger vedrørende godkendelser i denne brugsanvisning.

### Dette apparat er certificeret i henhold til:

FCC ID: 2ACAHREMCTR01

IC: 11936A-REMCTR01

Enheden opfylder reglerne i afsnit 15 i FCC-reglerne og RSS-210 fra Industry Canada.

### Brug af enheden er underlagt følgende to betingelser:

1. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens.
2. Enheden skal acceptere al modtaget interferens, heriblandt interferens, der kan forårsage uønsket brug.

Ændringer eller justeringer af enheden, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan medføre, at garantien bortfalder.

**Bemærk:** Denne enhed er blevet testet og fundet at opfylde grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Denne enhed genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan den forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation.

SBO Hearing A/S erklærer hermed, at denne fjernbetjening er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EU. Overensstemmelseserklæring fås hos SBO Hearing A/S.

Produceret af:  
SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
2765 Smørum  
Danmark  
www.sbohearing.com



Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.



NI 175

