

## **Mobilex "Kudu" Rollator 312070 og 312075 Montage- og brugervejledning**



**MOBILEX A/S**  
Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Danmark  
[www.mobilex.dk](http://www.mobilex.dk)

## 1. Indledning

Kære kunde,

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.

Vi videreudvikler løbende vore produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

### Formålsbeskrivelse

Produktet er et medicinsk produkt som anvendes af ældre eller handicappede personer, der har brug for støtte under gang eller som har brug for at sidde regelmæssigt. Produktet giver brugeren mulighed for at gennemføre de fleste daglige aktiviteter uden assistance fra en hjælper. Anden anvendelse end beskrevet i formålsbeskrivelsen er ikke tilladt.

Ved spørgsmål bedes de henvende dem til forhandleren eller til Mobilex A/S direkte.

### Mobilex A/S

Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Denmark

Telefon: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-Mail: info@mobilex-care.com

## 2. Sikkerhedshenvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Der må ikke laves konstruktive ændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse.
- Vær agtpågivende i forbindelse med justeringer, sammenklapning m.m ikke at klemme fingrene eller andres legemesdele..
- Produktet må kun anvendes på et plant og stabilt underlag
- Alle hjul skal til hver en tid være i kontakt med underlaget. Dette sikrer at rollatoren er i balance og derved undgås evt. uheld.
- Når rollatoren anvendes til at sidde på SKAL bremserne blokeres.
- Efterlad aldrig en rollator ulåst i bremsefunktion
- Produktet må aldrig udsættes for større belastning end beskrevet i tekniske data og på typeskiltet.
- Maks belastning af kurv er 5 kg.
- Rollatoren er ikke designet til at skubbe sig frem med, mens sædet benyttes til at sidde på.
- Rollatoren må IKKE anvendes til at stå på.

## 3. Beskrivelse

### Produktbeskrivelse

"Kudu" Rollatoren er en firehjuls rollator, der kan foldes sammen i kryds mod midten. Rollatoren er meget manøvreedygtig og kan højdejusteres så den passer til brugeren. Er udstyret med et komfortabelt blødt sæde og rygstøtte, således at brugeren kan hvile sig. Kurven muliggør indkøb undervejs. Rollator rammen er pulverlakeret aluminium. Rollatoren leveres med ringklokke, stokkeholder, og bakke der kan monteres på sædet hvis man ønsker det.

Rollatoren leveres i en karton med dele:

Indholdet er:

- ✓ 1 Rollatorramme
- ✓ 2 aftagelige skubbehåndtag med bremsehåndtag
- ✓ 1 Brugervejledning
- ✓ 1 Stokkeholder
- ✓ 1 Ringeklokke



### Montageanvisning

- ✓ Kontroller vha. ovenstående liste at der ikke mangler noget. Hvis der mangler noget foretages der ikke yderligere montering. Kontakt forhandleren af produktet.
- ✓ Sæt rollatoren med hjulene på gulvet.
- ✓ Pres sædet nedad indtil låsen går i indgreb. Pres i siderne af sædet hvor der er en rørramme. Pres ned indtil en "klik" høres. Kontroller at rollatoren er slået korrekt ud ved at trække i sædet på midten. Se rollatoren i åben position på billedet herover.
- ✓ Indsæt de 2 skubbehåndtag i rørene som vist på billedet, og fastgør i ønsket højde med de medfølgende skruehåndtag. Normal anbefalet højde er at skubbehåndtag skal være ud for brugers håndled når man står med armene ned langs siden.
- ✓ Kontroller at boltene der fastgør hjulene er korrekt fastgjorte, og at rollatoren er stabil således at ingen dele kan bevæges.
- ✓ Kontroller bremsens funktion før anvendelse af rollatoren.
- ✓ For at folde rollatoren sammen, skal udløser til sammenfoldning aktiveres med den ene hånd, samtidig med at der trækkes opad i stroppen midt på sædet.
- ✓ Rollatoren kan låses i sammenfoldet tilstand ved at fastgøre lås fra venstre side af sædets bagkant til højre side. Skal tages af igen for at folde rollatoren ud igen.

### Funktionsbeskrivelse

- ✓ Juster højden af skubbehåndtagene sådan at håndtagene er i håndledshøjde når brugeren står med armene langs siden. Dette vil betyde at armene er i en 20°-30° vinkel når rollatoren bruges. Juster længden af skubbehåndtagene ved at løsne og aftage skruehåndtagene, placer skubbehåndtagene i den ønskede højde og monter skruehåndtagene igen og stram til. Kontroller at kørehåndtagene er korrekt fastspændte og stabile.
- ✓ For at bremse rollatoren trækkes opad i bremsegrebet. Grebet løsnes for at frigøre bremsen igen.
- ✓ For at låse bremsene, skubbes bremsehåndtaget nedad til et "klik" høres. For at løsne bremsen trækkes håndtaget opad og man kan skubbe rollatoren igen.
- ✓ Når rollatoren anvendes til at sidde på i parkeret tilstand SKAL bremsene blokeres. Dette gøres ved at trykke ned på bremsehåndtaget. Bremsene bør altid være blokerede når rollatoren parkeres, specielt hvis terrænet ikke er jævnt

### Transport anbefaling

Rollatoren kan enkelt foldes sammen som beskrevet for transport. Rollatoren bør lægges i bagagerum eller spændes fast under transport i en bil.

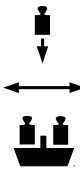
### Tilbehør

Rollatoren leveres med ringklokke, stokkeholder og plastbakke til at montere ovenpå sædet.

## 4. Tekniske data

| Kudu Rollator                   | Standard<br>Art. 312070+75 | Medium<br>Art. 312076      | Small<br>Art. 312077       |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Skubbehåndtagshøjde (justérbar) | 80 – 98,5 cm               | 78,5 – 88,5 cm             | 63 – 81,5 cm               |
| Sæde højde over gulv            | 65 cm                      | 55 cm                      | 48 cm                      |
| Indvendig bredde                | 45 cm                      | 45 cm                      | 45 cm                      |
| Total bredde (udvendig)         | 62,5 cm                    | 62,5 cm                    | 62,5 cm                    |
| Total længde                    | 66,5 cm                    | 66,5 cm                    | 66,5 cm                    |
| Vægt                            | 7,65 kg                    | 7,45 kg                    | 7,25 kg                    |
| Maks. belastning                | 150 kg                     | 150 kg                     | 150 kg                     |
| Bremser                         | 2 bremser med låsefunktion | 2 bremser med låsefunktion | 2 bremser med låsefunktion |

### Typeskilt

|                                                                                                                   |                                                                                   |                                                               |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                   | <b>"Kudu" standard rollator</b><br>For outdoor and indoor use |                                                                                       |
| <u>Manufacturer:</u>                                                                                              | <u>Distributor:</u>                                                               | Max. 150 kg                                                   |  |
| Mobilex Sp.Z.o.o.<br>Ul Radwanska 23/1<br>PL-90540 Lodz<br>Poland<br>www.mobilex.pl                               | Mobilex A/S<br>Grønlandsvej 5<br>DK-8660 Skanderborg<br>Denmark<br>www.mobilex.dk | Max. width = 62,5 cm                                          |                                                                                       |
|                                                                                                                   |                                                                                   | Max. load in basket = 5 kg                                    |                                                                                       |
|  Produced <input type="text"/> | Serial no. <input type="text"/>                                                   |                                                               |                                                                                       |

Typeskiltet befinder sig på siden af rammen

Billede af typeskiltet (eksempel)

## 5. Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen. Smør hjulens aksler regelmæssigt med smøroleolie. Kontroller jævnligt at alle dele sidder fast, og efterspænd greb og skruer. Hvis der er dele der er brækkede, revnede eller meget slidte skal forhandleren kontaktes. Produktet udsættes for slid ved brug, og det anbefales regelmæssigt at få udført en kontrol af en fagmand.

## 6. Generel problemafhjælpning

| Hvad er der sket?                                                                    | Hvad kan være grunden?                                                                                             | Hvad skal jeg gøre?                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjulene kører kun svært rundt.                                                       | Der er skidt mellem hjulene og gaflen.                                                                             | Rengør mellem hjul og gaffel. Aftag evt. hjulet. Smør de bevægelige dele med smøreolie.     |
| Bremserne virker ikke som de skal eller een af bremserne virker bedre end den anden. | Bremseskoen er slidt eller bremserne er ikke justeret korrekt.                                                     | Forsøg at justere bremsekablet. Hvis dette ikke afhjælper problemet kontaktes forhandleren. |
| Sædet låser ikke i korrekt position.                                                 | Kontroller om låsemekanismen går i indgreb. Se om der evt. sidder noget i vejen eller om noget ikke er fastspændt. | Hvis problemet ikke umiddelbart kan løses skal forhandleren kontaktes.                      |

## 7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

## 8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktive ændringer på produktet uden vores skriftlige accept bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte.

Garantien omfatter ikke erstatning for manglende benyttelse under reparation, og der ydes ikke erstatning for skader der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

## 9. Konformitetserklæring

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

### **Mobilex "Kudu" Rollator 312070, 312075, 312076 og 312077**

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- **Retningslinjer 93/42/EWG for medicinalprodukter**  
**Del I fra 14 Juni 1993**

Lars Nygaard  
Adm. Direktør  
Mobilex A/S

Skanderborg, den 26-02-2012



.....  
Underskrift