

BRUGSANVISNING

Wing Viscoflex® / Wing Viscoflex® Soft / Wing Viscoflex® Plus

Wing Viscoflex anvendes som siddepude i kørestol for at behandle eller forebygge tryksår.

Wing Viscoflex er en siddepude af viscoelastisk skum med memoryeffekt, der former sig efter kroppens kurver. Ved korrekt brug af Wing Viscoflex sikres en optimal og stabil siddepositionering og korrekt bækkenniveau for at trykfordele siddevægten.

Wing Viscoflex Plus har en kerne af HR-skum, som er placeret under lårbenene og giver en god lateral støtte til trochanterne. Pudens ergonomiske indsats forhindrer, at puden "siddes igennem", og sikrer samtidig at siddeknoglerne, haleben og sacrum ikke udsættes for modtryk.

Før brug:

- Siddepuden vælges efter den størrelse der passer til brugeren og dennes stol.
- Sørg for at puden vender rigtigt. Der er velcro på bagsiden og "frem" skrevet forest på pude og betræk. Derudover strop i betrækkets forende

Advarsel:

- Pudens er kun beregnet til vægten af én person
- Pudens bør aldrig anvendes uden betræk

Rengøring og desinfektion

Puden kan aftørres med sæbevand og en opvredet klud eller svamp eller med desinfektionspray. Pudens må ikke ligge i blød og skal lufttørre.

Betrækket er fra start behandlet med allergivenligt antibakterielt middel. Betrækket kan vaskes i maskine på 95 ° og tørretumbles på lav varme. Betrækket er modstandsdygtigt over for klorin.

Betrækket tåler ikke strygning eller rensning.

Både pude og betræk skal tørre helt op inden ibrugtagning efter rengøring.

