

Dash Lite Kørestol

Gælder også for kørestol med små hjul.

VIGTIGSTE
INFORMATIONER
PÅ DANSK



DK 1.0

SIKKERHEDS INSTRUKTION

Fjernelse af dele fra kørestolen som er leveret enten som standard eller som tilbehør er ikke anbefalet for andet end under eks. transport af kørestolen uden bruger.

Undgå at parkere kørestolen tæt på en varmekilde, eks. brændeovn eller andre varmekilder.

Stil ikke kørestolen i direkte sollys. Den kan blive så varm at man kan brænde sig på kørestolen.

Kulde som eks. frost kan have modsatte effekt, og gøre dele af kørestolen meget kolde at holde på.

Hæng ikke tasker ogl. på håndtagne, da det kan få stolen til at tippe.

Brug ikke kørestolen til personer der vejer mere end anskrevet (127kg) og sid ikke flere i kørestolen ad gangen.

Løft kun kørestolen i de medfølgende håndtag ved sædet.

Ved at bruge en pude løftes stolens vægtpunkt og kan influere på stabiliteten af kørestolen. Du kan få råd og vejledning af LEMCO til at vælge den rigtige pude eller af din Ergo / Fysioterapeut.

Fjern alt pakkemateriale før du begynder at bruge din stol. Kontakt LEMCO hvis du er i tvivl om noget med din kørestol eller den føles anderledes end den plejer.

DESIGNET TIL

Kørestolen er ikke designet til brug på sand, dyb sne eller mudder i det stabiliteteten af kørestolen kan blive påvirket.

Man skal passe på med at bruge kørestolen på is, sne og glatte overflader, idet hjælperen der skubber kørestolen kan falde eller glide.

Hvis du bruger kørestolen i mørke er det vigtigt at du er synlig når du eks. krydser vejen. Benyt gerne en refleksest.

Kørestolen er ikke designet til hældninger over 8 grader.

Brugere og hjælpere der bruger stolen udenover det anskrevne, kan komme i alvorlig fare / dødsrisiko (sådan skal det skrives, det skal nok ikke tages så bogstaveligt)

FORFLYTNING TIL SIDEN

Armlænet kan vippes op. Det giver lettere mulighed for forflytning ind og ud af stolen.

Mange kørestolsbrugere kan selv forflytte sig med øvelse og styrke i armene. Det anbefales at der er en person til stede når der forflyttes til siden hvis behovet opstår for assistance.

Man skal sikre sig at bremsen er slået til når der forflyttes til siden.

Fodstøtterne kan skubbes ud til siden hvilket gør forflytning lettere.

Hvis der er et tomt stykke mellem stol og kørestol, kan man få et forflytningsbrædt.

Kontakt LEMCO for mere information.



Forflytning bør ikke foregå på glat og skævt underlag.

BREMSE

Bremsen har to positioner.

1. Kort
2. Lang

Når bremse håndtaget trækkes op skal der ikke bruges så mange kræfter for at låse kørestolen.



RYGGEN KAN KLAPPES NED TIL LETTERE TRANSPORT



ARMLÆN KAN SLÅS OP OG TAGES HELT AF

På siden af armlænet kan en lille håndtag drejes hvorefter armlænet kan vip-
pes op.

Hele armlænet kan afmonteres ved at trykke på den lille knap i den modsatte
ende af vinge knappen. Armlænet er ikke designet til at blive afmonteret ofte.



HJUL TAGES AF MED ET LET TRYK I MIDTEN


Brug egerne til at holde igen med og tryk på knappen for at aftage hjulet til
transport.



TRANSPORT VEJLEDNING

Transportkørestolen kan fastspændes til transport ved hjælp af bæltter som transportørene har i bilerne.

Se fastpændingspunkter herunder eller kontakt LEMCO for nærmere information om sikker transport.

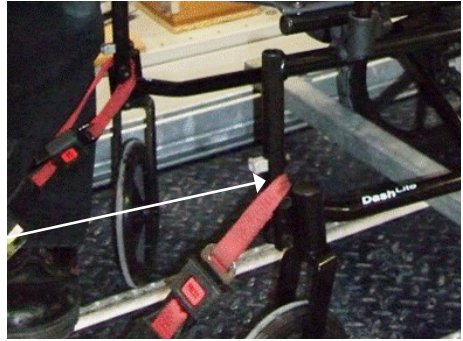


CRASH TEST

Dash Lite er Crash Testet efter følgende ISO standard: ISO 7176-19 som er beregnet til stole der står i kørselsretningen.

Sikkerhedsbæltet på selve kørestolen er ikke crash-testet, det hjælper alene personen til at sidde oprejst i sædet under transport.

For at opretholde sikker transport bør stol og bruger spændes fast individuelt.

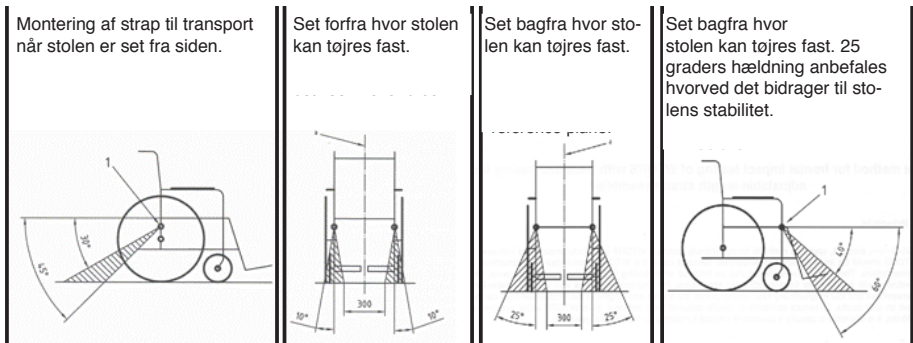

SERVICE CHECKLISTE

- Bremser** Bremsen skal holde stolen på en skrånende flade op til 10 grader. Afprøv stolen på den rampe hvor du bruger stolen, og juster hvis nødvendigt.
- Hjul** Check vedligeholdelses stand af hjulene. Check at de kører uden modstand i navet. Stole med punktérfri dæk bør jævnligt checkes for sprækker i dæk. Kontakt LEMCO hvis der er sprækker i dit dæk.
- Dæk** Dash Lite fra LEMCO har punktér fri dæk.
- Håndgreb** Check at der ikke er skrammer eller sprækker i håndtagne til bremsen der kan genere hånden under brug.
- Bevægelige dele** Kan smøres engang i mellem
- Polster** Betrækket aftørres med en fugtug klud. Pletter kan fjernes med mild pletrens. Det er ikke anbefalet at højtrykspule stolen. Evt. revner lappes i betrækket, det anbefales at reparere øjeblikkeligt idet en ikke repareret revne kan hurtigt blive læn gere.
- Stel og fittings** Stellet kan pudses med lidt bil-voks. Check alle aftagelige dele klikker ordentligt på stolen.
- Håndtag** Du skal sikre at håndtagne sidder ordentligt fast. Hvis de er løse er kørestolen usikker at benytte. Du skal kontakte LEMCO for at sikre dig de rigtige håndtag til din kørestol.

TILBEHØR

Anti-tip

Til din Dash Kørestol kan vi levere anti-tip støtter der kan sikre at den ikke kan trippe bagover.

Såfremt du bruger din kørestol som rollator (dvs. går bag den uden en person i stolen) skal du have anti-tip sikring monteret for optimal sikkerhed.

Anti tipsikringen kan bestilles på vores hjemmeside

Lemco.dk



OPBEVARING

Hvis du ikke benytter din stol og sætter den til opbevaring skal den stå tørt og væk fra fugt m.v.

Hvis stolen bliver våd under brug, bør den tørres af med en tør blød klud for at reducere risiko for rustdannelse.

Hvis stolen opbevares i bagagerum i varme områder, bør den overdækkes med et klæde, så den ikke bliver for varm at holde på når man tager den ud af bagagerummet.

GARANTI

Rhealthcare yder garanti på at produktet er fri for fabrikationsfejl, og skifter dele hvis nødvendigt uden beregning i op til 24 måneder fra leveringsdatoen af stolen. Garantien forudsætter at produktet benyttes som foreskrevet og ikke er blevet misbrugt. Produktet skal være vedligeholdt i henhold til foreskrifterne,

Dash Lite er designet til fem års brug fra købstidspunktet.

Ved uautoriserede ændringer af kørestolen bortfalder garantien.

SERVICE

Service på stolen bør alene udføres af autoriseret tekniker jvf. foreskrifterne. Batch kode og serienummer er vigtige for at kunne identificere model nummer for at lokalisere de korrekte reservedele.

RhelathCare tillader sig som producent at ændre i produktet uden foregående information.

RhealthCare eller LEMCO REHAB & FYSIO er ikke ansvarlige for skader der sker som følge af uautoriserede ændringer på kørestolen.

Som bruger bør du ikke forsøge at reparere stolen selv eller lave ændringer på stolen. Service bør alene udføres af personer med kendskab til Dash Lite kørestolen.

Service interval afhænger af hvor meget stolen bruges. Hvis stolen ikke vedligeholdes kan det have indflydelse på garantien.

Kørestolen vil bibeholde funktion og udseende hvis den vedligeholdes, så vil du have en god og velfungerende kørestol i mange år.

Denne side er bevidst blank

Træn - Uden motor ... Større effekt

Fra kørestol



90% Vælger
LEMCO Combi
Bike



Oplev glæden
ved at træne
hjemme eller i
fysioterapi



Let fiksering af
hænderne



Letlæselig skærm
med Km/t, tid &
distance

Og større tilfredsstillelse



LEMCO REHAB & FYSIO APS
Fabriksvej 3
DK-3000 Helsingør

Tlf.: +45 33 25 40 02
Fax: +45 70 20 58 99

info@lemco.dk
www.lemco.dk

LEMCO