

BraBuddy - Instruktionsguide/manual



Varenummer: 145138, HMI: 89681

1. Placér dig selv i opretsiddende stilling og sæt "BraBuddy" fast mellem dine lår og med den hvide klips ind mod dig selv
2. Træk nu båndet ud og lad det falde ned imellem dine ben.
3. Tag nu din BH og sæt den ene ende fast i den øverste lås af BraBuddy'en
4. Den ende med krogen på BH'en sættes nu fast med den anden lås på BraBuddy'en. Det er den, hvor båndet er monteret.
5. Træk nu den lås med båndet ud og så langt væk, som du kan. Bliv ved med at trække båndet ud indtil der er nok til, at du kan få båndet over dit hoved.
6. Arrangér din BH, så den kan trækkes rundt og bagom dig ved at trække i båndet.
7. Tag fat i enden af din BH og løft den op fra BraBuddy låsen.
8. Sæt nu krogen på din BH fast og løft BH'en ud af BraBuddy. Nu er din BH hægtet og du kan trække den rundt om din mave og derefter sætte dine arme ind i BH'en.

The Bruckingham BraBuddy er beregnet som hjælp til at kunne trække en normal BH på. Den er ikke beregnet til nogen anden brug og må ikke anvendes som legetøj.

Det er dit ansvar at sikre, at BraBuddy opbevares uden for børns rækkevidde og den anvendes korrekt.

BraBuddy kan rengøres ved at tørre den over med en fugtig klud. Der må ikke anvendes skrappe rengøringsmidler. Er ikke egnet til at komme i vand.

Instruktionsvideo tilgængelig på www.danishcaresupply.dk