

BRUGERMANUAL

ZINGER[®]
GO ANYWHERE



OBS: Det er obligatorisk, at alle brugere læser hele vejledningen, før Zingerstolen betjenes. Vær særlig opmærksom på advarslerne på side 3 og 4, samt alle afsnit med yderligere advarsler, skrevet med FREMHÆVEDE BLOKBOGSTAVER.

ZINGER®

ZR-10-A BRUGERMANUAL

Indhold

ADVARSLER.....	3
SIKKERHEDSMÆSSIGE RETNINGSLINJER OG DRIFTSBETINGELSER	4
ZINGERSTOLEN DIAGRAM	6
TILLYKKE MED KØBET AF DIN NYE ZINGERSTOL!	7
OPLADNING AF BATTERI	7
KONTROL AF DÆKTRYK	8
UDFOLDNING TIL KØREKLAR.....	8
SAMMENFOLDNING FOR TRANSPORT OG OPBEVARING	8
BATTERI, INSTALLATION OG LÅSENØGLE	9
IND -OG UDSIGNING AF ZINGERSTOLEN	9
TÆND/SLUK KNAPPEN OG AUTO SLUK.....	10
BATTERIINDIKATOR LYS.....	10
SPEEDERHÅNDTAG	11
SÅDAN KØRER OG STYRER DU ZINGERSTOLEN-STOLEN	12
KONTROLPANEL HASTIGHEDSVÆLGER	13
LØFT OG OPBEVARING AF ZINGERSTOLEN-STOLEN	14
ZINGERSTOLEN, IND OG UD AF BILEN	15
JUSTERING AF STYREHÅNDTAGENE	16
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	16
SPECIFIKATIONER	17
SPØRGSMÅL OG SVAR, SAMT FEJLFINDING	18

ADVARSLER

Yderligere advarsler vises med **FEDE BLOKBOGSTAVER** i denne vejledning. Alle advarsler i denne vejledning angiver potentielt farlige situationer, som hvis de ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade. Læs hele denne vejledning omhyggeligt, før du betjener Zingerstolen



ADVARSLER

- Forbliv I lav hastighedsområde, til du er fortrolig med Zingerstolen, hvordan den køres, styres og bremses.
- Køør aldrig i høj hastighedsområde indendørs.
- Sænk farten i god tid inden sving. Skarpe sving skal udføres ved lav hastighed. Høj fart, giver større sving-radius.
- Stop **ALTID** helt op, før du slipper styrehåndtagene.
- Må ikke bruges på hældninger over 10°. Undgå så vidt muligt, hældninger på mere end 5°
- Køør **ALTID** langsomt ned ad bakke.
- I lav og mellem hastighedsområde, er du at betragte som forgænger. I høj gear skal du følge reglerne for cyklister.
- Køør **ALTID** direkte op og ned ad ramper, **ALDRIG** skråt/diagonal eller på tværs. Rul **ALDRIG** baglæns på ramper.
- Undgå unødige stop og sving, på skrående underlag.
- **Zingerstolen kræver brug begge hænder.** Hold altid ved begge håndtag når du betjener Zingerstolen. Forsøg ikke at holde ting i hænderne, når du kører Zingerstolen.
- Udvis forsigtighed, når du kører på fugtig og våde underlag, da det nedsætter bremse og styreegenskaber. Der skal bruges lidt flere kræfter til at betjene styrehåndtagene
- Må ikke køres på bløde underlag som, sand, sne og vådt græs, samt glatte underlag som, is eller oliebelagte underlag.
- Når du kører I nærheden af biler, varevogne og lastbiler mm. Skal du være særlig opmærksom, da de kan have svært ved at se dig, på grund af den lave siddehøjde.



ADVARSLER

- I bagegear bør du køre i en lige linje og så kort som muligt, til du igen kan fortsætte med fremad kørsel.
- Hold dækkene oppumpede til **35~40 PSI (2.5~2.8 Bar)** for bedste ydeevne og funktion.
- Må ikke bruges af personer over **120 KG**.
- Må ikke bruges til at trække påhængsvogne eller andre objekter.
- Medbring IKKE passager, kæledyr eller børn, på Zingerstolen. Hverken på skødet, eller bag på.
- Forsøg ikke at trække eller skubbe genstande med din Zingerstol.
- Zingerstolen er ikke et legetøj og må ikke bruges af børn. Hold børn væk fra Zingerstolen og dens kontrolpanel.
- Bær ikke løst tøj, tørklæder og taske med strop eller lign., der kan komme i kontakt med hjulene eller kan forhindre betjeningen af styrehåndtagene.
- Zingerstolen skal være slukket, når du sætter dig, eller skal ud af stolen.
- Stå ikke på fodstøtten og læn dig ikke på styrehåndtagene, når du skal i eller ud af stolen.
- Efterlad ikke Zingerstolen på eller nær, skrående underlag. Den kan risikere at trille væk.
- Anvend altid fodtøj med hælekappe, når du kører i Zingerstolen.
- Må ikke betjenes hvis du er svimmel, træt, eller hvis du er under påvirkning af alkohol.
- Undgå cigaretrykning, når du kører i din Zingerstol. Vi anbefaler i stedet høj cigarføring...
- Efterlad ikke batteriladeren tændt, når den ikke lader batteriet.
- Forsøg ALDRIG at åbne batteriet.
- Brug kun opladeren, der er leveret sammen med Zingerstolen.
- Zingerstolen må ikke ombygges. Brug kun originale reservedele fra leverandøren.

Sikkerhedsmæssige retningslinjer og driftsbetingelser

Hastighed og Sving: Zingerstolen kræver mere plads som hastigheden stiger. Af denne grund er det nødvendigt at bremse før du drejer. Hvis du hører dækudskridning, når du forsøger at dreje, køre du for hurtigt.

Ramper og bakker: Kørsel ned ad bakke reducerer styre- og bremseevne. Kør altid langsomt ned ad bakke og ramper. Zingerstolen kan forcere op til 8° hældning, men når det er muligt, bør du undgå ramper stejlere end 5°. Normalt er kørestolsramper 5° eller mindre.

Kørsel på bakker bør foretages i en lige linje. Juster bremsetrykket, for at holde kørselsretningen og hastigheden lav, ved nedkørsel. Hold din hastighed under 5 Km/t (langsom ganghastighed) på nedkørsel. Brug bremsene på nedkørsler, lad aldrig din Zingerstolen opbygge fart på nedkørsler. Undgå at svinge/dreje på nedkørsler. Hvis der er en skarp drejning på bakken, udvis ekstra forsigtighed og påbegynd først drejning/sving, når du holder næsten stille, eller find en alternativ rute. Forsøg ikke stejle nedkørsler i våde forhold.

Undgå at stoppe på bakker eller ramper, herunder fortovsramper. Stop i stedet på det plane fortovet før rampen og hold begge bremsene trukket, mens man venter på at krydse vejen. Zingerstolen yder en let modstand mod at rulle, når motoren er slukket, men det er ikke en erstatning for parkeringsbrems. Hvis du er stoppet på et plant underlag i et sikkert område, væk fra ramper eller bakker, kan du svinge fodstøtten tilbage med dine hæle, og derefter placere begge fødder solidt på jorden, før du fjerner hænderne fra styrehåndtagene.

Underlagets beskaffenhed: Zingerstolen kører bedst i tørre forhold på plan underlag. Våde og fugtige underlag vil kompromittere styrbarhed og bremseegenskaberne. Der skal bruges mere kraft på styrehåndtagene i vådt føre. Hvis våde forhold er uundgåelige: minimere din rute, bruge Medium hastighedsområde, og anvend ekstra kraft på håndtagene. Når det er sikkert, så test lejlighedsvis din evne til at stoppe og dreje. Hvis det virker tvivlsomt; sæt hastigheden ned.

Zingerstolen kører normalt fint på tør græs, men føles anderledes i styringen og der skal også bruges lidt mere kraft til styringen. Vådt græs anbefales ikke.


Zingerstolen er ikke et OFF ROAD køretøj eller et stykke legetøj.

Zingerstolen er ikke beregnet til ujævnt terræn, sand, sne, eller på anden måde vanskelige forhold. Hvis du er i tvivl, skal du vælge en alternativ form for transport. Zingerstolen er heller ikke beregnet til sport, stunts eller tricks af nogen art. Udvis altid forsigtig og husk at Zingerstolen er en mobilitetsenhed, og ikke et stykke legetøj.

Kør ikke med Zingerstolen på vejen, eller travle parkeringspladser. Brug altid fortove, cykelstier og officielle fodgængerovergange. Når du sidder i Zingerstolen, har du en meget lav profil og kan nemt blive overset af bilister. Hold sikker afstand til kantstenen når du kører på fortovet.


Zingerstolen Diagram

Fig. 1

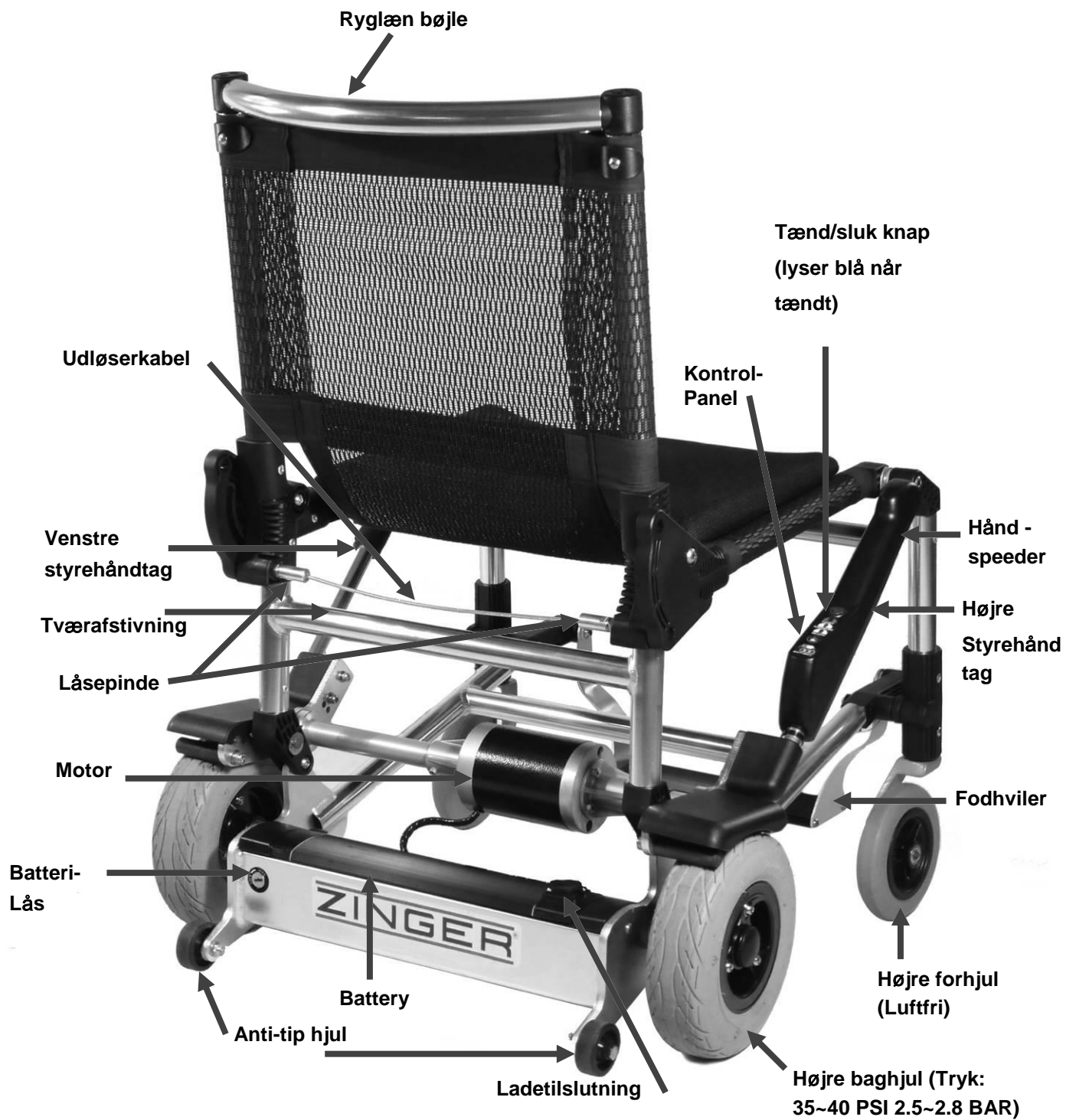

Tillykke med købet af din nye Zingerstol!

Din Zingerstol kan tage dig med overalt du ønsker, indendørs eller udendørs, (op til 13 km. På en enkelt opladning med den medfølgende letvægts litium-ion batteripakke). Din Zingerstol er den letteste og hurtigste foldebare elektriske kørestol på jorden. Den vejer kun 18 Kg og foldes sammen til 25cm. Zingerstolen er nem at læsse ind i næsten enhver bil. Zingerstolen er designet og udviklet i Virginia, USA.

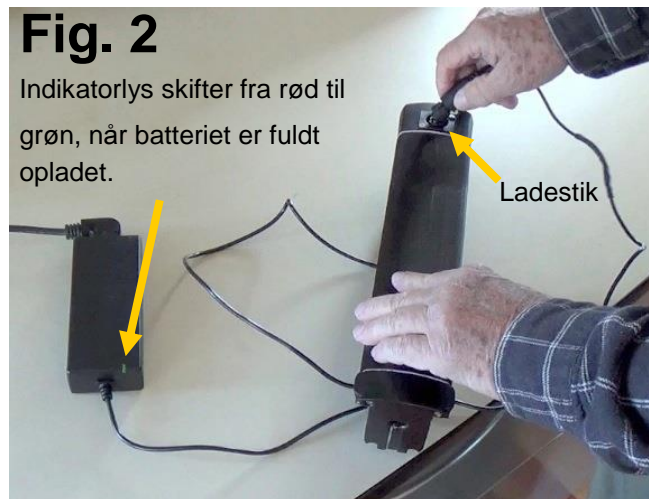

Gør dig klar

Træk Zingerstolen ud af kassen og fjern indpakningsmaterialer fra Zingerstolen. (Gem emballagen i kassen, hvis du får brug for at sende Zingerstolen.) Kør din første tur! Det er intet, der skal samles..

Auto-nedlukning og Battery dvaletilstand

Zingerstolen vil automatisk slukke efter ti minutters inaktivitet - Tryk på afbryderen for at slukke, vent to sekunder, og derefter tryk på den igen, så er Zingerstolen atter tændt.

Batteriet går i dvaletilstand efter to ugers inaktivitet. Sæt opladeren i batteriet i mindst 20 sekunder for at vække batteriet.

Opladning af batteri

Se fig. 2: Sæt opladerens netledning i den bagerste ende af opladeren først, og sæt den anden ende i stikkontakten. Sæt det runde stik i ladeporten på batteriet. Drej forsigtigt det runde stik, indtil du føler det falder ind i hak. Lyset på opladeren skifter fra rød til grøn når batteriet er fuldt opladet. Det tager op til 4 timer, hvis batteriet har været helt afladet. (Batteriet kan forblive i stolen, mens den oplades.)

FORSØG ALDRIG AT ÅBNE BATTERIET. BATTERIET KAN IKKE SERVICERES, INDEHOLDER LITHIUM ION CELLER OG ER FORSEGLET AF HENSYN TIL SIKKERHED.

FORSØG ALDRIG AT LADE BATTERIET MED EN ANDEN LADER END DEN MEDFØLGENDE, DA DETTE KAN MEDFØRE SKADE PÅ BATTERIET, OG/ELLER RISIKO FOR BRAND.

Kontrol af dæktryk

Din Zingerstol kører, styrer og bremser, ved at indkoble en drevrulle eller en stål bremseklods til de bageste dæk. Det er vigtigt, at dine bagdæk har det rigtige tryk. 35 ~ 40 PSI (2,5 ~ 2,8 bar). Hvis du ikke har en cykelpumpe med en indbygget trykmåler, bør du anskaffe en. Lavt dæktryk vil have en negativ effekt på køreegenskaberne.


Udfoldning til køreklar

Se fig. 3: Læg Zingerstolen på jorden, med dens hjul ned. Vær sikker på afbryderknappen er slukket (blåt lys er slukket). Træk i udløserkablet, mens du løfter i ryglæn bøjlen. Fortsæt med at løfte ryglænet, indtil du hører en "klik" der angiver, at låsepindene er i indgreb. Zingerstolen er nu køreklar. Kontroller at låsepindene er i indgreb, ved at give en fremadrettet skub til ryglænet.

Sammenfoldning for transport og opbevaring

Træk i udløserkablet og skub let frem på ryglæn bøjlen. Det kan hjælpe at bevæge Zingerstolen lidt fra side til side, mens du sænker ryglænet, så forhjulene folder sammen, under stolen. Du hører en "klik" lyd, når låsepindene går i indgreb, i sammenfoldet position.

Fig. 3

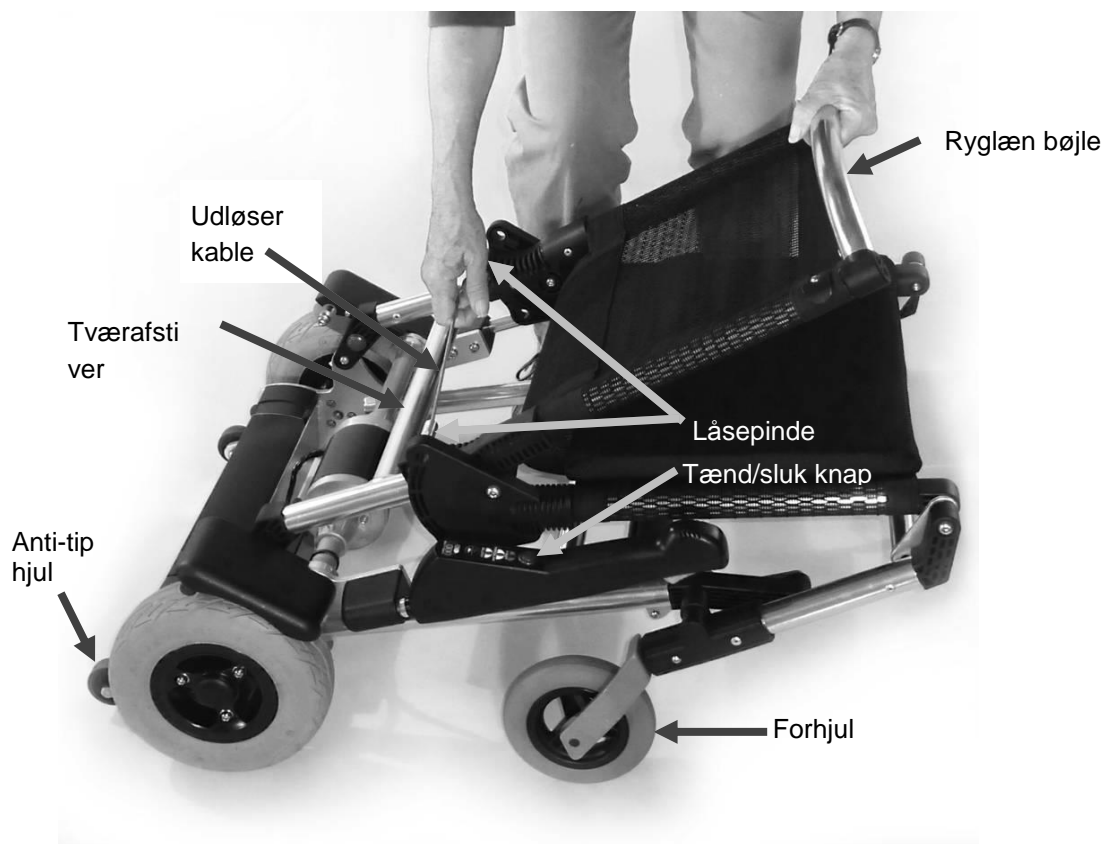

Batteri, installation og låsenøgle

Se fig. 4: Når opladningen er færdig, skal du installere batteriet med opladerstikket til højre. Sæt batteriet skråt ned i højre side, angivet med pil 1 i fig. 4, og tryk derefter venstre side ned, angivet med pil 2 i fig. 4. Du hører et "klik" som indikerer at batteriet nu er korrekt installeret. Låsen til batteriet, låser ikke for strømmen til kørsel med Zingerstolen. Efterlader du Zingerstolen på offentlige steder, bør du aflåse Zingerstolen med en cykellås eller lign.



Fig. 4



Fig. 5

Ind -og udstigning af Zingerstolen

For at sætte sig ned i Zingerstolen: Sving fodhvileren tilbage ved at skubbe den tilbage med dine hæle, som vist med den nederste pil i fig. 5. Som vist ved den øvre pilen i fig. 5, placere begge hænder på de forreste hjørner af sædet eller forrest på armlænene for at sænke dig ind i Zingerstolen.

For at stige ud af Zingerstolen: Stop helt op, på plant underlag. Tryk på tænd/sluk knappen (blåt lys bag knappen slukkes) og sving fodhvileren tilbage med dine hæle. Placere begge fødder på jorden og placere begge hænder på de forreste hjørner af sædet eller armlænene. Rejs dig nu op. Husk at Zingerstolen kan rulle, så du skal ikke læne dig tilbage mod stolen, når du rejser dig.

Kontrolpanel, håndspeeder og signalknap, forefindes på højre styrehåndtag

Hvert hastighedsområde er begrænset som:

L: Lav, maks.	1,5 km/t.
M: Medium, maks.	5 km/t.
H: Høj, maks.	9,5 km/t.
R: Bakgear, maks.	1,5 km/t.



Fig. 6

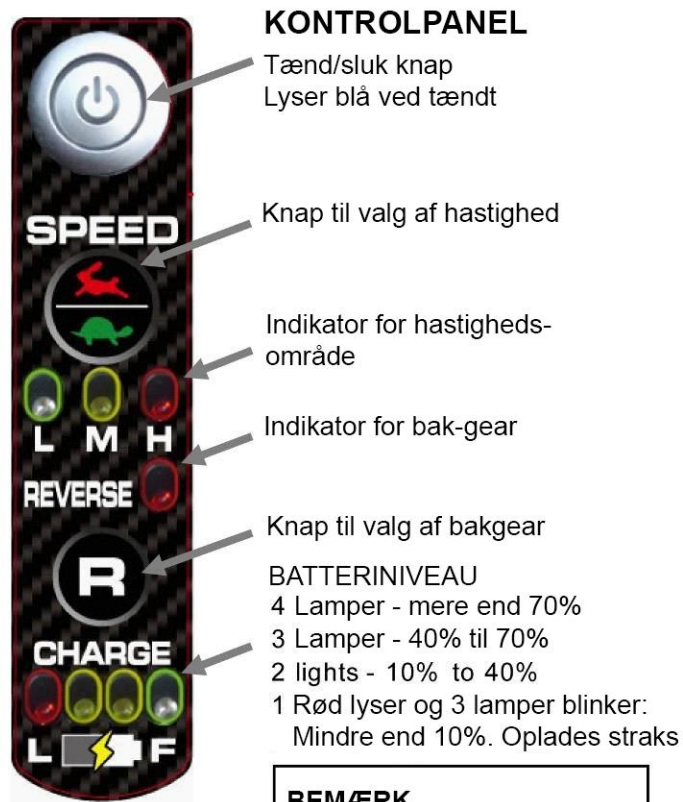


Fig. 7

BEMÆRK
Tryk ikke hårdt på kontrolknapperne, du risikerer, at de slides unødvendigt, eller går i stykker!

Tænd/sluk knappen og Auto Sluk

Se fig. 7: Tænd/sluk knappen er en trykknapper. Efter at have trykket én gang, forbliver den enten nede i "tændt" (Lyser blå), eller forbliver oppe i "slukket" (Intet lys). Hvis Zingerstolen efterlades tændt, vil strømmen automatisk slukke efter 10 minutters inaktivitet. Det blå "tænd-lys" lys vil slukke, selv om tænd/sluk knappen, er nede. For at nulstille og tænde for strømmen igen, skal du trykke på afbryderknappen én gang, så den er op, (flugter med overfladen), vent tre sekunder, og tryk derefter på afbryderknappen igen, så den er ned. Det blå lys tændes og indikerer, at Zingerstolen er tændt.

Batteriindikator lys

Se fig. 7: Når du tænder for strømmen, vil lysene (CHARGE) tænde, gradvist fra venstre mod højre. Korrekt indikation, får du efter 20 sekunders kørsel. Hvis kun det røde lys er tændt, og de tre andre blinker, er der for lidt strøm på til at køre.


Speederhåndtag

Se fig. 6: For at variere din hastighed inden for det valgte område, (fra nul til det maksimale af dette interval) klemme aftrækkeren gashåndtaget gradvist. For eksempel: kan langsomme hastigheder i HØJ område opnås ved kun at trykke lidt på speederen. Jo mere du trykker på speederen, jo hurtigere kører Zingerstolen, op til 9,5 Km/t i HØJ hastighedsområde. Bemærk: Speederen aktiverer kun motoren. Du skal trykke styrehåndtagene ned for at indkoble motoren med hjulene for at Zingerstolen kører.

Sådan kører og styrer du Zingerstolen-stolen

Bliv i lav gear, indtil du har lært at betjene Zingerstolen korrekt og du er fortrolig med styrer og bremse funktionerne. Læs denne side omhyggeligt og tag dig god tid forstå Zingerstolens virkemåde, før du prøver medium gear.


Find et stort, plan åbent område uden trafik eller forhindringer. Hver gang der tændes for strømmen (se fig. 7), vil Zingerstolen være i lavt gear. Lavt gear, begrænser motorhastigheden til meget langsom hastighed for læring og indendørs brug. I lavt gear alt sker i "slowmotion" for at give tid for dig at lære metoden til bremsning og styring af Zingerstolen. Hvis du bliver forvirret under træning, skal du altid trække i begge styrehåndtag, således at Zingerstolen stopper.

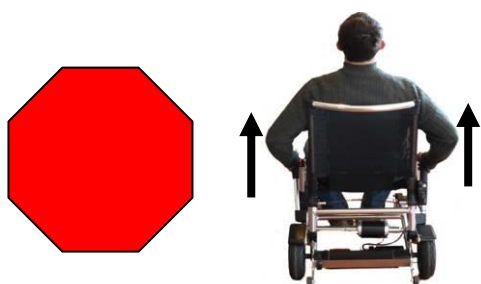


Sådan stopper og bremser du.

For at stoppe og bremse: Træk op på begge håndtag at anvende begge hjul bremser. Dette vil bremse Zingerstolen i en lige linje, indtil du er stoppet. Det vil også stoppe dig, hvis du begynder at rulle på grund af en rampe eller bakke.

For at stoppe hurtigere, træk hårdere.

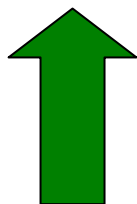


Kørsel ligeud: Skub begge styrehåndtag ned med moderat kraft, hold dem nede, mens du forsigtigt trykker på speederen, for at starte motoren og variere hastigheden.

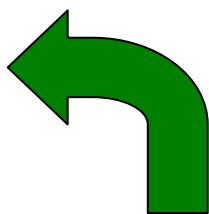

Brug modsat rettet bevægelse af styrehåndtagene for at svinge/dreje

Drej til venstre: træk op i venstre håndtag, mens du trykker ned på højre håndtag. Jo hårdere du tvinger håndtagene, jo skarpere drejer du. Brug speederen til at kontrollerer hastigheden gennem svinget.

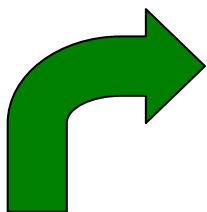

Drej til højre: træk op i højre håndtag, mens du trykker ned på venstre håndtag. Jo hårdere du tvinger håndtagene, jo skarpere drejer du. Brug speederen til at kontrollerer hastigheden, gennem svinget.

Træn, sving, opbremsning og acceleration, I lav gear, til du har fuld og naturlig kontrol over Zingerstolen.

Når du føler dig sikker i din evne til at starte, stoppe, og styre din Zingerstol, find da en åben plads til at prøve medium hastighed, som beskrevet i det følgende afsnit nedenfor, "Kontrol Panel og hastighed vælger".

Vær opmærksom på at højere hastighed gør din sving-radius større.

Skrid ikke med hjulene, da Zingerstolen drejer ved at bremse det indvendige hjul, kan skarpe sving kun opnås ved lave hastigheder. Hvis du blokkerer det indvendige hjul ved sving, kører du for hurtigt. Sæt farten ned i en lige linje ved at trække op på begge håndtag indtil du næsten er stoppet og gennemfør svinget med lav hastighed.

Kontrolpanel hastighedsvælger

Idet der henvises til fig. 7: Hver gang Zingerstolen bliver tændt, vil den starte op i lavt hastighedsområde. Ved at trykke på hastigheds vælger knappen ("skildpadde/hare" knappen) skifter hastighedsområdet fra LAV (grøn) til MEDIUM (gul) til HØJ (rød) og tilbage til LAV igen. Hastighed Indikatorlampen vil forblive at lyse, på det valgte hastighedsområde.

VÆLG ALDRIG HØJ HASTIGHEDSOMRÅDE TIL INDENDØRS BRUG!

Baglænskørsel med Zingerstolen

Når du skal bakke væk fra noget, det er normalt bedst at blot bruge dine fødder mod jorden.

Bakgear med motor: Hvis du vil køre baglæns skal du trykke på "R" for "Reverse" (bakgear) for at sætte Zingerstolen i bakgear. Det røde lys tændes med "REVERSE" og angiver at din Zingerstol nu er i bakgear. Der vil lyde en "bip – bip – bip" lyde, der ligeledes fortæller at du er i bakgear. Tryk på begge håndtag ned og tryk forsigtigt på speederen. Bakgear er altid lav hastighed. Vær opmærksom på at kørsel i bakgear er svært, da Zingerstolen drejer modsat af fremad drift.

Lydgiver-knap

Den røde knap i øverste venstre side af højre betjeningsgreb er en "høfligheds-bipper", beregnet til høfligt at annoncere din tilstedeværelse. Bipperen er ikke et horn og er ikke beregnet til at undgå kollisioner eller som en fare alarm.

Serienummer

Serienummeret er det ti-cifrede nummer, stemplet i aluminiumsrammen ved siden af den sorte styreboks, under motoren og mellem baghjulene. Det kan være nødvendigt at henvise til serienummeret, ved service eller reservedele i fremtiden. Så registrer dit serienummer ved at skrive det på din købskvittering og/eller andet sted hvor det kan gemmes på en sikker måde.

Løft og opbevaring af Zingerstolen-stolen

Flyt din Zingerstol ved at skubbe den foran dig. Den giver samtidig god støtte.

Løft af Zingerstolen: Vip den Sam foldede Zingerstolen op på højkant, som vis på nedenstående billeder.

Kontrolpanelet skal vende op. Forsøg ikke at bære din Zingerstol, på trapper, hvis du ikke er sikker på om du kan.

Vip Zinger op på højkant, med kontrolpanelet op ad.



2. Zinger kan stå på højkant af sig selv. En god måde at opbevare den, hvis pladsen er trang

Stil ikke Zinger op af en væg, på anti-tip hjulene. Den vil rulle ud og vælte.

3. Bær din Zingerstol ved at løfte den i bundrammen, med den ene hånd og undersiden, væk fra dig (som vist på billedet). Så har du god balance i Zingerstolen.

Zingerstolen, ind og ud af bilen

Din Zingerstol passer i bagagerummet på de fleste biler. Her er et par tips til hvordan du nemt løfter Zingerstolen ind i en bil.

Rengør gerne med en blød klud eller lign. inden du skal løfte Zingerstolen ind i bilen. Den kan være beskidt de steder du skal have ved den (under batteriet og anti-tip hjulene).

Åben bagagerummet på bilen og gør plads til Zingerstolen. Derefter folder du Zingerstolen sammen (som vist på side 7) Du skal høre et "klik" når låsepindene går i indgreb. Løft Zingerstolen ind i bilen, som vist på de 3 billeder herunder.



1. Tag fat i anti-tip hjulene og løft bagenden op. Lad Zinger hvile mod lårene, som vist ovenfor.



2. Tag fat i tværafstiveren og løft Zinger fra Jorden, med batteriet presset mod lårene, som vist ovenfor.



3. Læg Zinger på plads i bagagerummet.

Justering af styrehåndtagene

Din Zingerstolen er designet til at passe til de fleste personer. Men, hvis du føler at der er for kort eller langt, ned til styrehåndtagene, kan disse justeres i højden. Justering skal foretages med den 5mm. umbraco nøgle, som fulgte med Zingerstolen. Se billeder herunder.



På indersiden af hver styrehåndtag, er der 2 skruer. Løsen den øverste og fjern den nederste

Juster håndtaget op og placer bagerste skrue i nederste hul. Spænd begge skruer.

Pleje og vedligeholdelse

Zingerstolen er designet til at være næsten vedligeholdes-fri og har ingen justerings-vedligeholdelse, udover at du skal køre med korrekt dæktryk.

Dæk: Det er vigtigt at holde korrekt dæktryk. Dæktrykket skal være mellem **35~40 PSI (2.5~2.8 Bar)**. Hvis styrehåndtagene bliver bløde at betjene, kan det være fordi dæktrykket er for lavt. For lavt dæktryk, nedsætter styre og bremse-egenskaberne.

Batteri: Dit batteri er af typen: Lithium Ion (Li-ion), som også bruges i bærbare computere og mobil telefoner. For at opnå, længst mulig levetid, skal du undgå at udsætte batteriet for høje temperature. Optimalt skal batteriet holdes under 30°C. Undgå at opbevare batteriet i direkte sollys eller i en varm bil, eller lign. Når batteriet er opladet, skal ladestikket fjernes fra batteriet. **VIGTIGT:** Batteriet går i **dvale tilstand**, efter 2 uger uden brug. For at "vække" batteriet igen, skal det sættes til laderen i minimum 20 sekunder.

Laderen lyser **blå**, når der er strøm til den. Når batteriet kobles til laderen, lyser den **rødt**, mens der lades. Når batteriet er fuld opladet, skifter lampen til **grøn**

Rengøring: Hold din Zingerstolen ren ved at aftørre den med en opvredet klud, eller en tør støvklud. Vask ikke Zingerstolen med børste/svamp og vand. Kontrolpanelet, batteriet og motoren skal holdes tør, under rengøring.

Vi håber at Zingerstolen bliver din bedste ven. Nyd friheden og oplev verden!

Specifikationer

Total vægt	18.9Kg (inklusive Li- ion battery)
Dimension L x B x H	785 x 645 x 935 (mm)
Foldet L x W x H	955 x 645 x 250 (mm)
Sæde Dimension L x W	330 x 420 (mm)
Sædehøjde	485 mm
Hastighed (variabel i 3 områder)	Lav område: 1.5 Km/t Medium område: 5 Km/t Høj område: 9.5 Km/t
Bakgear	1.5 Km/h
Rækkevide, op til	13 Km
Maksimal stigning	8 Grader
Udvendig venderadius,	610 mm
Motor	DC 36V, 250W, 7A
Batteri	36V, 6.6 AH, 240watt-timer, Lithium-Ion 1.8 Kg
Oplader	2.1A, Automatisk (Grøn lys=opladet) input 100-240V
Styre/bremse system	Dobbelt styrehåndtag
Forhjul	6 tommer ikke afsmittende, massiv PU
Baghjul	9 med slange ikke afsmittende (35~40PSI / 2.5~2.8Bar)
Anti-Tip hjul	50mm massiv
Max brugervægt	120 Kg

Spørgsmål og svar, samt fejlfinding

• Kan jeg medbringe min Zingerstolen i et passagerfly?

IATA og USDOT regulativerne kræver, at du fjerner batteriet og medbringer det som håndbagage i flyet. Batteriet er på 240 Watt/t, hvilket er mindre end 300 Watt/t begrænsningen for Li-ion batterier, specifikt anvendt til personlige hjælpemidler. Sørg for at meddele security, i forbindelse med baggage scanning, at du medbringer et for Li-ion batteri til et personligt hjælpemiddel.

De fleste flyselskaber tillader at du medbringer Zingerstolen som frit ind-tjekket baggage, i det den er et personligt hjælpemiddel. Spørg dit luftfartsselskab i forbindelse med rejsebooking.

• Min Zingerstol tænder ikke når jeg trykker på "tænd/sluk" knappen.

1. Hvis Zingerstolen har stået tændt i mere end 10 minutter, uden at have været anvendt, vil auto-sluk funktionen selv slukke for stolen, for at spare strøm. Tryk da på tænd/sluk knappen, så den er i topposition, hvor den er plan med den sølvfarvede yderkant. Vent da 3 sekunder og tænd stolen igen. Se i øvrigt side 9.
2. Har du ikke brugt Zingerstolen i 2 uger, går batteriet i dvale, for at spare kapacitet. Sker dette, sætter du blot laderen i batteriet i mindst 20 sekunder. Herefter er batteriet klart igen. Se i øvrigt side 6.

• Min Zingerstol går i stå under kørsel.

1. Kontroller at batteriet er korrekt monteret og aflåst.
2. Du kan ved kørslen have aktiveret afbryderknappen. Tryk på tænd/sluk knappen, således at knappen er plan med den sølvfarvede yderring. Vent to minutter og tryk igen på tænd/sluk knappen.
3. Kontroller at batteriet er opladet.

• Styrehåndtagene føles bløde "svampede" ved tryk -og træk påvirkning.

Kontroller dæktryk. Det skal være mellem 35-40 PSI eller 2,5-2,8 Bar. Kør ikke med for højt dæktryk!

• Zingerstolen kører ikke ligeud.

1. Hvis du kører på en ujævn/skrånende overflade, vil Zingerstolen køre lidt nedad. Kør i stedet på en jævn overflade som f.eks. fortovet i stedet.

• Min Zingerstol drejer eller stopper ikke så hurtigt som normalt.

1. Brug lidt mere kraft i styrehåndtagene.
2. Vælg et andet køreunderlag.
3. Hvis dækkene skrider når du drejer, sæt da farten ned inden du fortager svingning.
4. Hvis du kører nedad, kør da med forsigtighed, til du igen er på jævnt plan. Kørsel på ramper bør kun fortages ligeud, og ramper med en stigning/fald på mere end 5 grader, bør undgås, især hvis føret er vådt.

Hvis du er usikker på underlaget, kan du altid skubbe din Zingerstol i øverste ryglænsbøjle.

For yderligere spørgsmål og svar, kontakt da Funder-Reedtz Development ApS på telefon eller mail, angivet nedenfor.

Mail: info@frdev.dk

Telefon: Ring til nærmeste Zinger-servicecenter, se www.frdev.dk

DISTRIBUTION AF ZINGERCHAIR EKSKLUSIVT VED FUNDER-REEDTZ DEVELOPMENT ApS
FORHANDLERLISTE, UDSYR & TILBEHØR FORFINDES PÅ WWW.FRDEV.DK

