

Brugervejledning

SOUNDGATE MIKROFON

Til brug med SoundGate 3



bernafon[®]
Your hearing • Our passion

Indholdsfortegnelse

Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed	6
Indledning	8
SoundGate Mikrofon oversigt	9
Sådan virker SoundGate Mikrofon	10
Sådan bæres SoundGate Mikrofon	11
Opladning af SoundGate Mikrofon	12
Strømindikator	13
Etabler forbindelse til SoundGate 3	14
Opsætning af SoundGate Mikrofon	17
Afbryd midlertidigt/genoptag lyd fra SoundGate Mikrofon	19
Sluk for SoundGate Mikrofon	20
Vigtig information (ekstra)	21

Tillykke med din nye SoundGate Mikrofon.
Mikrofonen kan gøre det lettere for dig at høre i udfordrende lytteomgivelser.

Denne vejledning indeholder vigtig information om, hvordan du kan forbedre dine kommunikationsmuligheder.







Før SoundGate mikrofonen tages i brug, bør du læse hele denne brugervejledning. Den indeholder instruktioner og vigtig information om brug og vedligeholdelse.

Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed

Du bør være fuldt bekendt med de generelle advarsler, før du tager din SoundGate Mikrofon i brug.

Advarsler

-  SoundGate Mikrofon er ikke legetøj og skal opbevares så børn og andre, der kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade dem selv, ikke kan nå den. Særlig opmærksomhed bør rettes mod de mindre dele. Hvis en del sluges, skal du omgående søge lægehjælp.
-  Udsæt aldrig SoundGate Mikrofon for kraftig varme ved at putte den i ovnen, mikroovnen, brænde den eller efterlade den i en varm bil parkeret i solen. Der er en risiko for, at den kan eksplodere og forårsage alvorlig skade.
-  Hvis nakkestroppen ved et uheld skulle hænge fast i noget, imens brugeren har den på, er nakkestroppen udstyret med en sikkerhedslås, som gør, at den åbnes. Man må derfor aldrig forkorte eller ændre nakkestroppen på en uautoriseret måde. Nakkestroppen må ikke benyttes af børn, der vejer under 11 kg.
-  SoundGate Mikrofon bør ikke anvendes ombord på et fly uden specifik tilladelse fra flypersonalet.

- ⚠ SoundGate Mikrofon opfylder de strengeste internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Selvom det er højst usandsynligt, kan SoundGate Mikrofon dog forstyrre medicinske apparater, såsom defibrillatorer og pacemakere.
- Kontakt producenten af dit implantat for information om risikoen for forstyrrelser.
 - Fjern omgående SoundGate Mikrofon, hvis der er mistanke om forstyrrelse. Brug ikke SoundGate Mikrofon og indhent anvisninger.
- ⚠ Strømkabler, metaldetektorer i lufthavne, elektromagnetiske felter fra andet medicinsk udstyr og elektrostatisk udladninger kan også forårsage forstyrrelser.
- ⚠ Sikkerheden ved brug af SoundGate Mikrofon med AUX-kablet bestemmes af en ekstern signalkilde. Når kablet er tilsluttet et apparat, der er tilsluttet el-nettet, skal dette apparat opfylde kravene i IEC-60065, IEC-60950, IEC-60601 eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.
- ⚠ Sikkerheden ved genoplading af batterier med USB-stikket alene bestemmes af det eksterne apparat. Når indgangskablet er tilsluttet et apparat, der er tilsluttet el-nettet, skal dette apparat være UL-godkendt eller opfylde kravene IEC-60065, IEC-60950, IEC-60601 eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

Indledning

Nedenstående dele er inkluderet i din SoundGate Mikrofon kasse:



SoundGate Mikrofon
Model: MIC-110



Strømforsyning (oplader)




Brugervejledning




Halsstrop

SoundGate Mikrofon oversigt

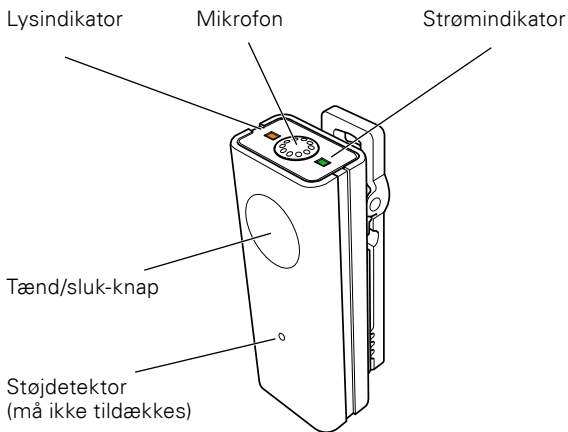

Sådan virker SoundGate Mikrofon


Mikrofonen sender talesignalet fra taleren direkte til brugerens høreapparater. En mikrofon fungerer kun sammen med én SoundGate ad gangen.

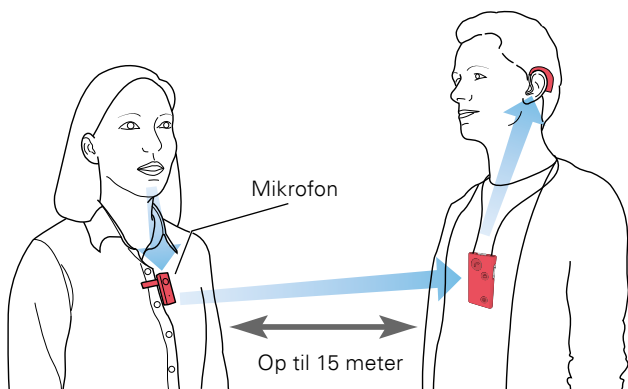


Sådan bæres SoundGate Mikrofon

Mikrofonen skal være rettet mod talerens mund inden for en afstand på 10 til 20 cm.

Brug med clips

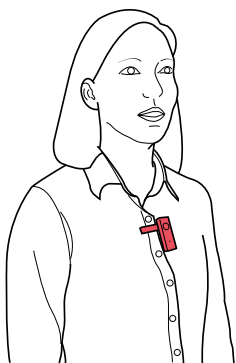


Brug med halsstrop

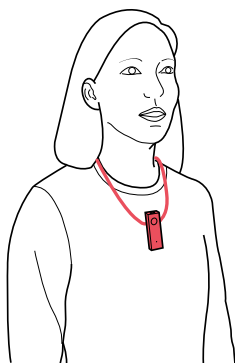


Opladning af SoundGate Mikrofon

For at oplade mikrofonen tilsluttes opladerkablet til stikket i bunden på mikrofonen (mini-USB).

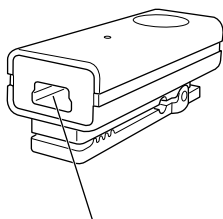


Stik til oplader
(mini-USB)

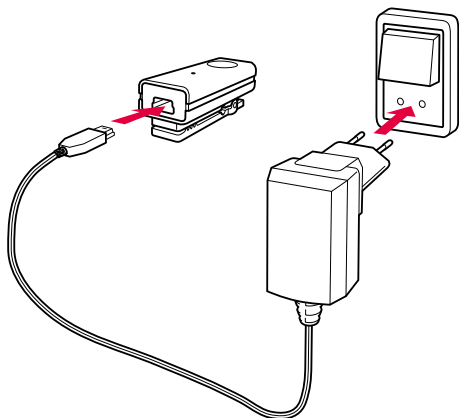


Strømindikator

Strømindikatoren på toppen af mikrofonen viser batteriniveau og/eller opladning.


Konstant
rødt lys

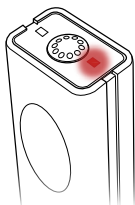

Blinkende
grønt lys

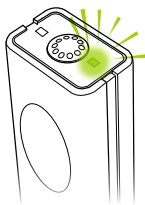

Konstant
grønt lys

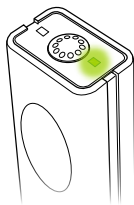

Lavt batteriniveau

Oplader

Fuldt opladet

Maks. 20 min.
taletid tilbage


Efter ca. 1,5 time.
Giver op til 5 timers
brug.

Etabler forbindelse til SoundGate 3 (foretages kun én gang)

1. **Sæt SoundGate 3 i forbindelsestilstand** ved at trykke på tænd/sluk-knappen på SoundGate 3 i 5–6 sekunder. Lysindikatoren på SoundGate 3 vil blive blå og blinke hurtigt. Enheden er nu i "forbindelsestilstand".



2. **Sæt SoundGate Mikrofon i forbindelsestilstand** ved at trykke på tænd/sluk-knappen i 5–6 sekunder. Lysindikatoren på mikrofonen vil blive orange og blinke hurtigt. Enheden er nu i "forbindelsestilstand".

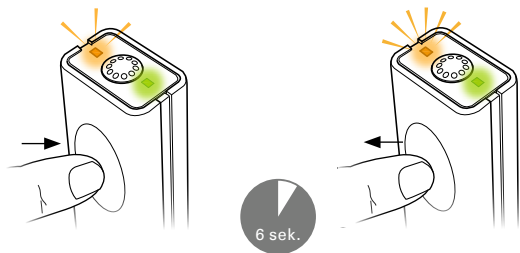

3. **Vent op til 1 min.** indtil AUX-knappen på SoundGate 3 og lysindikatoren på mikrofonen begge lyser orange. Forbindelsen er nu oprettet.




Opsætning af SoundGate Mikrofon


1. **Sørg for, at SoundGate 3 er tændt** ved at trykke 1–2 sekunder på tænd/sluk-knappen. Lysindikatoren på SoundGate 3 lyser grønt.



2. **Tænd for SoundGate Mikrofon** ved at trykke kort på tænd/sluk-knappen. Strømindikatoren lyser grønt, og lysindikatoren blinker orange, indtil den finder den forbundne SoundGate 3 enhed. Lysindikatoren lyser herefter konstant orange.

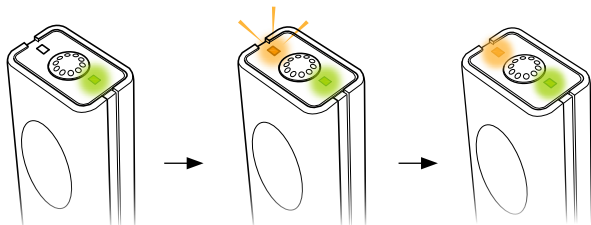


3. **Dobbeltklik (2x) på AUX-knappen på SoundGate 3** for at påbegynde lydoverførslen fra mikrofonen.

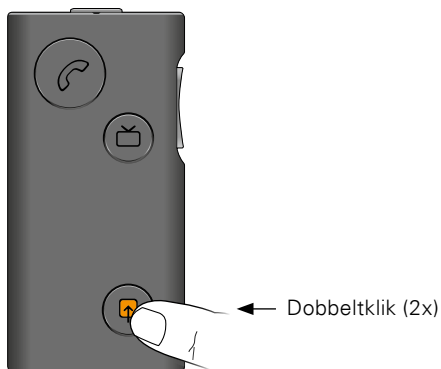


Afbryd midlertidigt/genoptag lyd fra SoundGate Mikrofon

1. **Tryk kort på AUX-knappen på SoundGate 3** for at afbryde lyden fra mikrofonen midlertidigt.

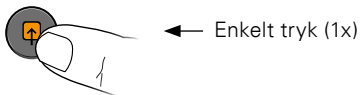


2. **Dobbelklik (2x) på AUX-knappen på SoundGate 3** for at genoptage lyden fra mikrofonen.

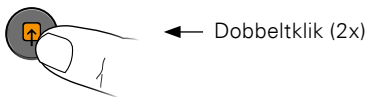

Sluk for SoundGate Mikrofon

Hold tænd/sluk-knappen på mikrofonen inde i 2–3 sekunder, indtil strømindikatoren slukker.

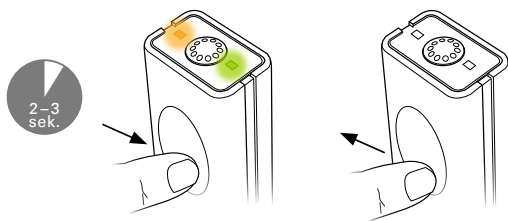

Vigtig information (ekstra)

SoundGate Mikrofon indeholder en radiosender, som benytter frekvensspring-teknologi på ISM-båndet ved 2,4 GHz.

Energien generelt i spidsbelastningen for senderen er mindre end 6 dBm, og antennen er en lille PCB-antenne med direktional gain på mindre end 2 dBi (dB over en isotropisk eller omni-direktional antenne).

Emissionsstyrken fra SoundGate Mikrofon er under de internationale emissionsgrænser for menneskelig eksponering. SoundGate Mikrofon opfylder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet.

USA and Canada

Due to the limited size available on the device, many of the relevant approval markings are found in this document. This instrument is certified under:

FCC ID: 2ACAHMIC110

IC: 11936A-MIC110

The device complies with Part 15 of the FCC rules and RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment

off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SBO Hearing A/S erklærer hermed, at denne SoundGate Mikrofon er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Overensstemmelseserklæring fås her:

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark

Noter





< >
8,15 mm

Placeholder
for FSC logo

^
19 mm
v

^
9,0 mm
v

< 15 mm >



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
www.sbohearing.com



E2831



Affald fra elektronisk
udstyr skal håndteres i
overensstemmelse med
lokale forskrifter.



0000144919000001

bernafon 
Your hearing • Our passion