


Hyper Foam VISCO CLINIC



- Brugsanvisning

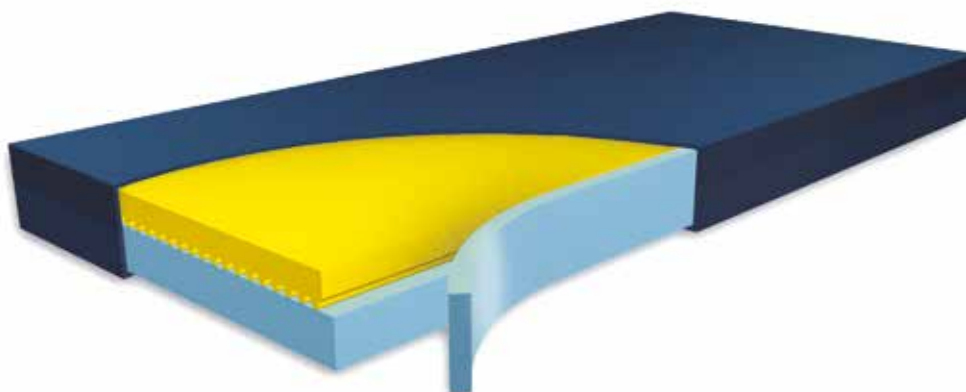

Formål:

Madrassen er beregnet til forebyggelse og behandling t.o.m. stadie 2 (EPUAP) (Middelrisiko) ifht. udvikling og behandling af tryksår.

Opbygningen af madrassen er således, at brugeren bliver trykaflastet bedst muligt. Madrassen skal minimum belastes med 20 kg og må maksimalt belastes med 140 kg. Kan placeres direkte på sengebund.

Inden madrassen anvendes bedes følgende tjekkes:

Kontroller at madrassen passer til sengen.

Kontroller at madrassen vender korrekt, hvilket fremgår af madrassen.

Sikkerhedsinstruktioner:

I henhold til EN 60601-2-52 skal det sikres, at der er minimum 22 cm fra overfladen af madrassen til overkanten af sengehesten, når denne er slået op.

Madrassens vægtbelastning må ikke overskrides.

Madrassen (skum og betræk) er opbygget af brandhæmmende materiale, dog frarådes det, at ryge eller have åben ild i nærheden.

Husk at tjekke sengens brugervejledning, inden madrassen anvendes i sengen.

Hyper Foam VISCO CLINIC



- Brugsanvisning

Betræk:

Betrækket er et inkontinensbetræk, som sikrer, at væsker som f.eks. urin eller blod ikke trænger igennem til skummet. Betrækket er fremstillet i polyurethan og er allergivenligt, virus- og bakteriesikkert, åndbart, PVC-fri og er brandhæmmende efter DIN EN 597 I + II // BS 7175 sec 3 crib 5

Betrækket skal efterses en gang om måneden for skader. I tilfælde af en beskadigelse, må betrækket ikke anvendes, før det er repareret eller udskiftet.

Rengøring:

Betrækket må vaskes ved 95°C og kan tørretumbles ved laveste varme. I det daglige kan betrækket rengøres med en let fugtig klud tilsat almindelige rengøringsmidler eller med desinficeringsmiddel. Betrækket skal være tørt, inden det trækkes på skummet.

Kan autoklaveres op til 105°C (iht. RKI guideline)

Note: Inden madrassen anvendes til en anden person anbefales det, at betrækket vaskes/desinficeres.

Opbevaring:

Madrassen skal opbevares ved normal indendørs temperatur (+2 – +40°C) og ved normal luftfugtighed (40-90%). Madrassen opbevares bedst, når den ikke er rullet sammen.

Madrassen har en forventet levetid på 5 år forudsat at almindelige vedligeholdelses- og plejeanvisninger er overholdt.

Garanti: 3 år (gælder for skumkernen.)

Bortskaffelse:

Både madras og betræk kan bortskaffes i stort brændbart på genbrugspladser. Biokompabilitet DIN EN ISO 10993-5 ; DIN EN ISO 10993-1

Produktionsland: Tyskland

