



ZITZI™
STARFISH PRO



Brugsanvisning

Zitzi Starfish Pro

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsföreskrifter	3	Fodstøtte	18
Inledning	3	Montering/Vinkeljustering	18
Anvendingsområde	3	Fast fodstøttesbeslag	18
Korrespondens	3	Fjædrande fodstøttesadapter	19
Stel	4	Uppfällbart fodstøttesbeslag	19
Manuellt stel	4	Kulledsadapter	19
Høj-/sænkbart stel	4	Lægstøtte	20
Hjul	5	Montering	20
Låsning av hjul	5	Höjjustering	20
Sædedel	6	Breddjustering	20
Justering sædedel	6	Potte	21
Justering sædedybde/abduktion	6	Montering	21
Abduktions-/adduktionsstøtte	7	Kisskydd	22
Montering	7	Underhåll och skötselanvisningar	23
Justering	7	Serviceintervall	23
Hoftebælte	8	Rengöring och tvätt	23
Montering	8	Gaskolven måste aktiveras regelbundet	23
Justering	8	Verktyg	23
Rygg	9	Garanti	23
Hoftevinkel	10	Kombinationer	23
Tilt av sædeenhed	11	Reserve dele	24
Hoftestøtte	12	Rekonditionering	24
Armstøtte	13	Märkning	24
Montering	13	Återvinning	24
Justering	13	Sammanfattning och efterkontroll	24
Djupjustering	13	Anpassning och specialanpassning	25
Armstøtte, stel	14	Rekommendationer	25
Montering	14	Anpassningar som får göras på Zitzi Starfish Pro	25
Fällning av armstøtte	14	Kapa fodstøttesprofiler	25
Körbåge	15	Kapa armstøttesprofiler	25
Hovedstøtte	16	Kapa ryggstøttesprofil	25
Montering/Justering	16	Försäljningsvillkor	26
Supportbeslag	17	Garanti	26
Montering/Justering/Efterkontroll	17	Reklamation	26
		Returer	26
		Tekniska data	27

Kryssa
här!

Kryssa i rutan vid ev.
SPECIALANPASSNING
CE-märkning gäller ej!

Sikkerhedsforeskrifter

Indledning

För att ni ska kunna utnyttja Zitzi Starfish Pro till fullo är det viktigt att ni läser igenom denna bruksanvisning ordentligt. Detta gäller alla personer som finns i brukarens närhet. Produkten är avsedd för brukare med sittproblematik och passar många olika typer av diagnoser. Anpassning/inprovning av Zitzi Starfish Pro ska alltid utföras av medicinskt behörig person.

Om ni behöver kompletterande uppgifter är ni välkomna att kontakta Anatomic SITT A/S.

Användningsområde

Produkten är avsedd att användas som hygienestol. Om önskemål om annan användning finns, vänligen kontakta Anatomic SITT A/S.

Korrespondens

Zitzi Starfish Pro med dess tilbehør er en CE-mærkt produkt. Ett unikt serienummer är placerat på det bakre mellanröret. Detta serienummer ska anges vid all korrespondens gällande produkten.

Produkten er fremstillet af Anatomic SITT AB

Postadress Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping

Besöksadress Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping

Telefon 011-161800

Fax 011-162005

E-post info@anatomicsitt.com

Web anatomicsitt.com, youtube.com/anatomicsitt

Anatomic SITT i Danmark:

Viengevej 4

8240 Risskov

Telefon 86 17 01 74

E-mail a-sitt@anatomic-sitt.dk


Stel

Manuellt stel


Sædeenheten kan justeras till önskad höjd innan patienten sätts i sitsen. Lossa spak (A) på båda sidor (position (B) är inte helt åtdragen, men hjälper till att styra vaggan i spåren). Lyft sitsen ur spåren och för in sitsen i spåren på önskad höjd. Se till att trycka ned sitsen ordentligt i spåren. Avsluta med att dra åt spak (A).

Höj-/sänkbart stel

Sædeenheten kan höjas eller sänkas till önskad höjd. Detta görs genom att pumpa på pedalen (A). Se till att pumpa med mjuka rörelser för att höjningen ska bli behaglig för patienten. För att sänka enheten så placeras en fot under pedalen och trycker den uppåt.

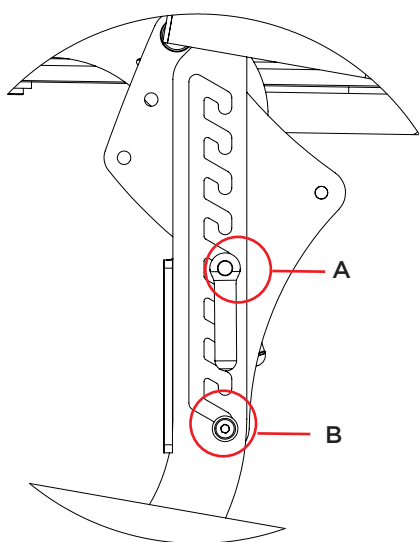

Manuellt stel

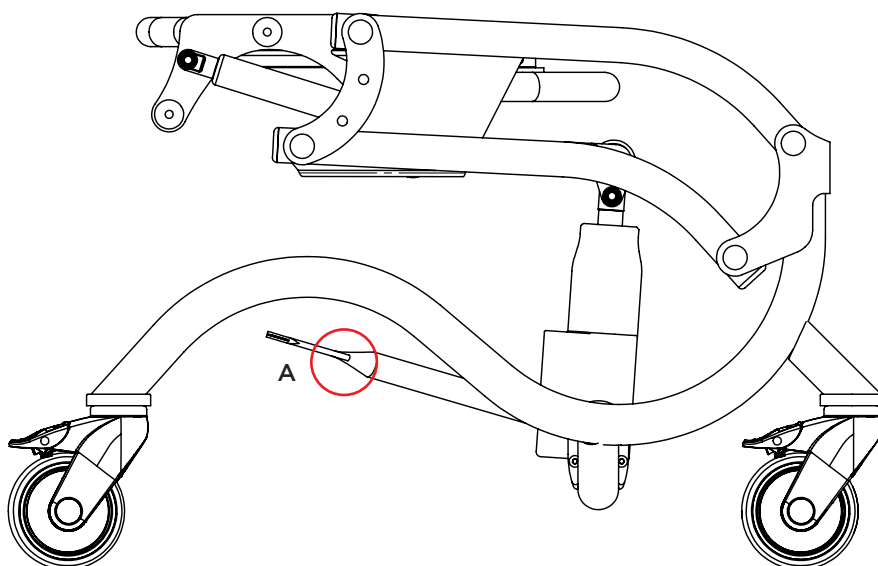


Höj-/sänkbart stel

Hjul

Låsning af hjul

Tryck ned bromsreglaget (A) med foten för att låsa hjulen. (Se bild.) Drag upp reglaget för att frigöra hjulet.

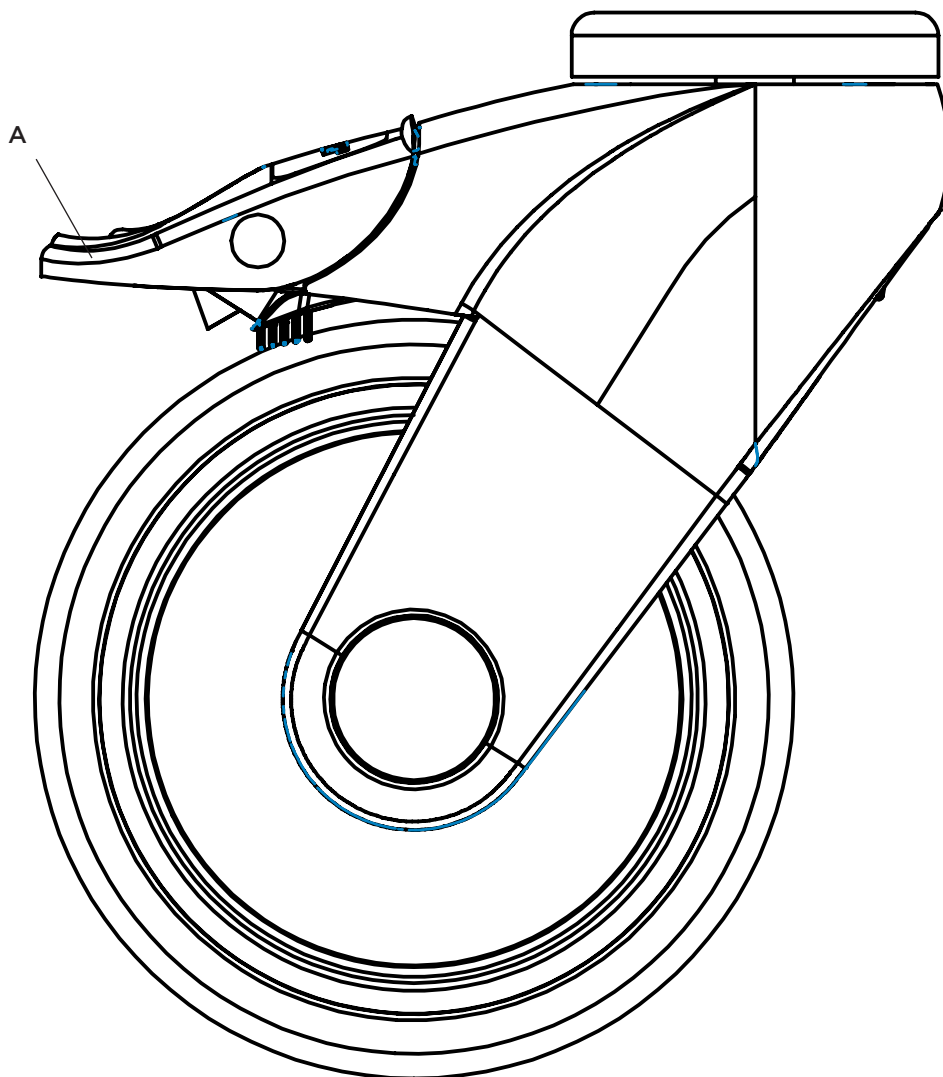

Sædedel


Justering sædedel


Sædedybde, benlængdsskillnad och abduktion av benen justeras enkelt. Ta bort fodret för att komma åt skruvarna.

Justering sædedybde/abduktion:

Lossa skruvarna (A) så att sædedelarna kan justeras för hand.

Justera sædedelarna. Lås skruvarna (A).

 **OBS! Var noga så att du inte skruvar ur skruvarna helt!**

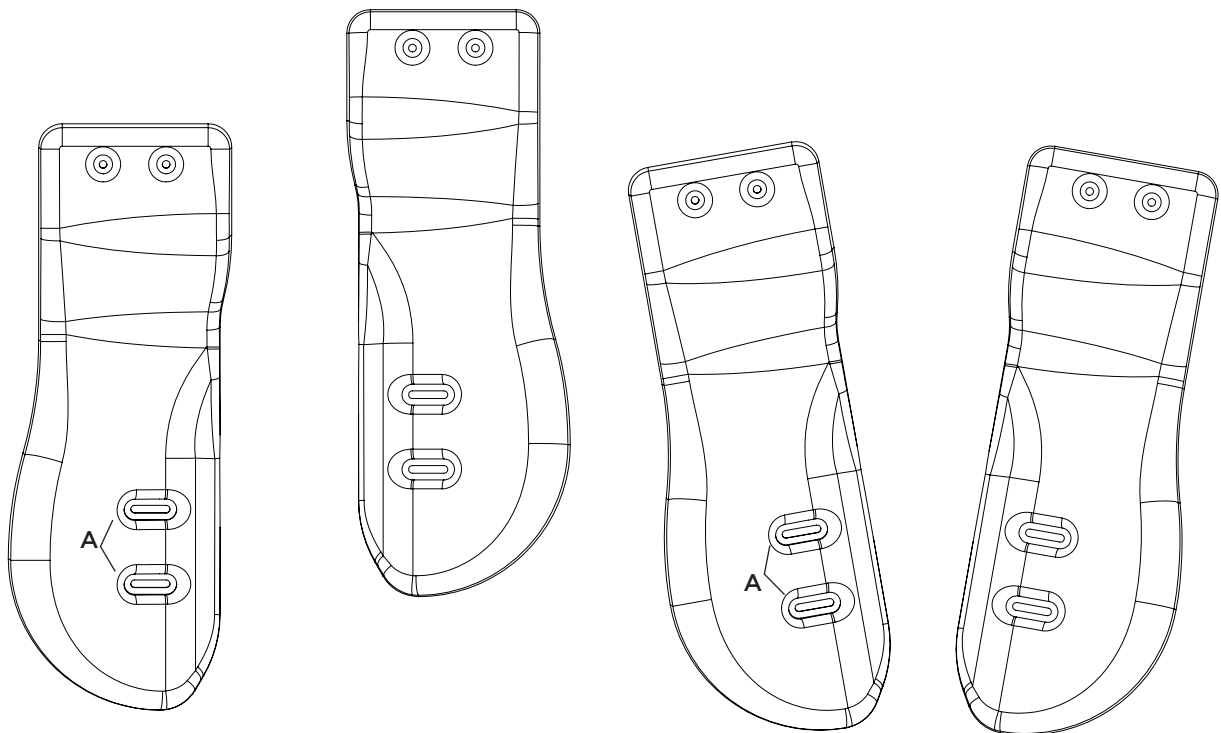


Abduktions-/adduktionsstøtte

Montering

Skruva loss skruvarna (A) och sätt dit støtteen så att du ser hålen genom spåren på støtteen. Skruva sedan i skruvarna genom spåren och in i hålen för att fästa støtteen.

Justering

Lossa lite på skruvarna (A) så att du kan skjuta støtteen i sidled. Justera dem till önskat läge och dra sedan åt skruvarna.

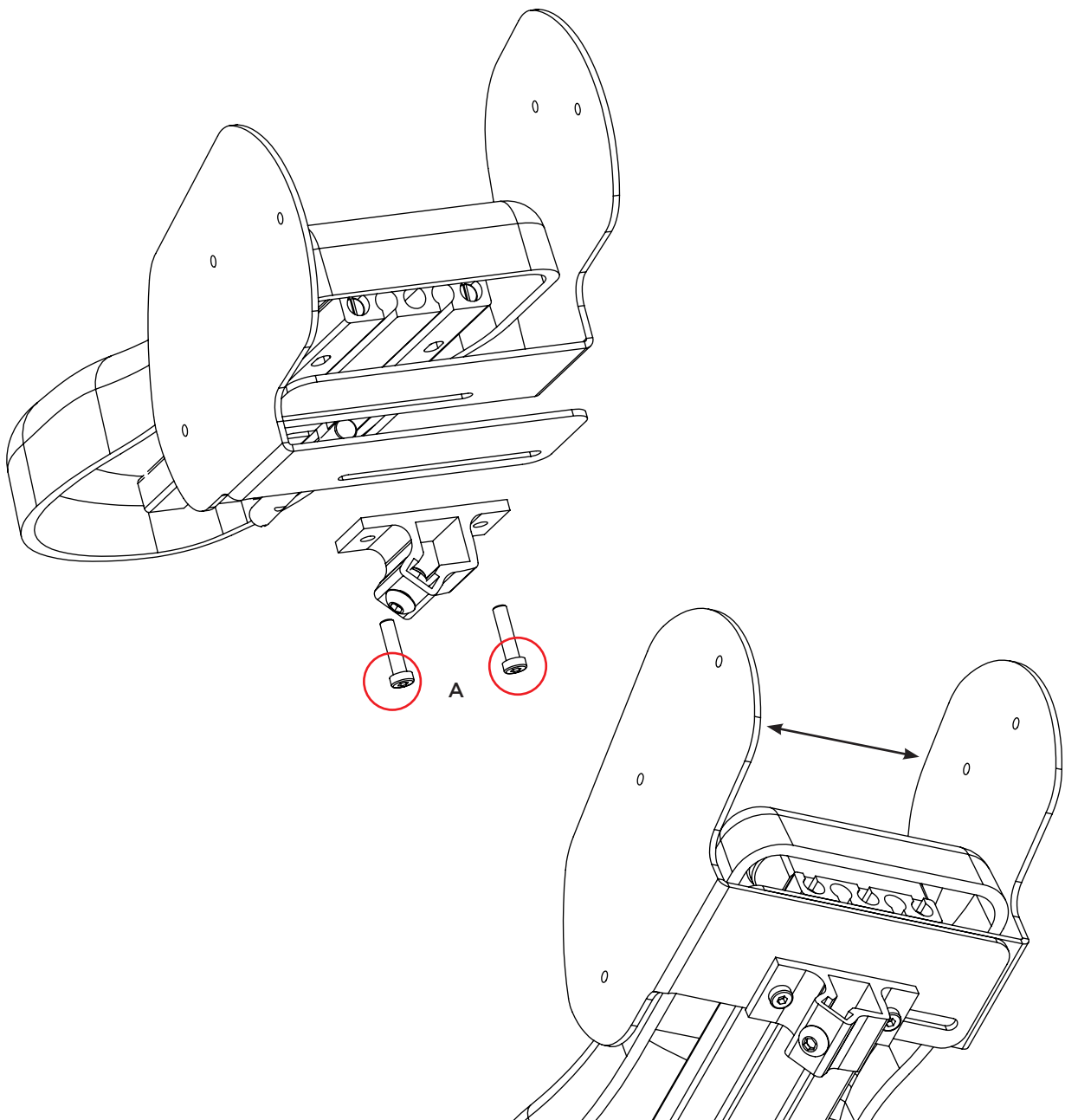


Hoftebælte

Montering:

Montera fästbanden i respektive ögla.

Justering:

- * Drag åt bältet på båda sidor om spännet för att få det centrerat.
- * Justera bälteskuddarna för att ge optimal tryckavlastning.
- * Om banden är för långa, klipp av överflödigt band och bränn änden.

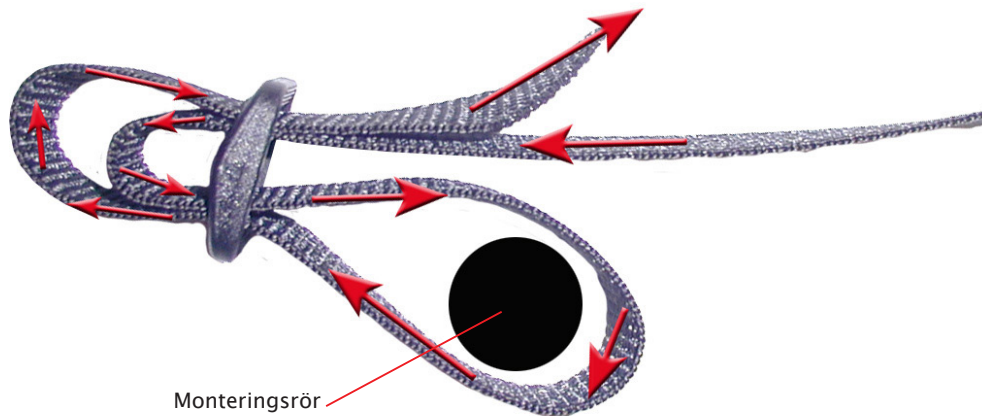


Ryg

För att justera ryggpelaren (A), lätta på de fyra skruvarna (B) som fäster pelaren på rygprofilen. Justera pelaren till önskad höjd och dra åt skruvarna (B).


Grovjustera höjd för bålbeslag genom att lätta på de fyra skruvarna (C) som fäster beslaget på rygprofilen. Justera till önskad höjd och dra åt skruvarna (C).

Bålstötteen kan nu finjusteras genom att lätta på spakvreden (D). Justera bålstötteen till önskad position och dra åt vreden (D).

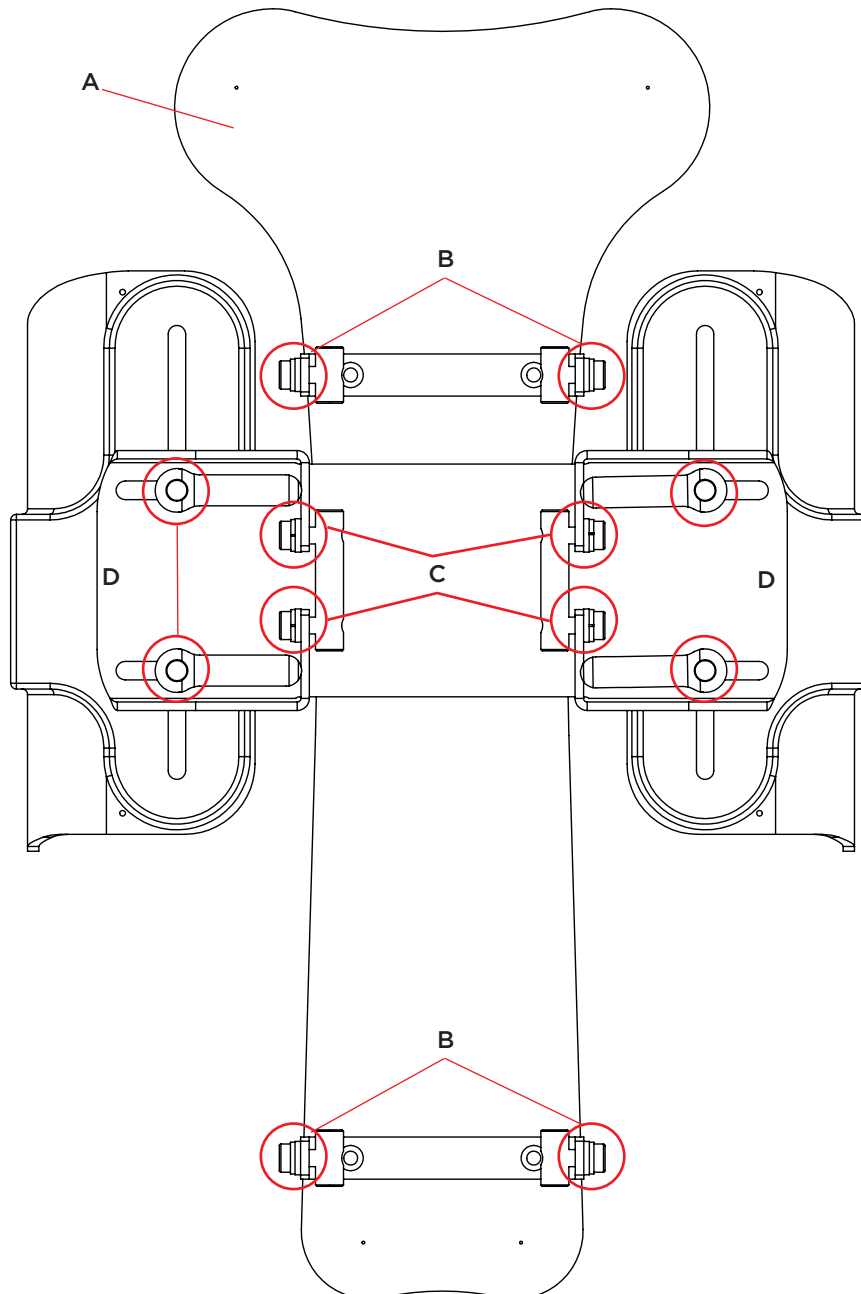


Hoftevinkel

När hoftevinkel ska justeras: börja med att lätta på säkerhetsvredet (A). Se till att ha ett stabilt grepp om körbågen samtidigt som utlösaren för gaskolven (B) trycks in. Justera ryggen till önskad vinkel och släpp utlösaren (B). Avsluta med att dra åt säkerhetsvredet (A).

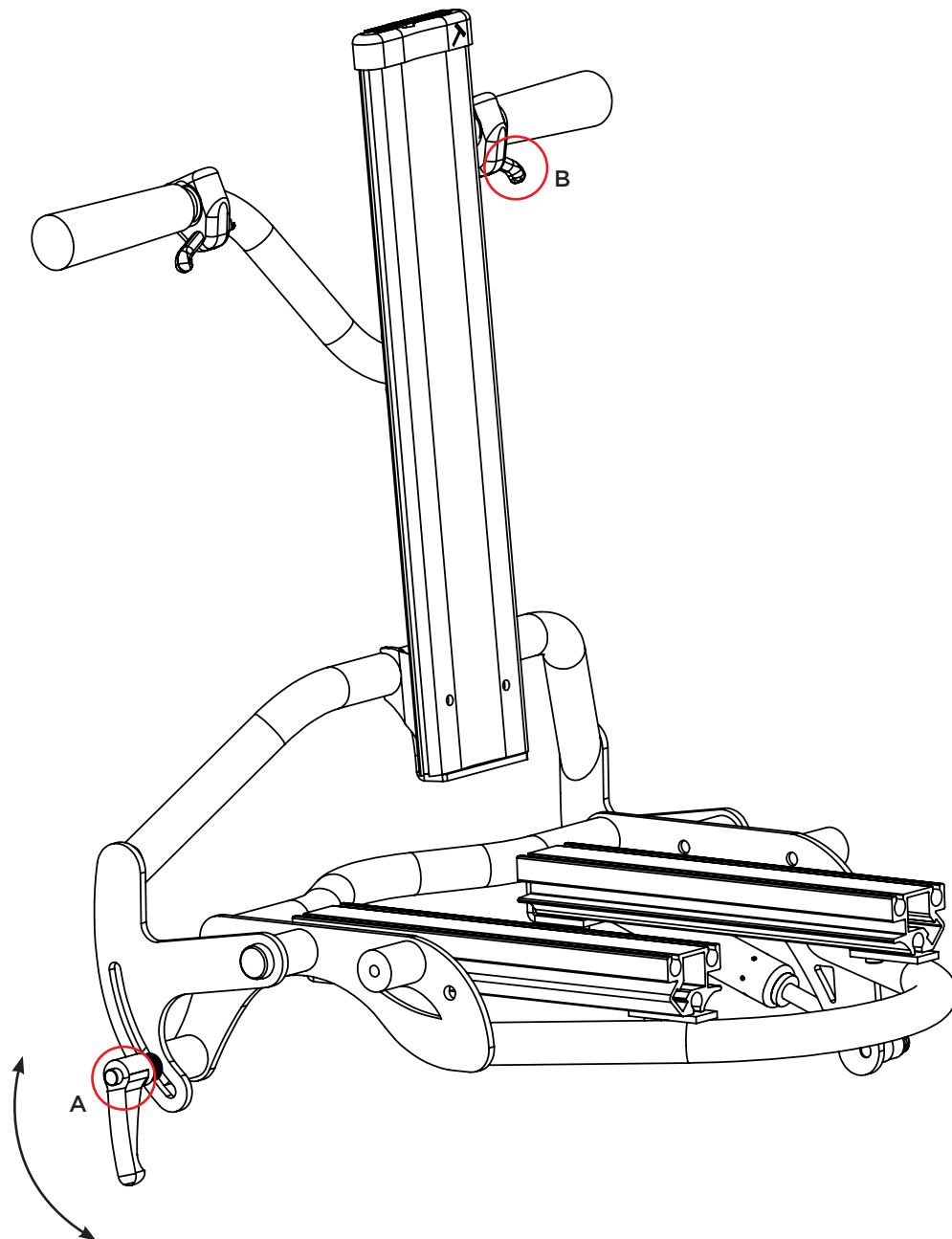


Tilt av sædeenhet

När sitsvinkel ska justeras, se till att ha ett stabilt grepp om körbågen samtidigt som utlösaren för gaskolven (A) trycks in. Justera sits till önskad vinkel och släpp utlösaren (A). Ha uppsikt över patienten och se till att inget riskerar att klämmas eller på annat sätt ta skada.

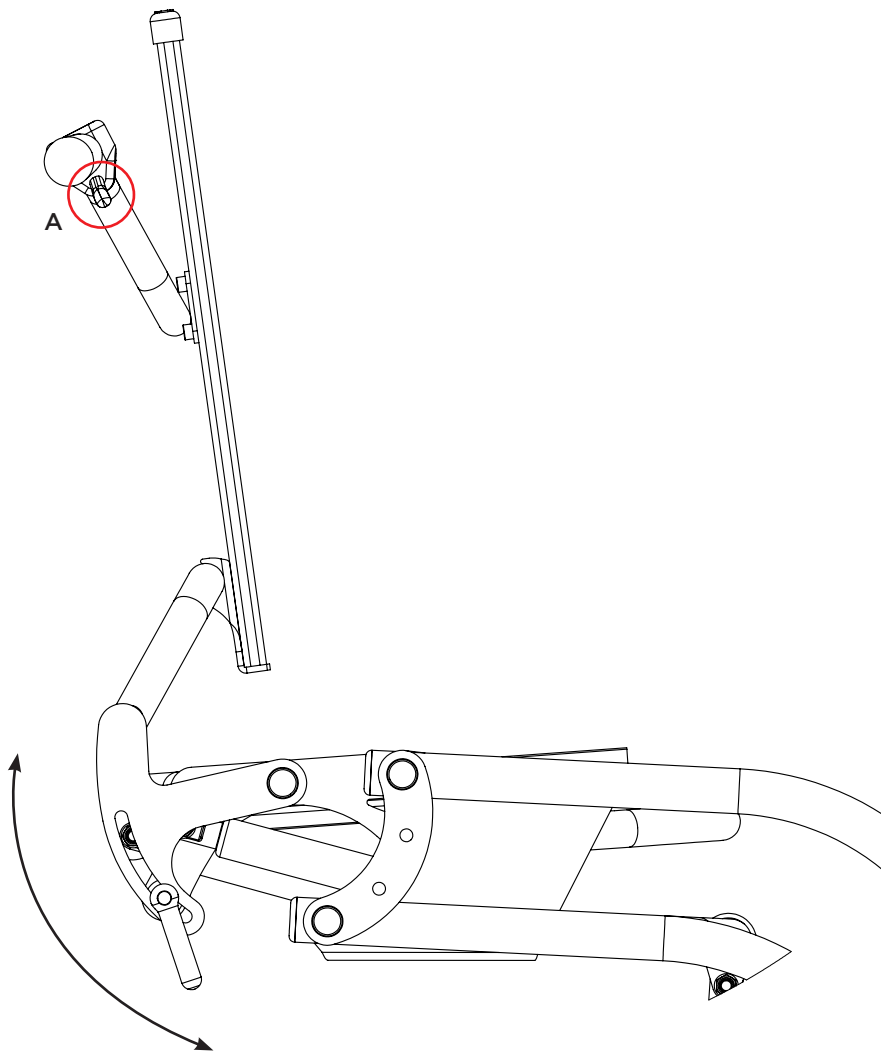

Hoftestøtte

Hoftestøtteeet monteras in i nederkant av ryggprofilen. För in sargsprint (A) och skjut upp hoftestøtteeet till önskad höjd. Drag åt skruvarna (B). Justera vinkelbeslaget till önskad position i sidled. Drag åt vred (C). Justera hoftebeslag till önskat djup, drag åt vred (D).

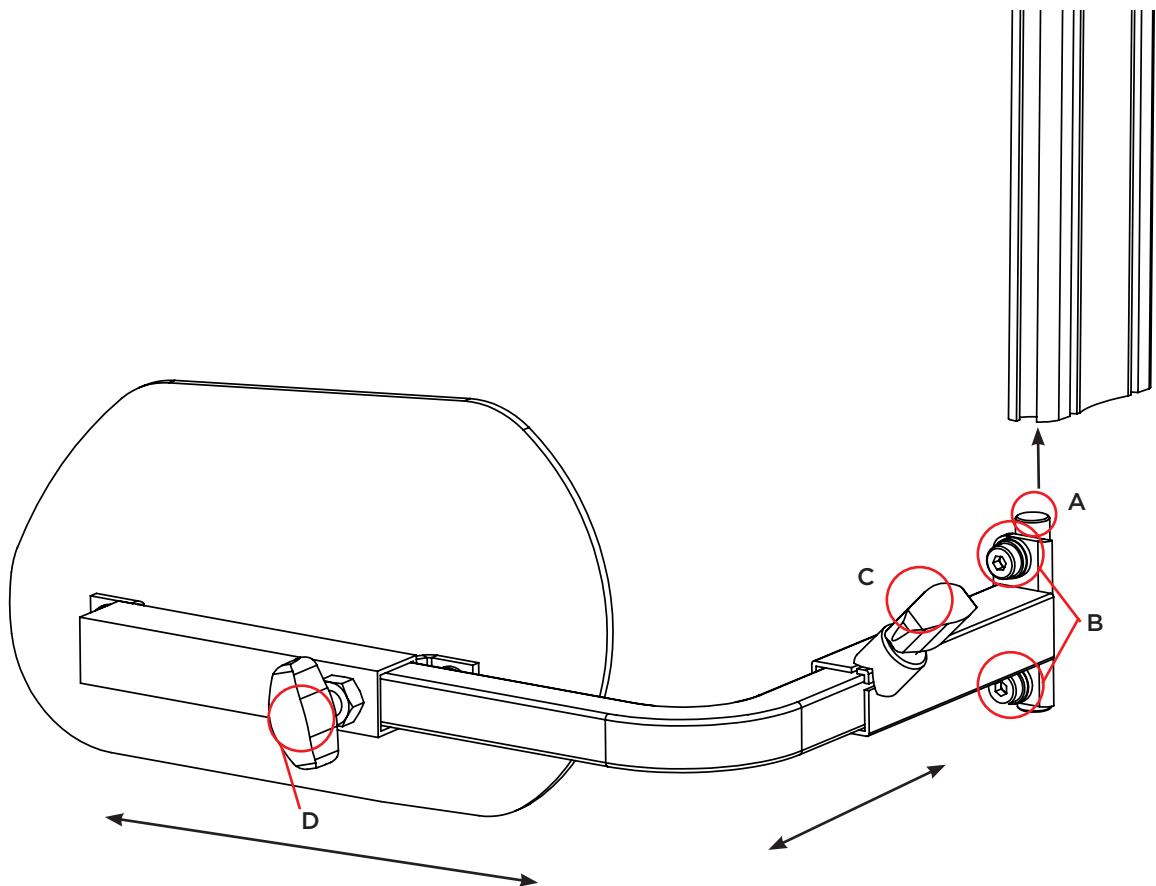

Armstøtte

Montering, armstøtte


Armstøtten ska monteras på ryggstaget. Montera armstøttesfästet enl. bild. Justera till önskad höjd. Dra sedan åt skruvarna (A)

Justering av armstøttesbredd

Lösa fingervredet (B). Justera till önskad bredd. Dra sedan åt fingervredet.

Djupjustering, armstøtte

Lösa fingervredet (C). Justera till önskad position. Dra sedan åt fingervredet.

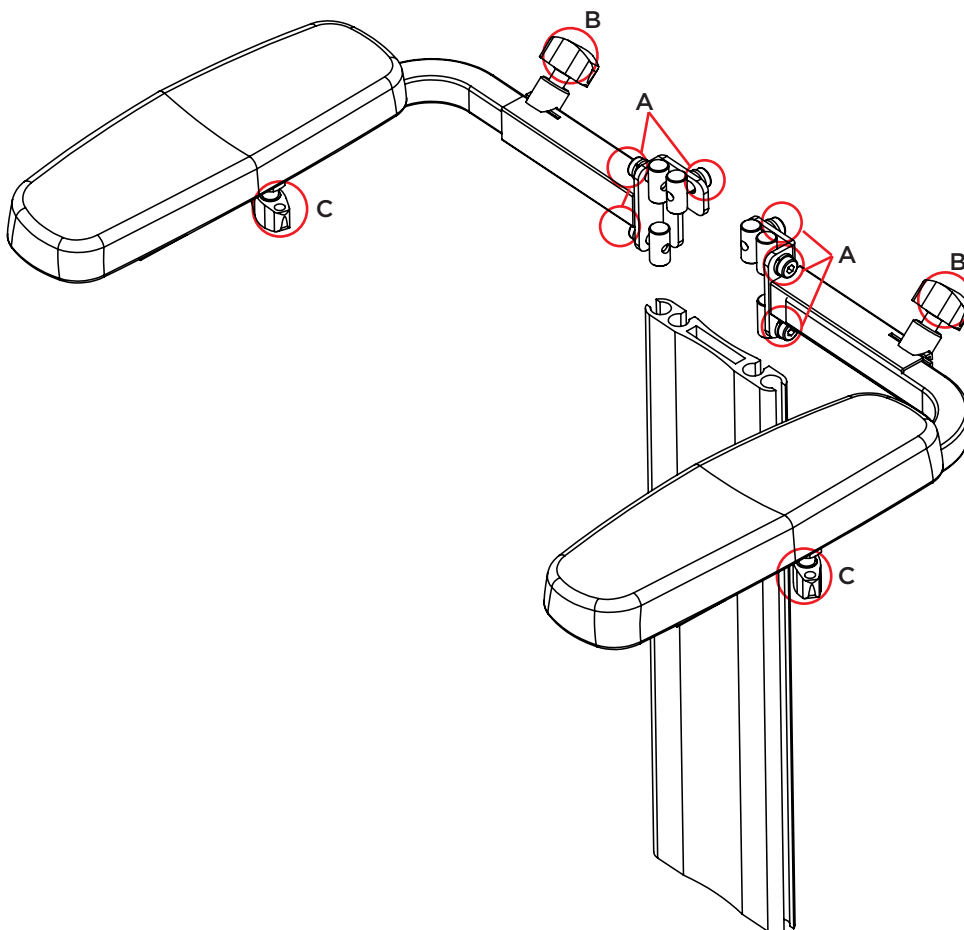


Armstøtte, stel

Montering, armstøtte på stel

Armstøtteen ska monteras på sidoblecket (A). Montera skruvarna (B) genom de centrala hålen på blecket och in i de gängade hålen på armstøtteen.



Fällning av armstøtte

Dra armstøtteen snett uppåt och bakåt. Vrid sedan støtteen bort från stelt tills støtteen hakar i nästa fålla.

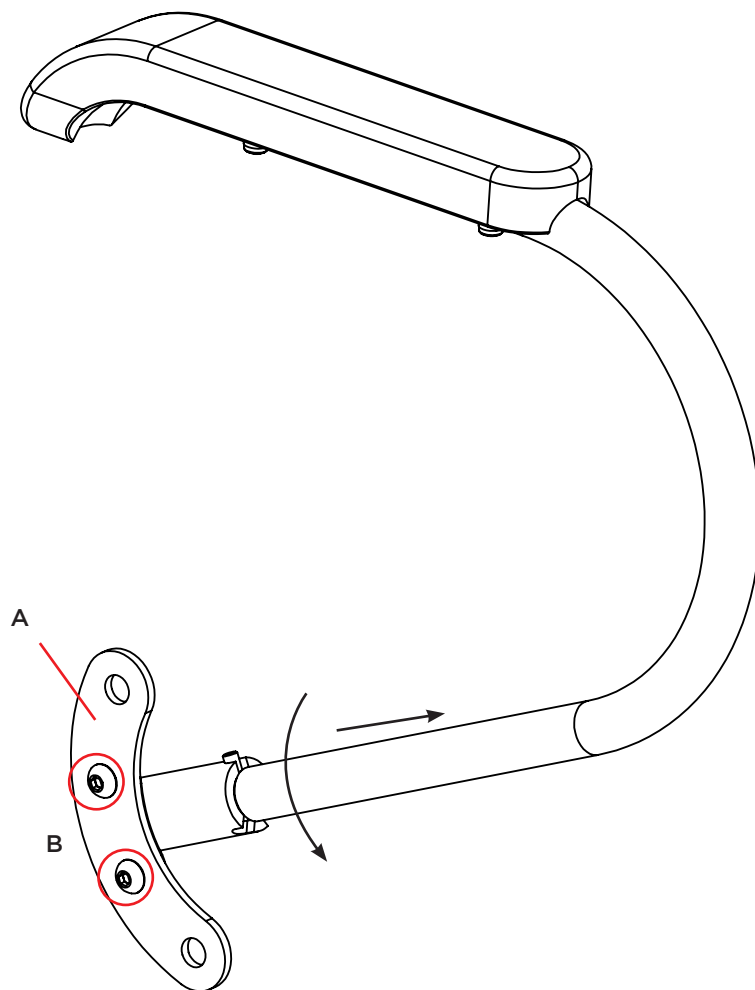

Körbåge

Lossa skruvar (A) tillräckligt för att kunna trä in sargsprintarna (B) i profilen (C). Justera till önskad höjd och dra sedan åt skruvarna (A).

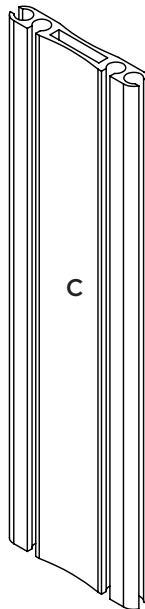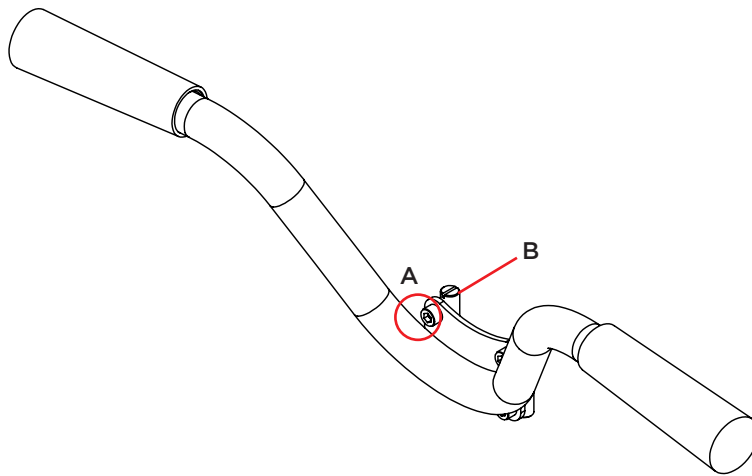



Hovedstøtte

Montering / justering av hovedstøtte

- * Ta bort skyddskåpan på ryggstaget.
- * Monter hovedstøttesfästet (B) på ryggstaget.
- * Lossa skruvarna (A) lagom mycket för att det ska gå att justera med handen.
- * Sätt brukaren i sitsen och justera till önskad position.
- * Drag åt samtliga skruvar samt fingervreden och sätt tillbaka skyddskåpan.

Hovedstøtteeet är enkelt att ta bort:

- * Lossa fingervredet (C) för att ta bort hovedstøtteeet.

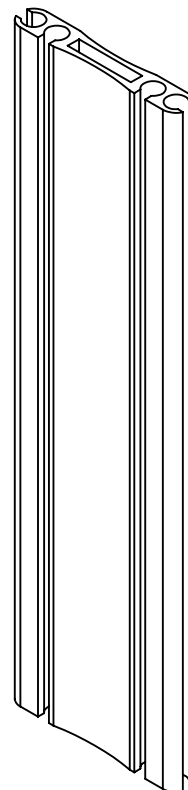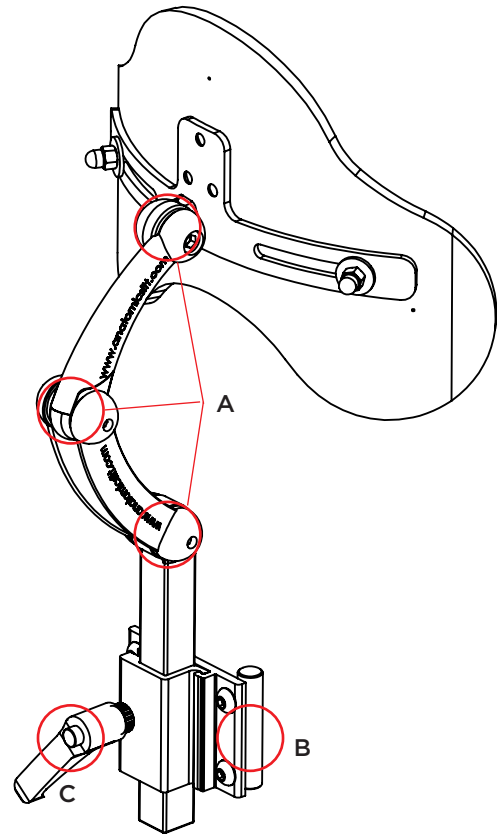


Supportbeslag

Montering / Justering av selar (Sternumstøtte, H-sele)

Montering:



Övre fäste: (Bild 1)

- * Ta bort skyddskåpan på ryggstaget.
- * Montera övre fäststag enl. bild 1.
- * Öppna spännet (A), trä in fästbanden genom hålet i beslaget och genom spännet och lås spännet.

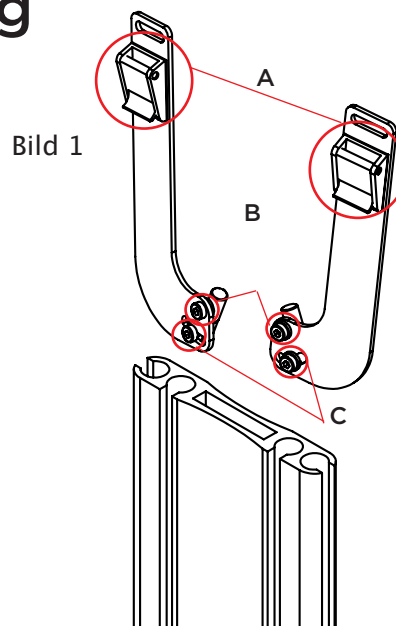

Nedre fäste till H-sele, Sternumstøtte: (Bild 2)

Nedre fästet kommer förmonterat och ingår i stolen.
Lås bandet med hjälp av "Tri-glide" spännet enl. bild 3.

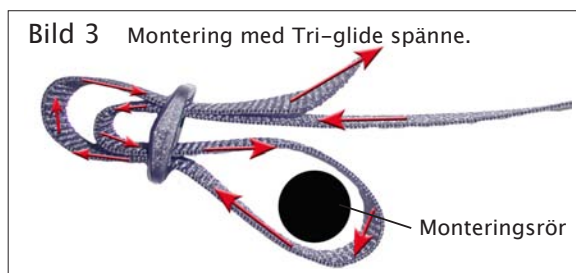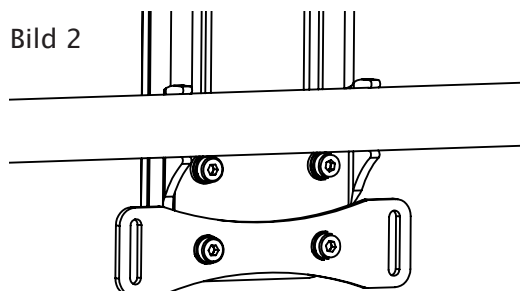

Justering:

Sätt brukaren i sitsen och lossa insexskruven enl. pos. B & C, bild 1.

Justera armarna så att dragriktningen för de övre fästpunkterna hamnar i samma höjd som axelpartiet.

* Skruva dit skruven enl. pos. B, bild 1.

* Justera till önskad bredd genom att vinkla staget till höger eller vänster. (Se till att det finns tillräckligt med utrymme för halsen.)

* Lås skruven enl. pos. C, bild 1.

* Justera bälteskuddarna i höjdlid för att ge optimal tryckavlastning.

Efterkontroll:

* se till att det finns tillräckligt utrymme för halsen.

* trycket på bandet.

* placeringen av bälteskuddarna.

Se till att det finns tillräckligt utrymme för halsen!


Fodstøtte

Montering av fodstøtte

- * Monter fodstøtteeet enl. bild.
- * Dra åt skruven (A).

Vinkeljustering vid knäled


- * Lossa spakvredet (B).
- * Justera till önskad vinkel.
- * Dra sedan åt spakvredet.

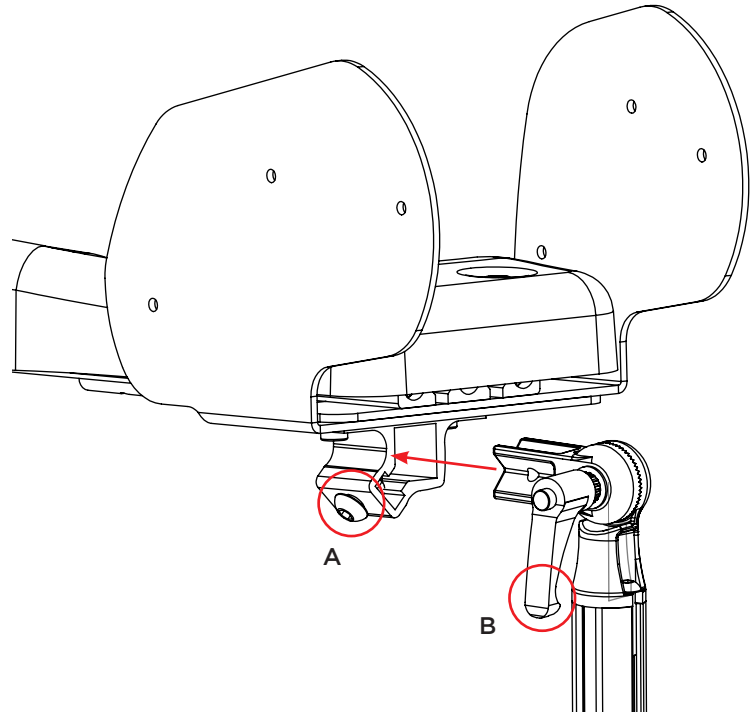

Fast fodstøttesbeslag

För att höjjustera fodstøtteeet lossar du spakvredet (A) något för att justera till önskad höjd. Dra sedan åt spakvredet.

För justering av vinkeln vid fotled lossa skruven (B) något. Justera till önskad vinkel och dra sedan åt skruven (B).

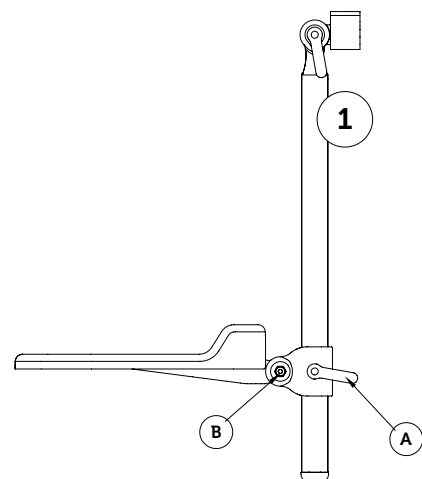


Fjädrande fodstøttesadapter

För att höjjustera fodstøtteet lossar du skruven (D) något för att sedan justera till önskad höjd. Dra åt skruven (D).

För justering av vinkeln vid fotled lossa skruven (C) något. Justera till önskad vinkel och dra sedan åt skruven (C).

Tips!

Fjädringens motstånd kan justeras med en spårmejsel genom att skruva på skruven i fjäderpaketet (E).

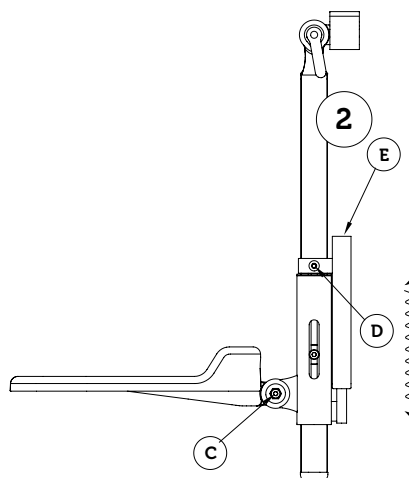


Uppfällbart fodstøttesbeslag

För att höjjustera fodstøtteet lossar du spakvredet (A) något för att justera till önskad höjd. Dra sedan åt spakvredet.

För att använda den uppfällbara funktionen, lyft fodstøttesplattan i framkant.

För justering av vinkeln vid fotled lossa skruven (B) något. Justera till önskad vinkel och dra sedan åt skruven (B).

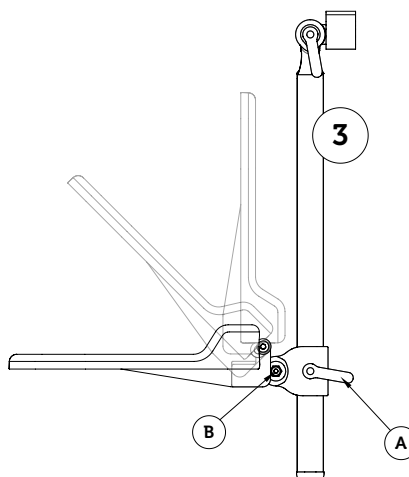


Kulleadapter

För att höjjustera fodstøtteet lossa spakvredet (A) något och justera till önskad höjd. Dra sedan åt spakvredet.

För att använda kullefunktionen lossa först skruvarna (B) och (C) och justera till önskad position. Dra sedan åt skruvarna (B) och säkerhetslås positionen med skruven (C).

För justering av fotplatta i djupled lossa skruvarna (D) något. Justera till önskad position och dra sedan åt skruvarna (D).

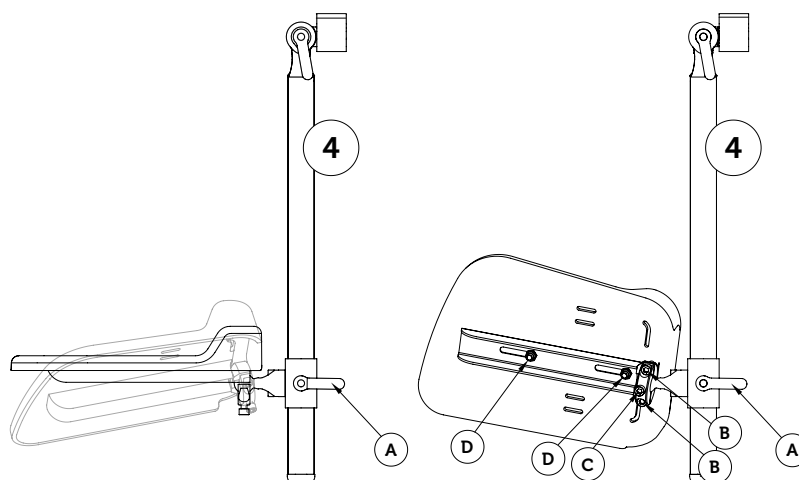

Lægstøtte

Montering

Innan montering av lægstøtte kan utföras måste du först ta bort eventuella fodstøtte. Lossa på spakvredet (F) som håller fodstøtteeet på plats på fodstøttesstaget. Dra sedan fodstøttesplattan och dess beslag nedåt.


Montera lægstøtteeet genom att skjuta i sargsprinten (C) i fodstøttesstaget, justera till önskad höjd och dra åt skruvarna (E). Montera därefter tillbaka fodstøtteeet.

Höjjustering

För att höjjustera lægstøtteeet lossar du skruvarna (E) något för att sedan justera till önskad höjd. Dra sedan åt skruvarna (E).

Breddjustering


För att breddjustera lægstøtteeet lossar du skruvarna (A) något för att sedan justera till önskad bredd. Dra sedan åt skruvarna (A).

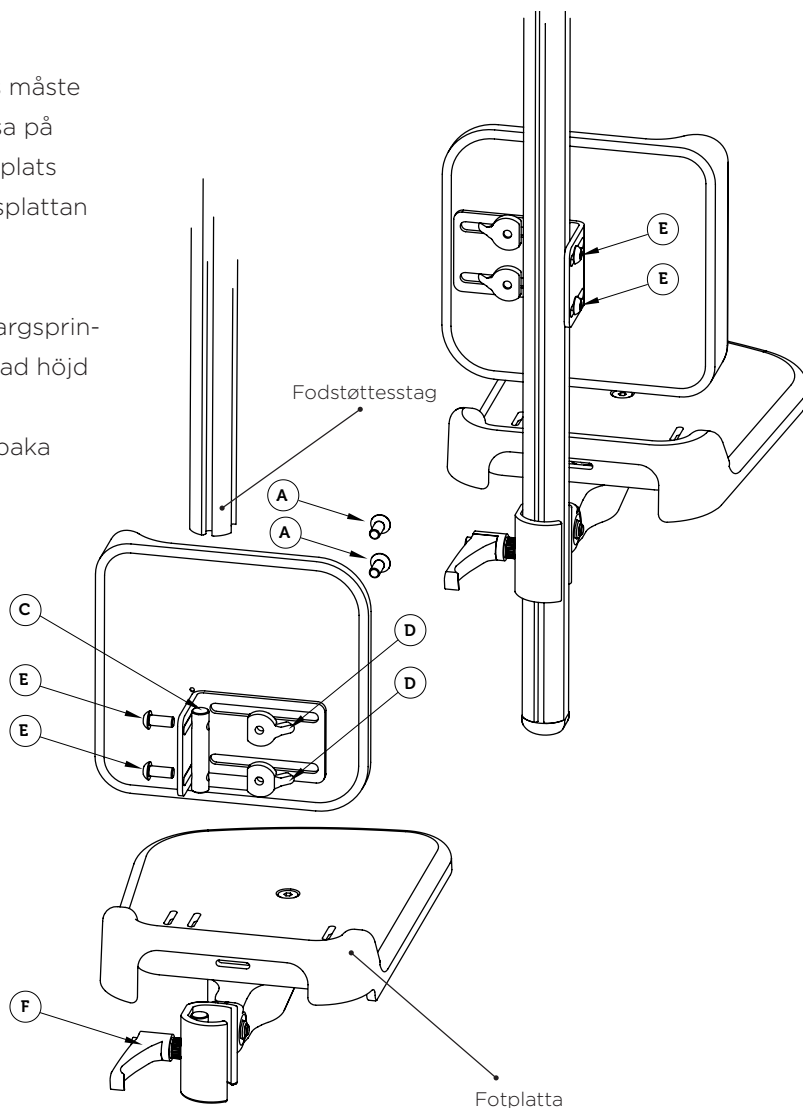

Potte


Montering

Montera potten genom att skjuta in dess kanter i spåren (A) baktill på vaggan.
Skjut potten tills den tar emot röret i framkant.

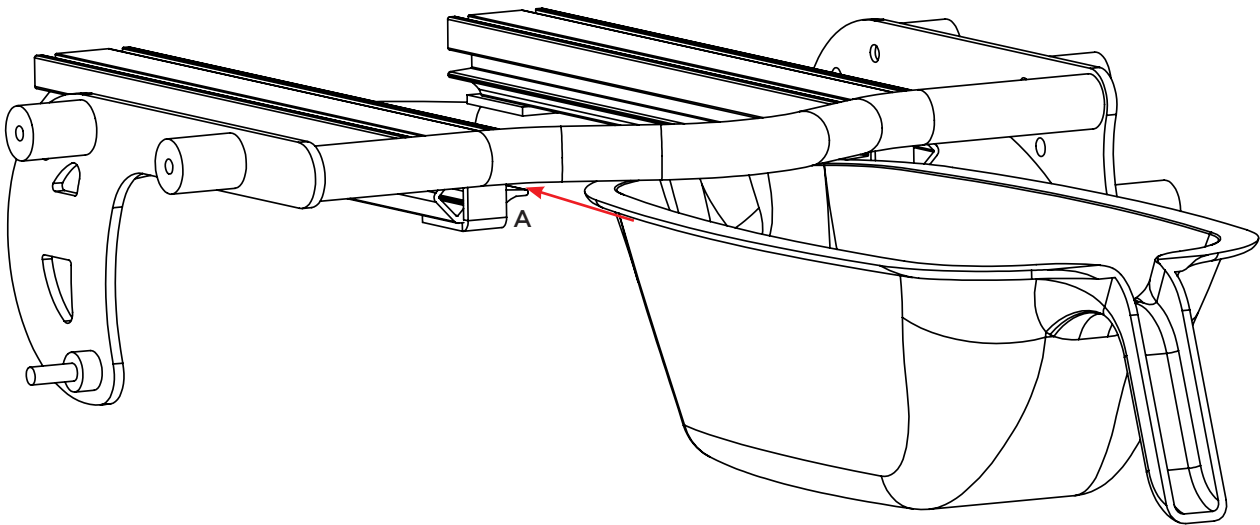

Kisskydd

Montera kisskyddet genom att kila ner det mellan bendelarna. Måtta av höjd på kisskyddet så att det passar patienten. Om potte används; kapa överflödigt material nedtill på skyddet så att nederkant vilar mot pottens botten.

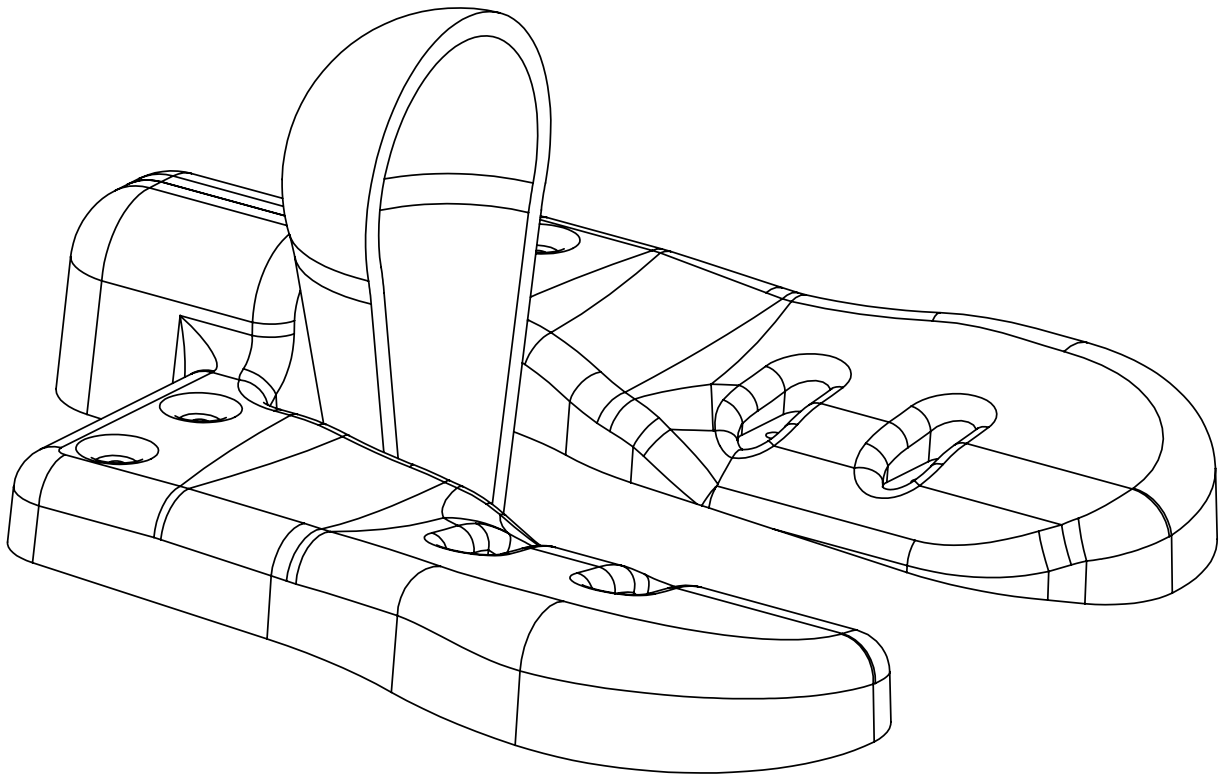

Underhåll och skötselanvisningar

Serviceintervall

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt och säkert bör regelbunden service och kontroll utföras. Behovet av service skiftar och måste bedömas från fall till fall, helt beroende på användning och slitage. Kontrollera alla rörliga delar och fästdetaljer med avseende på slitage. Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt och av kvalificerad personal. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att kontakta Anatomic SITT AB.

Rengöring och tvätt

Plast- och metalldelar kan torkas av med en fuktig trasa, alternativt tvättas med antibakteriell vätska eller liknande. Tänk grönt, tänk på miljön! Använd gärna biologiskt nedbrytbart tvättmedel.

Bälteskuddar tvättas i 60° fintvätt och får ej torktumlas eller torkas i torkskåp.

Samma tvättregler gäller för positioneringsselar och hoftebälten från Anatomic SITT AB.

Efter bad/dusch, lossa på sitt- och ryggfoder så att de kan torka.

Kontrollera hjälpmedlets skick regelbundet och utför underhåll vid behov.

Gaskolven måste aktiveras regelbundet

Gaskolven bör användas regelbundet för att bibehålla sin funktion. Då produkten inte används måste gaskolven aktiveras minst en gång var 6:e månad. Dessutom bör de lagras på så sätt att kolvstången är riktad nedåt. Annars kan gaskolvens tätning gå sönder och gaskolven sluta fungera.

Verktyg

Verktyget (4 mm insexnyckel) du behöver för att utföra justeringar finns integrerad i toppen av ryggprofilen.

Garanti

1 år mot fabrikationsfel.

Kombinationer

Zitzi Starfish Pro är en CE-märkt produkt som kan kombineras med samtliga tillbehör som beskrivs i denna bruksanvisning. För övriga kombinationer vänligen kontakta Anatomic SITT AB.

Reserve dele

För att Zitzi Starfish Pro ska behålla sin CE-märkning får hjälpmedlet endast förses med reserve dele levererade av Anatomic SITT AB.

Rekonditionering

Rekonditionering av hjälpmedlet får endast ske med originaldelar från Anatomic SITT AB.



Obs!

Kontrollera alltid att hjälpmedlet inte är specialanpassat vid rekonditionering, innan det skickas till ny brukare.

Märkning

Zitzi Starfish Pro med dess tillbehör är en CE-märkt produkt.

Ett unikt serienummer är placerat på det bakre mellanröret.

Detta serienummer ska anges vid all korrespondens gällande produkten.

Återvinning

En förbrukad del eller produkt demonteras och skrotas. Delarna ska sedan separeras efter materialtyp, metall (ram, mellanrör, stag, sitt-/rygggram, körbåge m.m), plast (sitt-/ryggdel, bord, potte m.m) och brännbart (polstring, bälten, selar m.m). Gaskolv sorteras som farligt avfall.

Sammanfattning och efterkontroll

Efterkontroll

Fortsätt kontinuerligt att utföra efterkontrollerna som anges under respektive punkt. Du bör kontrollera nedanstående punkter varje gång brukaren ska använda hjälpmedlet.

- Kontrollera regelbundet att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera regelbundet slitage på band och tryckavlastande bälteskuddar.
- Kontrollera att balansering på underredet är korrekt.
- Kontrollera inställningar på tillbehör så att brukaren har en korrekt sittposition.
- Vinkla ej sitsen för långt framåt när brukaren sitter i sitsen.

Anpassning och specialanpassning

Rekommendationer

Varje gång Zitzi Starfish Pro ändras på något sätt måste bedömning göras om det är en anpassning eller en specialanpassning.

En anpassning är en ändring som görs inom ramarna för produktens CE-märke. Allt annat är specialanpassning. Anpassningar får endast göras av den som bedöms kvalificerad för uppgiften och ska alltid utföras på ett yrkesmässigt sätt. Att produkten är CE-märkt innebär att den uppfyller alla relevanta europeiska säkerhetskrav.

Notera att en riskbedömning alltid bör göras, såväl vid anpassning som vid specialanpassning, av ett hjälpmedel. Produkten får aldrig bli farlig för brukaren att använda efter anpassning.

Produkten bör förses med upplysning att den är anpassad till en specifik brukare, så att den inte kan misstas för en produkt i standardutförande.

Anpassningar som får göras på Zitzi Starfish Pro

Kapa fodstøttesprofiler

Fodstøttesprofilens längd får kortas ned för att bättre passa brukaren.

Kapa armstøttesprofiler

Armstøttesprofilens längd får kortas ned, för att bättre passa brukaren.

Kapa ryggstøttesprofil

Ryggstøttesprofilens längd får kortas ned. Profilen får aldrig vara kortare än att samtliga fästen till ryggplattan går att montera på denna.

Kapa urinskyddet

Urinskyddet får kapas till önskad längd.

Försäljningsvillkor

Garanti

Garanti gäller ett (1) år mot fabriktionsfel fr.o.m. leveransdatum. Garanti utgår inte för yttre påverkan eller onormal hantering. För garantibehandling krävs felaktig vara i retur. Bifoga alltid följesedel.

Reklamation

Beskriv felet samt orsak så ingående som möjligt. Åberopa garantireparation eller eventuellt garantiutbyte. Bifoga en kopia på fakturan och ange att produkten skall tillbaka till dig efter reparation. Ange leveransadress, kontaktperson samt telefonnummer. Blankett för reklamation finns att hämta på vår hemsida.

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Returer

Felbeställda eller fellevererade varor skall returneras inom 20 dagar från leveransdatum. Bifoga alltid en kopia på både följesedel och faktura. Ange orsak till retur av dina varor. Returblankett finns på vår hemsida.

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under transporten.

Vid retur senare än 20 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 80 % av fakturavärde (vid nyskick)

Vid retur senare än 60 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 60 % av fakturavärde (vid nyskick)

Vid retur senare än 150 dagar från leveransdatum

Görs ett returavdrag på 40 % av fakturavärde (vid nyskick)

Senare än 360 dagar från leveransdatum


Varorna återtages ej

⚠ Specialanpassade produkter återtages ej

Tekniska data

TEKNISK DATA ZITZI STARFISH PRO


Zitzi Starfish Pro	stl. 1	stl. 2
Totalbredd, inkl. hjul:	54 cm	58 cm
Toalettoppning bredd:	7 cm	8 cm
Toalettoppning längd:	16 cm	19,5 cm
Tilt, säddedel:	-5-30°	
Hofte-/ryggvinkel:	-10-25°	
Sitshöjd min / max:	50/60 cm (manuellt stel)	
Sitshöjd min / max:	50/76 cm (höj-/sänkbart stel)	
Hjul:	100 mm	
Brukarvikt, max:	150 kg	

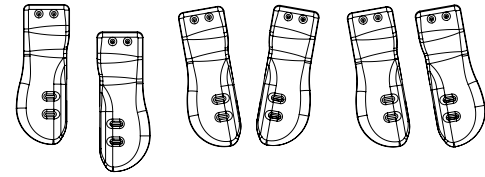

Säddedybde:

Stl. 1	285-365 mm
Stl. 2	355-455 mm
Stl. 3	425-525 mm

SäddedelAR

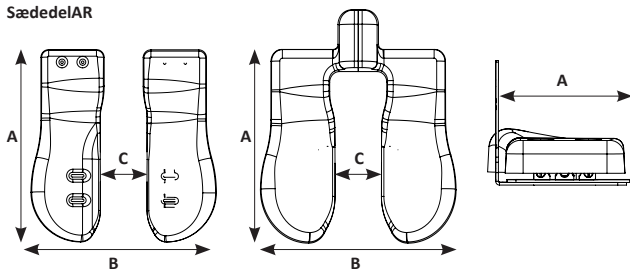


Delad	A	B	C
Stl. 1	350	350-400	50-100 mm
Stl. 2	430	390-440	50-100 mm
Stl. 3	500	440-490	65-115 mm

Hel	A	B	C
Stl. 1	350	375	75 mm
Stl. 2	430	425	80 mm
Stl. 3	500	490	115 mm

Samtliga mått är uppmätta med polstring.

ARMStøtte


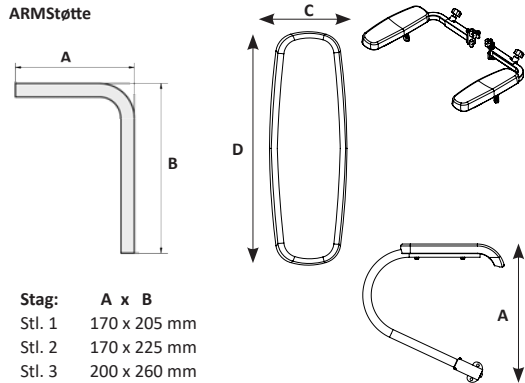


Stag:	A x B
Stl. 1	170 x 205 mm
Stl. 2	170 x 225 mm
Stl. 3	200 x 260 mm

Platta:	C x D
Stl. 1	75 x 230 mm
Stl. 2	75 x 330 mm


Stag:	A
Stl. 1	180 mm
Stl. 2	210 mm

Hovedstøtte

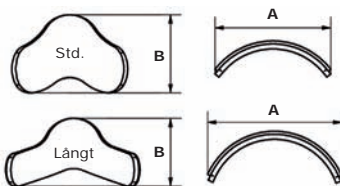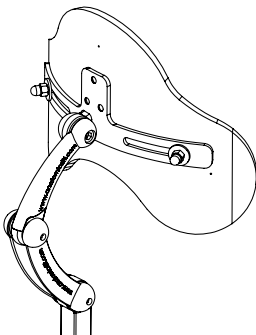


	A	B
Hovedstøtte stl. 1	220 x 150 mm	
Hovedstøtte stl. 1 lång	280 x 160 mm	
Hovedstøtte stl. 2	240 x 190 mm	
Hovedstøtte stl. 2 lång	280 x 210 mm	

Fodstøtte

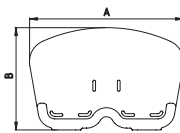


	A x B
Helt stl. 1	345 x 225 mm
Helt stl. 2	380 x 260 mm
Helt stl. 3	380 x 310 mm

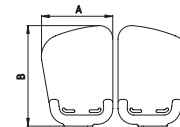

	A x B
Delat stl. 1	160 x 220 mm
Delat stl. 2	180 x 255 mm
Delat stl. 3	180 x 305 mm


JUSTERBAR RYGG

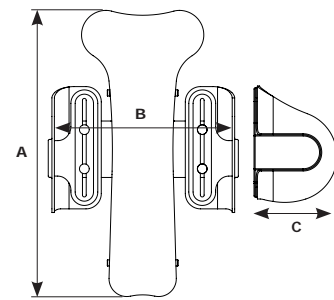

	A	B	C
Rygg stl. 1	450	210-290	140 mm
Rygg stl. 2	550	240-330	170 mm
Rygg stl. 3	650	300-390	200 mm

Samtliga mått är uppmätta med polstring.

BORD

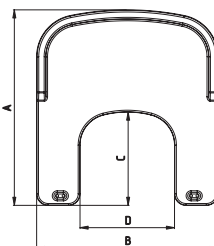

	A	B	C	D
Bord stl. 1	480 x 450 mm	240 x 250 mm		
Bord stl. 2	540 x 515 mm	260 x 290 mm		
Bord stl. 3	570 x 570 mm	280 x 340 mm		
Bord stl. 4	670 x 600 mm	320 x 390 mm		

Välj bord efter bälbredd!

Bord	Bälbredd
Stl. 1	< 21 cm
Stl. 2	< 25 cm
Stl. 3	< 30 cm
Stl. 4	< 34,5 cm

SE**Anatomic SITT AB (tillverkare)**

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Support +46 11 16 18 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden

DK**Anatomic SITT A/S**

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark

Tel +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

FI**Rehaco OY**

Haaransuontie 6 A7, 90240 Oulu, Finland

Tel: +35 840 775 22 88

NL**Anatomic SITT Nederland BV**

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands

Tel +31 344 63 45 40

Fax +31 344 62 33 61

World wideanatomicsitt.coma-sitt@anatomicsitt.dkfacebook.com/anatomicsittyoutube.com/anatomicsitt