



Denne brugsanvisning beskriver anvendelse af Vilhelm Hertz krykken SPLIT; krykken må kun anvendes, som beskrevet i denne brugsanvisning.

Anvendes som støtte for gangbesværede personer, med normal førlighed i arme og af personer med vægt op til 130 kg.

Vilhelm Hertz krykken "Split" er person tilpasset.

Sikkerhed:

Vilhelm Hertz krykken Split er person tilpasset og kan ikke umiddelbart anvendes af andre.

Vær opmærksom på glatte overflader, som is-, glas-, glaseret keramik overflader og tilsvarende. Tilpas bevægelse og hastighed, således den sikre støtte af krykken fastholdes.

Overbelastning af krykken (Se designet personvægt), må ikke ske og krykken må kun anvendes som støtte stående og under gang.

Anvendelse.

Vilhelm Hertz krykken Split er en albue stok forsynet med håndtag og albuestøtte, der tilsammen sikrer, god kontakt til armen og en sikker manøvre af krykken.

Vilhelm Hertz krykken Split kan anvendes som enkelt krykke eller som dobbelt krykke.

Vedligehold..

Armstøtten er fremstillet af kernelæder og stokkepinden af formstøbt egetræ. Læderdelen vedligeholdes med læderfedt og stokkepinden med linolie, brug en klud til påsmøring. En jævnlig behandling både renser, og vedligeholder krykken.

Gummi dupsko skal efterses jævnligt for slid og denne skal udskiftes, inden den er slidt igennem til stokkepinden. Kontroller mindst hvert halve år krykken for slid og brud. Da krykken delvist er fremstillet af egetræ, som arbejder afhængigt af luftens fugtighed, kan der opstå en situation hvor skruerne skal efterspændes. Messing skruer på aluminium delen kan forsigtigt efterspændes hvis de bliver løse. Rustfri skrue i egetræs samlingen kan ligeledes efterspændes.

Overensstemmelseserklæring.

Vilhelm Hertz krykken erklærer, at Vilhelm Hertz krykken Split er fremstillet i overensstemmelse med Rådets direktiv for Medicinsk udstyr dir. 93/42 EF, samt ministeriet for Sundhed og forebyggelse, Bek. Nr. 1263 af 15/12/2008, som klasse I udstyr.