


# Easyloo®

## Before use / Før brug


---

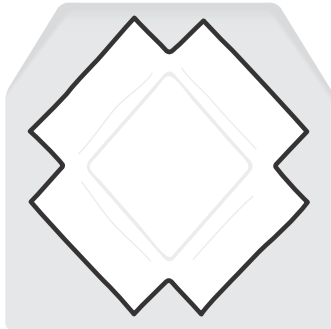

1.

Place the Easyloo onto the chair or seat.


Placer Easylooen i sædets hul.

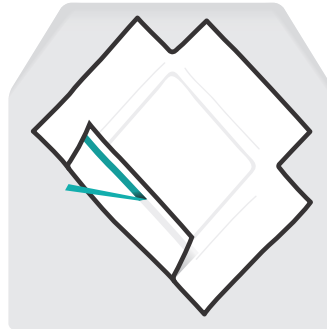

2.

Remove the blue adhesive one side at the time and fixate it.

Fjern de blå tapestrimler, en side ad gangen, og fikser til sædet.

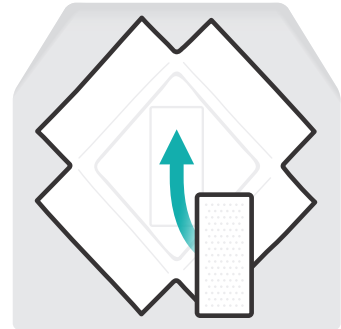


3.

Place the pad into the Easyloo bag.

Placer indlægget i bunden af posen.

## After use / Efter brug


---

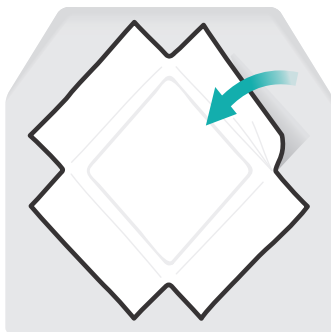

4.

Release the Easyloo from the chair or seat.

Frigør Easylooen fra sædet.

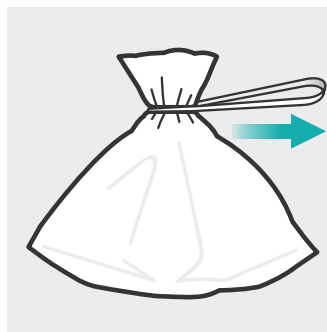

5.

Close the bag using the integrated strings.

Træk snøren til så den er helt tæt.