


Ankelbespænding

da

(FOD-OG ANKELBESPÆNDING) INSTALLATIONS- OG BRUGERSVEJLEDNING

ART NOS. FT210 & FT220

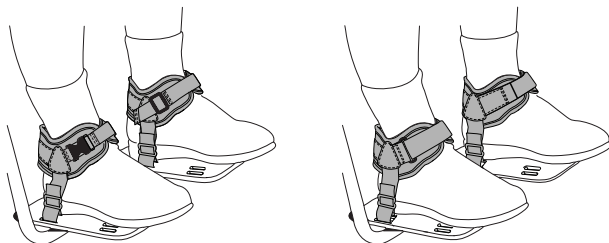

Denne vejledning indeholder vigtige informationer om sikker brug og vedligeholdelse af ankelbespænding (fod- og ankelbespændinger). Giv denne vejledning til brugeren eller til dennes plejepersonale og gennemgå den nøje for at sikre at den er forstået.

⚠ ADVARSEL! Produktet skal påsættes og tilspændes af en person der er kvalificeret inden for genoptræning.

FØR IGANGSÆTNING: Ankle Huggers (Fod- og ankelbespændingen) bør kun benyttes af personer, der har et hoftebælte på som sidder korrekt. Selvom Ankle Huggers kan monteres på enhver art af fodstøtte, bør man bestemme brugerens positioneringsbehov, inden man installerer dem på fodplader der kan vippe. Ankle Huggers bør monteres så at man har dem ovenpå hverdagsfodtøj – kraftigt polstrede sko og ortopædiske anordninger kan genere, så at bespændingerne ikke sidder korrekt.

BRUG:

⚠ ADVARSEL! Dette produkt må kun anvendes til at fastholde en person i en kørestol. Det må IKKE anvendes som sikkerhedsudstyr under transport, som personligt fastholdelsesudstyr eller til noget andet formål, hvor det kan forårsage tilskadecomst, såfremt det svigter. Misbrug af dette produkt er hverken godkendt eller sikkert.

⚠ ADVARSEL! Som med hvilken som helst ny siddesupport, kan dette produkt ændre den måde en person sidder på. Brugere skal fortsætte med at foretage regelmæssige tryklindrende handlinger og kontrollere at deres hud er uskadt, ikke kun på det område hvor dette produkt har kontakt med brugeren, men også

på de primære trykbærende områder, så som sakrum (korsbenet), benene og balderne. Hvis der forekommer øget rødme eller irritation, så ophøres med brugen, og læge eller siddepecialist kontaktes. Undladelse af dette kan resultere i alvorlige skader, som f.eks. tryksår.

VEDLIGEHOLDELSE: Check regelmæssigt syningerene, remmene og polstringerne for tegn på slid. I tilfælde af betydeligt slid skal man kontakte sin forhandler ang. kvalificeret reparation eller udskiftning af Bodypoint. Af sundheds- og sikkerhedsgrunde må der under ingen omstændigheder foretages ændringer eller reparationer på dette produkt af ukvalificerede personer!

🧺🌞🧼🧺 RENGØRING: Maskinvask, varmt, 40°C (100°F). Må ikke bleges. Tørretumbles ved lav temperatur eller ved lufttørring. Må ikke stryges. (Ved at anbringe selen i en vaskepose under vask, forebygges slitage på selen og vaskemaskinen).

GARANTI: Der er begrænset livstidsgaranti på dette produkt mod fejl i fabrikation og på materialer, der måtte opstå under normal brug af den oprindelige forbruger. Kontakt Deres Bodypoint-forhandler i erstatningssager under garantien.


Hvis du vil vide mere om Bodypoints produkter, eller du ønsker en liste over distributører uden for USA, så gå ind på www.bodypoint.com

 Bodypoint®

 EC REP


MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

 CE

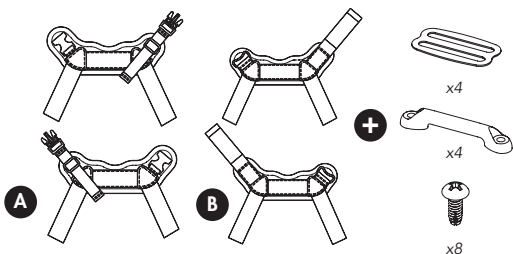


PAKKENS INDHOLD

- A** Frigørelse på siderne: Højre og venstre Ankle Huggers eller
- B** Velcrostykke: Højre og venstre Ankle Huggers Efterspændeligt påmonterings sæt

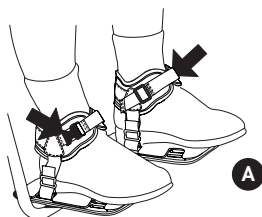


A

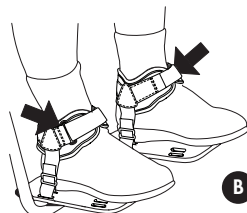

B


ORIENTERING

- A** Frigørelse på siderne: Bæltespænderne af hård plastic skal sidde på ydersiden.
- B** Velcrostykke: Stroppe af hård plastic skal sidde på ydersiden med justeringsspænderne siddende på indersiden.



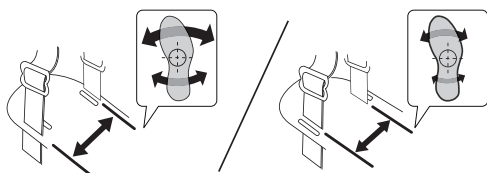


PLACERING

Spændernes placering muliggør forskellige grader af bevægelse.

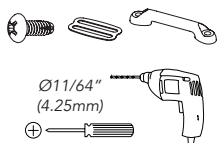

Ø11/64"
(4.25mm)

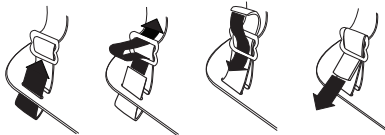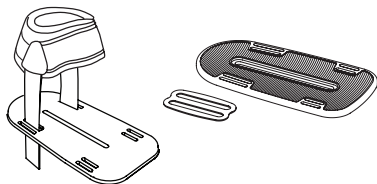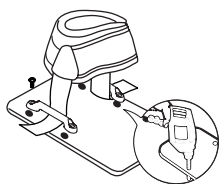


EFTERSPÆNDELIGT PÅMONTERINGS SÆT

- Nødvendigt Værktøj: El-boremaskine, Ø11/64 (4.25 mm) borehoved samt en nr. 2 Phillips skruetrækker
- Marker hvor tvingen skal monteres, bor huller og fastgør monteringsbeslag.
- Spænd selerne igennem beslagene som vist foruden.

BODYPOINT FODSTØTTE MED SLIDSER

- Kræver ikke noget værktøj
- Benyt sliderne på fodstøtten.
- Spænd selerne igennem beslagene som vist foruden.

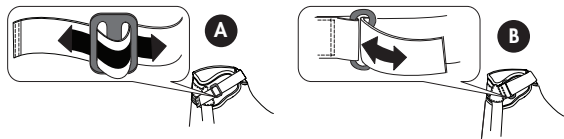

SIDSTE AFFPASNING Slut tvingen tæt omkring brugerens ankel.

POSITIONERING

for mere information omkring positionering med fod- og ankel bespænding, sørg for at få en kopi af brugervejledningen fra Bodypoint fra din forhandler eller download en kopi fra www.bodypoint.com.