

Letsip AS



DESIGNET OG UTVIKLET I NORGE

Informasjon:

Kontakt: Letsip AS post@letsip.no
telefon 480 09 500

Rengjøring og desinfeksjon av Letsip produktene.

Produktene bør vaskes før første gangs bruk. Letsip produktene kan gjenbrukes på sykehus, logopedkontor eller rehabiliteringssenter når prosedyrene for rengjøring følges fra leverandør av LifeClean. LifeClean er godkjent av Statens legemiddelverk i Norge

Letsip produktene kan vaskes/varmebehandles inntil 70 grader. All rengjøring og vask av plastmateriale med høy varme eller sprit vil over tid kunne redusere plastens form og styrke.

Advarsel:

Kontroller produktene før hver bruk. Ved første tegn på skade eller svakhet skal produktet kastes. Letsip produktene skal kun brukes under oppsikt av voksne - det er ikke leketøy. Det anbefales forsiktighet ved bruk på slimhinner i munnen og på utsatt irritert hud. Vibrasjoner på halsårer er ikke å anbefale.

Letsip® K-Serien: Kulen er stor og tung og må brukes med forsiktighet slik at den ikke skader tennene.

Letsip® V-Series: Ladd batteriet i minst 2 timer før første gangs bruk. Ved transport må håndtaket alltid oppbevares i en beskyttende boks/eske.

Mer om rengjøring og produktinformasjon på websiden:
www.letsip.no

