



CEKURA GO

- BRUGERVEJLEDNING

TILLYKKE MED DIN CEKURA GO

CEKURA GO er din mobile Tryghedsalarm til farten som du kan tage med dig overalt. *CEKURA GO* er udstyret med en stedsangiver, hvilket betyder, at vi kan se, hvor du befinder dig, hvis der sker dig noget. Det gør, at vi kan sende hjælpen hurtigt til lige dér, hvor du befinder dig.

Vi har her lavet en kort brugervejledning til dig, så du kan lære din *CEKURA GO* meget bedre at kende. Hvis du har nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi håber du bliver glad for din *CEKURA GO* og vores Tryghedsservice.

Med venlig hilsen
CEKURA Tryghedscenter

KOM GODT I GANG

1. OPSÆTNING

Din *CEKURA GO* er allerede klargjort før afsendelse fra Tryghedscentret, så det eneste du skal foretage dig, er at oplade den. Sæt den til opladning, gerne i en vindueskarm i ca. 4 timer (for mere information henvises til afsnit 4).

2. DIN FØRSTE ALARM

Når din *CEKURA GO* er fuldt opladet, er det tid til at teste den. For at foretage et alarmopkald skal du trykke en enkelt gang på den blå knap.

Proceduren for alarmforløbet:

1. Straks efter tryk på knappen vil du høre en bip-tone hvert sekund indtil kontakt med Tryghedscentret er opnået
2. Indenfor ca. 20-30 sekunder vil du være i direkte kontakt med Tryghedscentret
3. Tryghedscentret vil afslutte samtalen
4. Du kan nu aktivere din alarm igen

3. SÅDAN TOLKES LED - LYSENE

Øverst til højre på din CEKURA GO sidder to små LED - lys, som lyser og blinker med forskellige farver og som hver indikerer en bestemt tilstand:

Grøn LED (øverste LED)

Fast grønt lys: Enheden oplader

1 blink hvert 5. sekund: Enhed er i normal tilstand

Rød LED (øverste LED)

1 blink hvert 3. sekund: Enheden har lavt batteri

Orange LED (nederste LED)

1 blink hvert 3. sekund: GSM/3G fejl på simkort

Bemærk!

- Når enheden er under opladning, vil det røde LED ikke indikerer evt. lav batteri status.
- Når enheden aktiveres, mens den har GSM/3G fejl (orange LED blinker hvert 3. sekund), så vil den afgive 3 bip som advarsel om dette.
- Når din enhed har lav batteri status vil Tryghedscentret modtage besked om dette og straks kontakt dig for at minde dig om at oplade din enhed.



4. OPLADNING

Din CEKURA GO oplades ved at tilslutte den medfølgende strøm-forsyning til opladestationen (som anvist på billede til højre) og herefter placere enheden i fordybningen.

Det er vigtigt at ladekontakterne på både enheden og lade-stationen er i kontakt med hinanden for succesfuld opladning.

Du kan altid tjekke om din enhed oplader ved at tjekke se på det øverste LED lys, som skal lyse fast grønt når den oplader. Den typiske standby for batteriet er 48 timer, dog kan dette reduceres af mange og lange samtaler og dårlige GPS eller GSM forhold.



5. ISÆTTELSE AF HALSSNOREN



1. Skil bærestroppen fra halssnoeren ved at presse på sidetappene på plastik-stykket.




2. Før snoren igennem den brede åbning på bagsiden. Lad snoren komme ud af åbningen og før plastik-stykket gennem løkken. Bærestroppen er nu fastgjort.



3. Klik nu bærestroppen sammen med halssnoeren igen

ÆSKEN INDEHOLDER

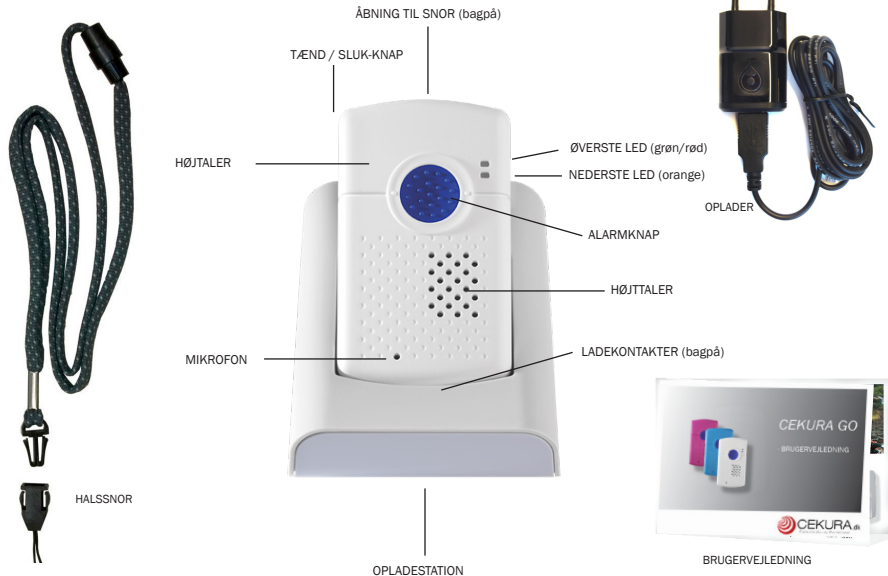



Som noget helt særligt er CEKURA GO udviklet til at virke både indenfor og udenfor hjemmet – ved brug indendørs anbefales det at gøre brug af en alarmsender, da denne er helt vandtæt og holder batteri i op til 5 år og som fortsat giver tryghed selv når CEKURA GO oplader.

Ring og hør nærmere på 32 31 60 50

