

Vejledning til Sugekop Stander

Trin #1: Fjern støttebenene fra din Transformer HD -

1. Placer din Transformer HD enhed på en vandret, stabil overflade med dens ben ud til hver side for at undgå at den vælter.
2. Tag fat om Transformer HD enheden lige under batteribeholderen med en hånd og placer din anden hånd så den fastholder benene på bordet, som vist herunder.
3. Forsigtigt skal du nu trække selve Transformer HD enheden væk fra støttebenene.



Montering af Sugekop Stander

Trin #2: Monter din Transformer HD enhed til Sugekop standen -

1. Placer din Sugekop stander på et fladt og stabilt bord uden riller eller dug og benyt pumpen til at sikre standen via vakuum, og læg venligst mærke til formen på både det nederste af din Transformer HD og selve Sugekop Standeren.
2. Sørg for at de passer sammen og forsigtigt skal du nu glide selve din Transformer HD hen over Sugekop standen indtil de indbyggede magneter sikre fastholdelse.

Trin #2: Monter din Transformer HD enhed til Sugekop standen -

3. Placer din Sugekop stander på et fladt og stabilt bord uden riller eller dug og benyt pumpen til at sikre standen via vakuum, og læg venligst mærke til formen på både det nederste af din Transformer HD og selve Sugekop Standeren.
4. Sørg for at de passer sammen og forsigtigt skal du nu glide selve din Transformer HD hen over Sugekop standen indtil de indbyggede magneter sikre fastholdelse.

