


Wake Pro

Puzzle Pro vækkeur

Brugervejledning
Dansk

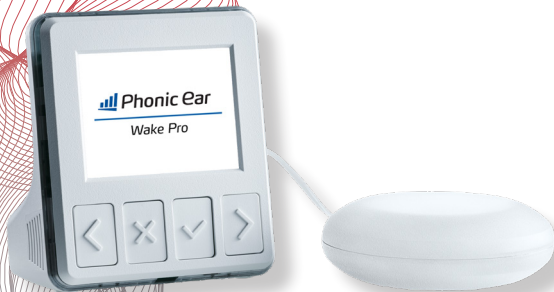

 **Phonic Ear**[®]
Connected to life

Indholdsfortegnelse

Introduktion	4
Pakkens indhold	5
Oversigt	6
Tilbehør	8
Tilslut strømforsyning	9
Tænd/sluk for Wake Pro	10
Oversigt over startskærm	11
Oversigt over hovedmenu	12
Indstil uret / skift urets tidsformat	14
Indstil dato	15
Indstil alarm	16
Indstil alarmens lydstyrke & varighed	17
Skift alarmens ringetone	18
Indstil ringetonens frekvens	19
Indstil natlys	20
Indstil lysstyrke	21
Sæt Wake Pro i parringsmode	22
Personliggør alarmsignal	23
Indstil snoozeinterval	24
Skift sprog	25
Fejlsøgning	26
Test og godkendelser	27
Miljøinformation	28
Garanti	30
Sikkerhedsforanstaltninger	33

Introduktion

Wake Pro er Puzzle Pro systemets vækkeur og alarmmodtager. En kraftig vibrator placeret under hovedpuden samt lyd- og lyssignaler sikrer, at du bliver vækket, når vækkeuret ringer, eller når én af Puzzle Pro systemets alarmsendere aktiveres fx Detect Pro og Detect Door Pro.

Wake Pro er et vækkeur, hvor du kan sætte alarmer. Den har et display, hvor du kan se ur, dato samt indgående alarmsignaler.

Hver alarm gengives med sit eget unikke vibrationsmønster, eget unikke symbol i displayet og lysindikation i urets lysramme, hvilket gør det nemmere at skelne mellem forskellige alarmsignaler.

Alarmmodtageren modtager trådløse alarmsignaler og ringetoner fra dørklokke, telefon, porttelefon, babyalarm, røgalarm, vindue-/dør- eller telefonsensorer m.m.

Wake Pro har batteribackup, der ved fuld opladning har ca. 72 timers batterilevetid ved strømsvigt.

Pakkens indhold

Pakken indeholder følgende dele:



Wake Pro
alarmmodtager



Pudevibrator
(Ø 10 cm)



Strømforsyning
(5V micro usb)




Brugervejledning

Oversigt



Overzicht

Skruehuller til vægophæng

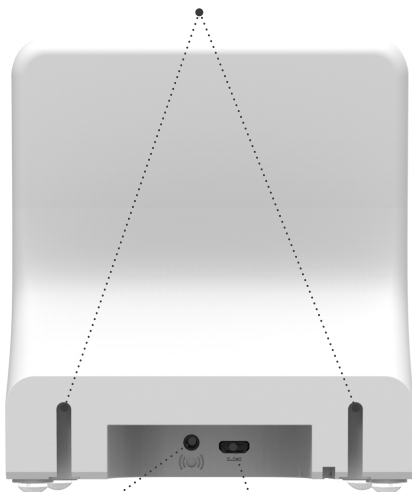

Vibratortilslutning
Til tilslutning af pude- eller sengebundsvibrator

Strømforsyningsstik
Til tilslutning af 5V micro usb strømforsyning

Tilbehør (Købes separat)

Sengebundsvibrator

Wake Pro kan tilsluttes en sengebundsvibrator (Ø 28 cm).




Tilslut strømfor syning

Sæt strømfor syningen i strømfor syningsstikket på bagsiden af Wake Pro (se evt. oversigten på s. 7).


Strømfor syningen sættes derefter i stikkontakten, og stikkontakten tændes.

Wake Pro har indbygget batteribackup, der ved fuld opladning har ca. 72 timers batterilevetid ved strømsvigt.


Tænd for Wake Pro

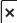Hold  inde i ca. 5 sekunder, indtil der kommer lys i displayet, og velkomstskærmen vises.


Sluk for Wake Pro

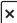Hold  inde i ca. 5 sekunder, indtil beskeden "power off" vises på skærmen. Herefter slukkes Wake Pro.

Bemærk

Holdes  inde i ca. 20 sekunder sættes Wake Pro i storage mode. Ved genoptaget brug efter storage mode skal tid og dato indstilles igen.

Øversigt over startskærm

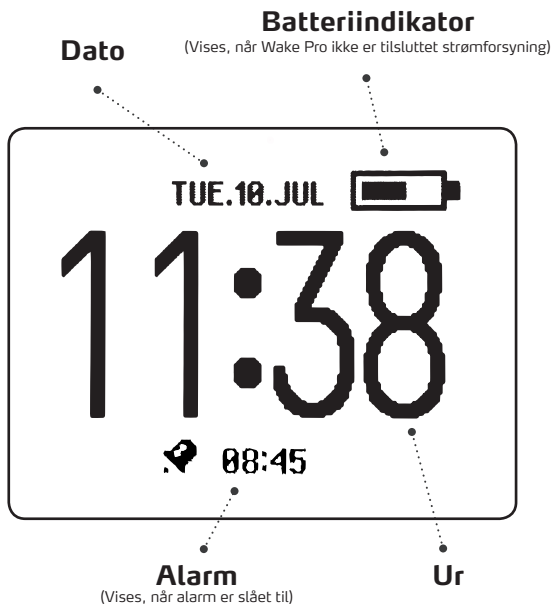

Overzicht over hovedmenu



Alarm

Sæt alarm



Ur

Indstil ur



Dato

Indstil dato



Lydstyrke

Indstil alarmens lydstyrke



Ringetone

Indstil alarmens ringetone



Frekvens

Indstil ringetonens frekvens



Lysstyrke (lysramme)

Indstil lysrammens lysstyrke



Lysstyrke (skærm)

Indstil skærmens lysstyrke



Tidsformat

Indstil urets tidsformat (12 / 24 timer)



Snooze

Indstil snoozeinterval



Natlys lysstyrke

Indstil natlysets lysstyrke



Natlys farve

Indstil natlysets farve



Alarms varighed






Indstil alarms varighed






Sprog

Vælg sprog






Indstil uret




1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til
ikonet  og tryk på 

2 Brug  og  til at indstille timeslag.
Godkend valg med 















Brug herefter  og  til at indstille
minutslag. Godkend valg med 

Skift urets tidsformat

1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til
ikonet  og tryk på 

2 Brug  og  til at skifte mellem 12 / 24
timers tidsformat. Godkend valg med 










Indstil dato







- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  og tryk på 
- 2 Brug  og  til at indstille årstal.
Godkend valg med 
- 3 Brug  og  til at indstille måned.
Godkend valg med 
- 4 Brug  og  til at indstille dag.
Godkend valg med 

Bemærk

Wake Pro finder automatisk den korrekte ugedag, når dato er indstillet.


Indstil alarm

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  og tryk på 
- 2 Tryk igen på  for at slå alarmen til / fra.
- 3 Tryk herefter på  til ikonet  og tryk på 









Brug herefter  og  til at indstille timeslaget for alarmen. Godkend valg med 
- 4 Brug herefter  og  til at indstille minutslaget for alarmen. Godkend valg med 

Alarmen er nu slået til, og alarmikonet vises på startskærmen.









Bemærk

Slå alarmen til / fra hurtigt ude på startskærmen ved at holde  inde i ca. 2 sekunder.






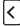


Indstil alarmens lydstyrke

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  og tryk på 
- 2 Brug  og  til at justere lydstyrken.
Godkend valg med 









Indstil alarmens varighed

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  og tryk på 
- 2 Brug  og  til at indstille antal sekunder, som alarmen varer.
Godkend valg med 






Skift alarmens ringetone

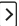- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  og tryk på 
- 2 Brug  og  til at skifte ringetone.
Godkend valg med 



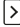

Indstil ringetonens frekvens

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  og tryk på 
- 2 Brug  og  til at justere frekvensen.
Godkend valg med 

Indstil natlys


1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til
ikonet  og tryk på 

2 Brug  og  til at justere natlysets
lysstyrke. Godkend valg med 












3 Brug herefter  og  for at navigere til
ikonet  og tryk på 




Brug  og  til at justere natlysets farve.
Godkend valg med 

Bemærk








Slå natlyset til / fra hurtigt ude på startskærmen ved at
holde  inde i ca. 2 sekunder.

Indstil lysstyrke

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  (lysramme) og tryk på 
- 2 Brug  og  til at justere lysrammens lysstyrke. Godkend valg med 
- 3 Tryk dernæst på  efterfulgt af tryk på 
ved ikonet for  (skærm)


Brug  og  til at justere skærmens lysstyrke. Godkend valg med 

Sæt Wake Pro i parringsmode






















- 1 Sluk Wake Pro ved at holde  inde i ca. 5 sekunder.
- 2 Sæt Puzzle Pro senderen i parringsmode.
- 3 Tænd for Wake Pro ved at holde  inde.
- 4 Tryk på , så snart velkomstskærmen vises.
- 5 Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  og tryk på 

Lysrammen vil blinke rød og blå, og Wake Pro er nu i parringsmode i ca. 5 minutter.










Bemærk

Wake Pro er fortsat i parringsmode selv efter, at sender og modtager har dannet par. Afslut parringsmode ved at trykke på 

Personliggør alarmsignal

- 1 Sluk Wake Pro ved at holde  inde i ca. 5 sekunder.
- 2 Tænd for Wake Pro ved at holde  inde.
- 3 Tryk på , så snart velkomstskærmen vises.
- 4 Brug  og  for at navigere til ikonet  og tryk på 
- 5 Brug  og  for at navigere til senderen, der ønskes personliggjort, og tryk på 
- 6 Brug  og  til at navigere mellem:
 -  Skift navn
 -  Skift ringetone
 -  Skift ikon
 -  Skift farve
 -  Slet alarm
- 7 Tryk på  ved det ønskede ikon og foretag ændringer med  og . Godkend valg med 









Indstil snoozeinterval

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  og tryk på 
- 2 Brug  og  til at indstille antal minutter, som snoozefunktionen varer.
Godkend valg med 
- 3 Anvend snoozefunktionen ved at trykke på , når alarmer ringer.

Bemærk

For at afbryde snoozefunktionen skal alarmer slås fra (se afsnit på s. 16)

Skift sprog

- 1 Åbn hovedmenuen ved at trykke 
Brug herefter  og  for at navigere til ikonet  og tryk på 
- 2 Brug  og  til at skifte sprog.
Godkend valg med 

Fejlsøgning

Fungerer din Wake Pro ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere de enkelte fejlmuligheder nedenfor:

Ingen strøm på Wake Pro

- Tjek, at stikkontakten på væggen er tændt.
- Tjek, at alle tilslutninger er korrekt tilsluttet.

Intet lys i lysrammen

- Tjek, at lyset i lysrammen er indstillet korrekt (se s. 21).

Ingen lyd ved alarmsignal

- Tjek, at lydstyrken er indstillet korrekt (se s. 17).

Wake Pro modtager ikke alarmsignaler fra Puzzle Pro senderen

- Par Wake Pro og Puzzle Pro senderen igen (se s. 22).

Afhjælper dette ikke problemet, kontakt da venligst din Phonic Ear forhandler/installatør.

Test og godkendelser

Wake Pro er godkendt og CE-mærket i henhold til direktiverne RED (fx R&TTE) 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU og LVD 2014/35/EU.

Kontaktinformation:

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark

CE 1299

Miljøinformation



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved udviklingen og fremstillingen af dit Phonic Ear produkt er der anvendt materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.

Batterier er mærket med viste overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejllens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.

Sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel

Litium-batteri indeni. Fare for brand, eksplosion og alvorlige forbrændinger, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Må ikke genoplades, skilles ad, opvarmes til over 100 °C, forbrændes eller udsættes for vand eller direkte sollys.

For at forhindre kortslutning skal du sørge for, at metalgenstande ikke kommer i berøring med batteriet eller konnektorer på telefon/mikrofon.

Lad være med at adskille, ændre eller udsætte dette produkt for tryk, så der kan opstå skader på elektroniske kredsløb, hvilket kan medføre en svækkelse af produktets sikkerhedsforanstaltninger.

Vigtig bemærkning

Litium-batterier må ikke åbnes eller forbrændes. Udsættelse for stoffer indeholdt i produktet eller opstået i forbindelse med afbrænding heraf vil kunne medføre personskaade.

Batteriet er godkendt til lufttransport.



Din forhandler

Rev. A 0718

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.: 3917 7101
mail@phonicear.dk
www.phonicear.dk

 **Phonic Ear**[®]