

Link Pro

Puzzle Pro tonekald

Brugervejledning
Dansk



 **Phonic Ear**[®]
Connected to life

Indholdsfortegnelse

Introduktion	4
Pakkens indhold	5
Oversigt	6
Tilbehør	8
Parring til Puzzle Pro sendere	9
Tilslutning til tv og radio mv.	11
Tilslutning af tv-løsning	12
Tilslutning af strømforsyning	13
Test af signal	14
Indstilling af lydstyrke	15
Indstilling af bas og diskant	16
Fejlsøgning	17
Test og godkendelser	18
Miljøinformation	19
Garanti	20

Introduktion

Link Pro er Puzzle Pro systemets tonekald, der informerer dig om vigtige alarm- og ringsignaler, når du ser tv eller hører radio via en tv-løsning.

Med Link Pro er det muligt at modtage alarmer fra Puzzle Pro systemets alarmsendere fx Detect Pro og Detect Door Pro, mens du lytter til radio eller ser tv. Når Link Pro modtager en alarm, dæmpes lyden fra tv eller radio automatisk, og et alarmsignal afspilles.

Hver alarm gengives med sit eget unikke lydmønster, hvilket gør det nemt at skelne mellem de forskellige alarmsignaler.

Pakkens indhold

Pakken indeholder følgende dele:



Link Pro tonekald



Strømforsyning
(5V micro usb)



3,5 mm stereojack til
3,5 mm stereojack



Optisk lyd kabel



Skruetrækker



Brugervejledning

Overzicht


Bagside

Linjeudgang

Til tilslutning af tv-løsning

Mikrofonindgang

Til tilslutning af ekstern mikrofon

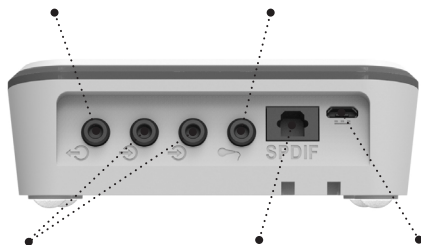

Linjeindgange

Til tilslutning af radio, tv m.m.

Digital indgang


Indgang til optisk lyd fra fx tv, PlayStation og lignende

Strømforsyningsstik

Til tilslutning af 5V micro usb strømforsyning

Overstigt

Venstre side

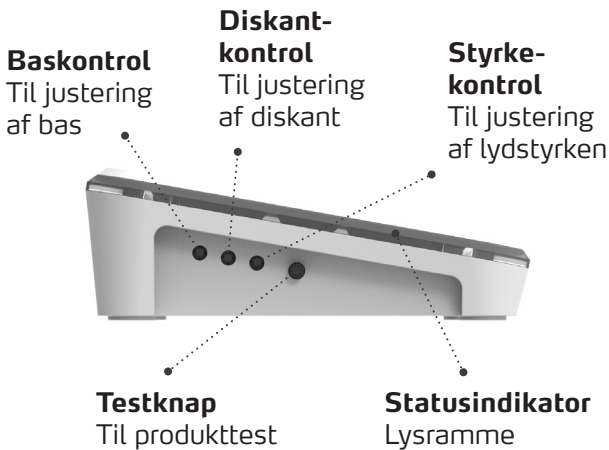

Tilbehør (Købes separat)

Phono/SCART adapter



3,5 mm stereojack til
6,3 mm stereojack



3,5 mm stereojack til
2 x phonostik



3,5 stereojack til
3,5 stereojack




Parring til Puzzle Pro sendere

Link Pro modtageren skal parres med Puzzle Pro senderen/senderne. Vi anbefaler, at du parrer enhederne, før du monterer dem.

Sæt først din Puzzle Pro sender i parringsmode (se evt. Puzzle Pro senderens brugervejledning).

Sæt nu Link Pro i parringsmode. Tryk på Link Pro's testknap og hold den inde i ca. 10 sekunder, indtil den er i parringsmode, og statusindikatoren blinker rødt og blåt. Link Pro er nu i parringsmode i ca. 5 minutter.

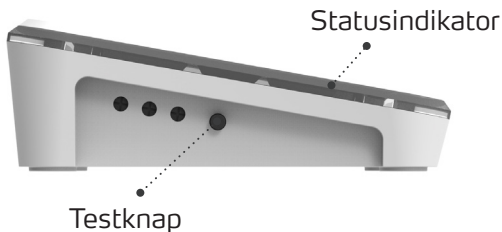

Når både Puzzle Pro senderen og Link Pro er i parringsmode, tager parringen ca. 5-10 sekunder. Ved succesfuld parring vil Link Pro's statusindikator lyse lyseblåt.

Parring til Puzzle Pro sendere

BEMÆRK

Link Pro vil fortsat lyse lyseblåt og være i parringsmode, også efter at parringen er afsluttet med den enkelte alarmsender.

Flere enheder kan parres samtidigt.


Tryk på testknappen på Link Pro, hvis du ønsker at afslutte parringsmode. Lyset i statusindikatoren slukkes.

Link Pro's statusindikatorer:

Lys	Status
Konstant hvid	Aktiv
Blinker grøn (5 sek.)	Lydsignal aktivt
Blinker rød og blå	I parringsmode
Konstant lyseblå	Succesfuld parring og i parringsmode (efter én sender er parret)

Tilslutning til tv og radio mv.

På bagsiden af Link Pro sættes en af de medfølgende ledninger i ét af de tre markerede indgangsstik.

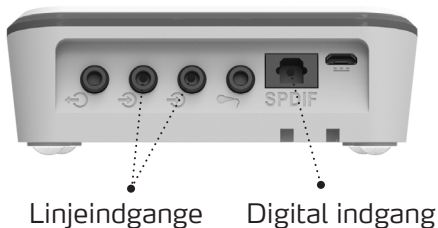

Tilslut derefter den anden ende af ledningen i "Line out" på tv'et eller i radioen.


BEMÆRK

Andre lydskilder end radio og tv kan tilsluttes til Link Pro.

Benyt kun ledninger og jackstik leveret af en Phonic Ear forhandler/installatør.

Tilslutning af tv-løsning


På bagsiden af Link Pro sættes ledningen i stikket mærket linjeudgang.

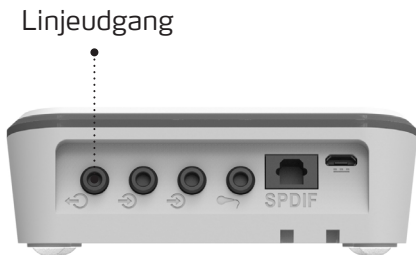

Sæt derefter den anden ende af ledningen til din indgang på din tv-løsning (se evt. tv-løsningens brugervejledning).

Tilslutning af strømforstyrning


Sæt 5V micro usb strømforstyrningen i strømforstyrningsstikket på bagsiden af Link Pro.

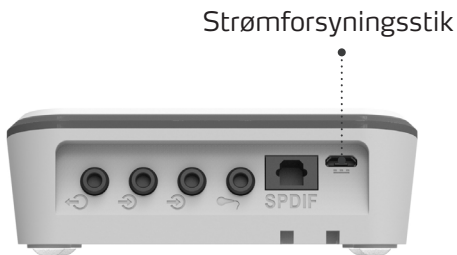

Sæt derefter strømforstyrningen i stikkontakten, og tænd for kontakten.

Test af signal


Du kan teste, om Link Pro er tændt, og om der er signal ved hjælp af testknappen.

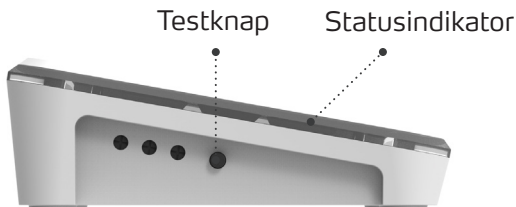

Tryk kort på testknappen. Link Pro er tændt, hvis statusindikatoren lyser hvidt. Link Pro modtager et lydsignal, hvis statusindikatoren blinker grønt.

Indstilling af lydstyrke

Indstil lydstyrken ved hjælp af styrkekontrollen på siden af Link Pro. Benyt vedlagte skruetrækker.

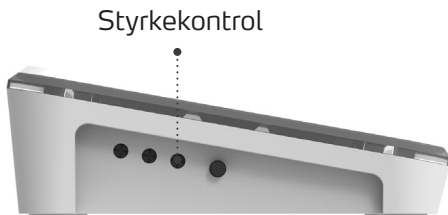

Drej med uret for at øge lydstyrken, og mod uret for at dæmpe lydstyrken.

BEMÆRK

Hvis du synes, at alarmsignalerne er for høje, kan du skrue helt op for den tilsluttede lydkilde og justere lyden ned på din tv-løsning.


Indstilling af bas og diskant

Bas

Basniveauet indstilles ved hjælp af baskontrollen. Drejes kontrollen mod uret, mindskes basniveauet, og drejes den med uret, øges basniveauet.

Diskant

Diskantniveauet indstilles ved hjælp af diskantkontrollen. Drejes kontrollen mod uret, mindskes diskantniveauet, og drejes den med uret, øges diskantniveauet.

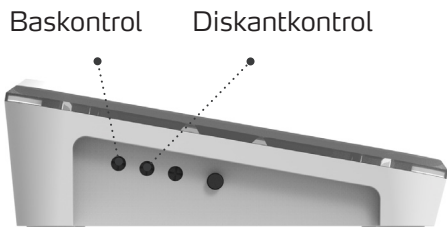

Fejlsøgning

Fungerer dit Link Pro tonekald ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere de enkelte fejlmuligheder nedenfor:

Ingen lyd

- Tjek, at stikkontakten på væggen er tændt.
- Tjek, at lydstyrken er korrekt indstillet.
- Tjek, at der kommer lyd fra lydkilden fx tv'et.
- Tjek, at statusindikatoren blinker grønt ved et kort tryk på testknappen.
- Tjek, at alle tilslutninger er korrekt tilsluttet.

Link Pro modtager ikke alarmsignaler fra Puzzle Pro senderen

- Par Link Pro og Puzzle Pro senderen igen.

Afhjælper dette ikke problemet, kontakt da venligst din Phonic Ear forhandler/installatør.

Test og godkendelser

Link Pro er godkendt og CE-mærket i henhold til direktiverne RED (fx R&TTE) 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU og LVD 2014/35/EU.

Kontaktinformation:

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark

CE 1299

Miljøinformation



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved udviklingen og fremstillingen af dit Phonic Ear produkt er der anvendt materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet, hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejllens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.



Din forhandler

Rev. A 0718

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.: 3917 7101
mail@phonicear.dk
www.phonicear.dk

 **Phonic Ear**[®]