

Brugsanvisning KOMFORT sædepude (revideret 2022-06)

Forhandler: Denne brugsanvisning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af **KOMFORT** sædepuden forstår produktoplysningerne.

Kunde: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at få den optimale brug af **KOMFORT** sædepude. Anvend puden under vejledning fra fagprofessionelle. Opbevar denne brugsanvisning til fremtidigt brug af **KOMFORT** sædepude.

Leverancens indhold

1 **KOMFORT** sædepude

1 aftageligt standardbetræk

1 brugsanvisning

Produktbeskrivelse

KOMFORT sædepude er opbygget af en base af 55 kg brandhæmmende koldskum foran og i siderne. Den har et trykaflastende felt af Panteraskum samt et let sidestyr. Afslutningsvis er 20 mm Panteraskum over hele siddefladerne. Pudens har en 1½ cm skrå forkant for at opnå bedst mulig understøttelse.

Skummet foran og i siderne giver stabilitet til siddestillingen og ekstra bæring ved lårbenet. Skummet i forkanten giver, i samarbejde med Panteraskummet bagtil, bækkenet mulighed for aflastning og hindrer samtidig bagudkipning.

Målene for puden er angivet på mærkningen. Husk at sikre, at du har valgt den rette størrelse pude til den stol, brugeren anvender puden i. Målene anvendes også til at bestille ekstra betræk til puden.

Pudens erklærede formål er at give brugeren en stabil siddestilling og sikre en trykfordeling, som forebygger tryk-skader på kroppen.

Hvis du ønsker yderligere information om KOMFORT sædepude kontakt venligst fabrikanten:

SCHOU RASMUSSEN A/S, Lyngager 8, DK-2605 Brøndby,


Tlf. 44531727, e-mail: flemming@sr-v.dk

Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med puden, bør indberettes til:

Schou Rasmussen A/S og Lægemiddelstyrelsen

Brugsanvisning

- Maksimum brugervægt: 110 kg.
- Fjern al emballage før brug.
- Anbring puden på en stol eller kørestol med mærkatet "BACK" og lynlås placeret bagud. Den formede overflade skal vende opad.
- Betrækket er åndbart og strækbart i flere retninger, hvilket sikrer brugerens komfort og maksimerer skummets effektivitet.
- Undgå at anvende yderligere lag eller polstring mellem person og pude, da dette kan reducere pudens effektivitet.
- Det indvendige skum bør inspiceres regelmæssigt. Hvis betrækket beskadiges, må puden ikke anvendes før der er monteret et nyt betræk.
- Ved montering af betrækket skal det sikres, at alle skummets hjørner er korrekt monteret i betrækket. Det skal desuden sikres, at den formede overflade vender op mod brugeren, og at mærkatet "BACK" og lynlåsen er placeret bagud.
- Skummet tåler ikke vand og væsker.
- Skummet kan ikke vaskes.
- Skridsikring på undersiden: Der er påsyet 2 stk. 5 cm bred Astrakan (Velcro)
- Kontrollér, at puden sidder fast på bunden efter placering.
- Puden skal monteres som anvist på nedenstående billede:

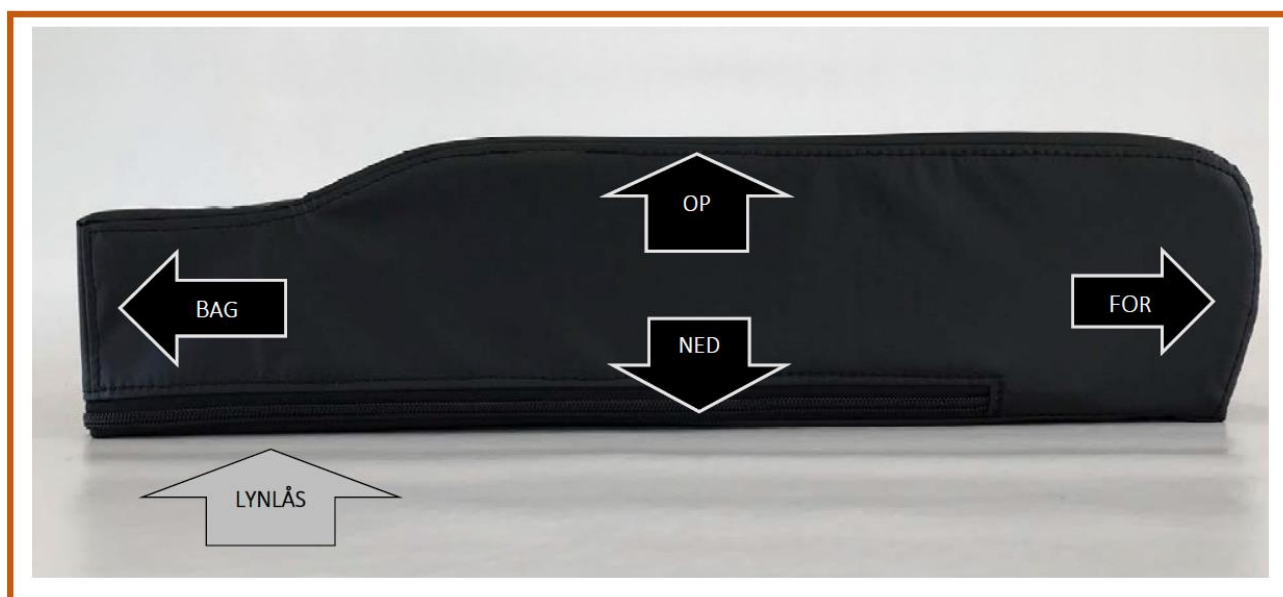

Rengøring og pleje

Betrækket er vaskbart og kan rengøres med en opløsning af neutralt vaskemiddel og varmt vand påført med engangsklud eller kogevaske ved max. 90°C. Betrækket tåler også rengøring med sprit.

Vi anbefaler ikke at vaske betrækket i vaskemaskinen ofte.

Luk lynlåsen på betrækket før vask. Det anbefales at bruge et vaskenet for at skåne betrækket og andet det vaskes sammen med. Vaskes sammen med lignende farver. Brug ikke blegemiddel, blødgøringsmiddel og kemiske rensedmidler! Betrækket skal lufttørre efter vask.

OBS! Betrækket tåler ikke tørretumbler, skal lufttørres

Betrækket består af inkontinensstof på overfladen, i siderne og bunden. Dette hindrer, at væsker kan trænge ind til skumpuden.

Brandsikkerhed er efter EU klasse B1.

Holdbarhed:

Forventet levetid er 12-18 måneder ved daglig brug. Brugsværdien kan øges ved at beskytte puden mod fugt og direkte sollys samt at stille sædepuden på højkant, så den kan ventileres, når den ikke benyttes. Når skummet er dødt – dvs. ikke rejser sig helt igen efter at have været presset sammen, nedsættes pudens effekt og bør skiftes snarest muligt. Kontrollér derfor jævnligt puden – især efter 1 års anvendelse.

Bortskaffelse:

Brugeren skal sørge for en aftale med kommunen om bortskaffelse eller tilbagelevering.

Tilkøb af betræk

Af hygiejniske årsager kan det være praktisk med ekstra betræk til puden.

Trelleborg: Åndbart og strækbart betræk, som kan monteres ovenpå inkontinensbetrækket.

Betrækket er vaskbart kan rengøres med en opløsning af neutralt vaskemiddel og varmt vand påført med engangsklud eller maskinvaskes ved 60°C med vaskemiddelopløsning.

Betrækket skal lufttørre og tåler ikke tørretumbler.

Betrækkets underside og kanter bagtil og i højre/venstre side er monteret med sort PVC.

PVC-materialet rengøres bedst ved aftørring med fugtig klud påført opvaskemiddel. Stærkt tilsmudsede områder rengøres med f.eks. Maxi 3 eller andet alkalisk rengøringsmiddel. Prøv altid først på et ikke synligt sted ved benyttelse af stærkt koncentrerede rengøringsmidler. Brug ingen opløsningsmidler, renseservietter, blegemidler, voks eller lignende.

Ved montering af betrækket skal det sikres, at alle hjørner er korrekt monteret, og den formede overflade vender op mod brugeren.

Inkontinensbetræk: Ved behov for hyppig vask kan supplerende betræk magen til standardbetrækket på **KOMFORT** sædepude tilkøbes.

Betræk kan tilkøbes hos Schou Rasmussen.

Tekniske data

Tekniske data omkring anvendte materialer kan rekvireres hos fabrikanten.

Garanti

KOMFORT sædepude produceres og forhandles i henhold til gældende europæisk lovgivning om medicinsk udstyr. Fabrikantens forpligtelser i tilfælde af fejl og mangler betinges af, at tredjemand ikke har foretaget indgreb i produktet.

Fabrikant

SCHOU RASMUSSEN A/S - Lyngager 8 - 2605 Brøndby - Danmark

Telefon: 44531727 / www.sr-s.dk / flemming@sr-v.dk

