



Inkontinens sengeunderlag med sidestykker –


85 x 90 cm.

Inkontinens sengelag til madrass beskyttelse. Underlaget har et vandtæt barrierelag i bunden og en kerne af stærkt absorberende materiale i midten. Lagnets overflade består hovedsageligt af bomuld, som føles behagelig. Beskyttelseslagnet er lamineret, hvilket gør det meget kraftigt, og resulterer i en glat overflade uden risiko for indvendige folder. Beskyttelseslagnet har side stykker, som kan føres ind under madrassen og hjælper med at fastholde lagnet til sengen/madrassen.



Brugsanvisning: Vask sengeunderlaget før brug for at aktivere absorberings- evnen. Placér sengeunderlaget på sengen med logo-siden mod madrassen. Fastgør beskyttelseslagnet sidestykkerne rundt under madrassen. Tag et fast greb om den tykke og laminerede del, når sengeunderlaget skal lægges på sengen. Sørg for at beskyttelseslagnet er tilpasset sengens bredde. Passer til sengebredde 80-105 cm.

Varenr. 310090
HMI nr. 139263

Varenavn	Inkontinens sengeunderlag med sidestykker - 85x90 cm
Passer til sengebredde	80-105 cm
Varenr.	310090
Antal produkter, stk.	1
Vægt	680 g.
Samlet absorberende areal	85 x 90 cm
Hele lagnets str.	85 x 190 cm
Absorberingskapacitet SS 8760033:2015	1537 ml (+/- 43 ml)
Overflademateriale	50% Bomuld, 50% Polyester
Underlagsmateriale	100% Polyester
Sidestykke	50% Polyester, 50% Bomuld
Barrierelag	Polyuretan
Absorberingsmateriale	95% Polyester, 5% Rayon
Rengøring	 Ved afføring eller blodpletter skal liggeunderlaget skylles i koldt vand hurtigst muligt.
Antal vaske	Ca. 450 (normal husholdningsvask)
Bortskaffelse/sortering	Brændbart affald, sorteres efter lokale anvisninger
Opbevaring	Stuetemperatur, ikke i sollys
Øvrig information	Produktet indeholder ikke PVC



Produktet overholder EU's grundlæggende sundheds-, miljø- og sikkerhedskrav

Produkten følger (EU) MDR 2017/745 og 2007/47/EG for medicintekniske produkter



OEKO-TEX® betyder at produkterne er fremstillet på en miljøvenlig måde



SRN SE-MF-000033314



Sørg for, at syninger og materialer er komplette og ubeskadiget. Ved tegn på slid skal produktet kasseres. Bemærk, at der stadig er risiko for at glide ud, efter hver bevægelse / position, skal der træffes en risikovurdering med udgangspunkt i andre sikkerhedsforanstaltninger! Læg altid sidestykkerne indunder madrassen. **Bemærk!** Produktet er ikke beregnet til at løfte personer. Bør ikke placeres i nærheden eller i direkte kontakt med genstande og enheder, der udsender høj varme.