



Inkontinens sengeunderlag med sidestykker – 90x295 cm


Beskyttelseslaget har en vandtæt barrierelag i bunden og en kerne af stærkt absorberende materiale. Lagnets overflade består hovedsageligt af bomuld, som føles behagelig. Beskyttelseslaget er lamineret, hvilket gør det meget kraftigt, og resulterer i en glat overflade uden risiko for indvendige folder. Beskyttelseslaget har sidestykker, som kan fastgøre lagnet til sengen/madrassen.



Brugsanvisning: Vask beskyttelseslaget før brug for at aktivere absorberingsevnen. Placér beskyttelseslaget på sengen med den grønne side mod madrassen. Fastgør beskyttelseslaget med vingerne/sidestykkerne rundt om madrassen.

Tag et fast greb om den tykke og laminerede del, når beskyttelseslaget anvendes som sengelagen.

Sørg for, at beskyttelseslaget er tilpasset sengens bredde.

Varenavn	Inkontinens sengeunderlag med sidestykker – 90x295 cm
Varemærke	Absorba
Varenr.	310049
Antal produkter, stk.	1
Vægt	850 g
Samlet areal	90x295 cm
Overflade, LxB	90x150 cm
Overflademateriale	100% Polyester
Underlagsmateriale	100% Polyester
Sidestykke	50% Polyester, 50% Bomuld
Barrierelag	Polyuretan
Absorberingsmateriale	65% Polyester, 35% Rayon
Absorberingskapacitet SS 8760033:2015	3296 ml
Rengøring	 Ved afføring eller blodpletter skal liggeunderlaget skylles i koldt vand hurtigst muligt.
Antal vaske	Ca. 200
Bortskaffelse/sortering	Brændbart affald, sorteres efter lokale anvisninger
Opbevaring	Stuetemperatur, ikke i sollys
Øvrig information	Produktet indeholder ikke PVC



Produktet overholder EU's grundlæggende sundheds-, miljø- og sikkerhedskrav



Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 (HBCO 00444)
OEKO-TEX® betyder at produkterne er fremstillet



Sørg for, at syninger og materialer er komplette og ubeskadiget. Ved tegn på slid skal produktet kasseres. Bemærk, at der stadig er risiko for at glide ud, efter hver bevægelse / position, skal der træffes en risikovurdering med udgangspunkt i andre sikkerhedsforanstaltninger! Læg **altid** sidestykkerne indunder madrassen. Bemærk! Produktet er ikke beregnet til at løfte personer. Bør ikke placeres i nærheden eller i direkte kontakt med genstande og enheder, der udsender høj varme.