



Supportserien er fremstillet og CE-mærket passende til kørestole og sidde-systemer på det Europæiske hjælpemiddelmarked.



Sittbelt
Y-sele med 2 fæstepunkter i hver side



Sittbelt
Hoftebælte med 1 fæstepunkt i hver side



SittBelt skal monteres og tilpasses af fagpersoner.

- 1) SittBelt monteres på kørestolen via fire fæstningspunkter. Kig efter et rør som går under eller ved siden af sædepladen. Se billede 1.
- 2) Træk båndene gennem medfølgende Tri-glide-spænde, som vist på billede 4.
Er båndene for lange klippes det overflødige væk og enderne brændes.
- 3) Juster trækretningen ved at spænde samtlige bånd, som vist på billede 2.
- 4) Træk i begge sider af spændet for at få det centrert. Træk så det sidder stramt. Hvis brugeren føler ubehag løsnes båndet lidt.
- 5) Bæltepuderne kan justeres sidevers. Juster dem så de giver optimal trykaflastning.

Kontrol (Kontrollér ved alle monteringer)

- Trækretningen som vist på billede 2 • Trykket på båndet • Placeringen af bæltedepuderne.

Vaskeanvisning Support Eksklusiv 40° finvask • Support Soft 60° finvask, må ikke tørretumbles eller komme i tørreskab.

Garanti 1 år og 2 års reklamationsret. Anvend kun reservedele fra Anatomic SITT A/S, Danmark

Kontroller jævnlig brugeren for eventuelle alvorlige røde mærker. Ved røde mærker der kan give sår skal De ophøre med brugen.

Kontrol af slitage Kontrollér jævnligt båndene og puderne for slitage.

Produktet passer til sidde-systemet Zitzi Delfi, Zitzi Delfi Pro, Zitzi Sharky & Anatomic formsæbt sæde.

For øvrige kombinationer kontakt Anatomic SITT A/S.

Genanvendelse af en brugt del eller produkt der afmonteres og skrottes. Delene skal opdeles efter type af materiale.