



EGO Action / Multi Action

Sådan indstiller du din
EGO

**EGO instruktion
Action / Multi Action**





Sædevinkeljustering

- Brug vippeknappen (med finger-riller) bagerst til venstre under sædet. Tryk den forreste del af knappen ind for at frigøre stolens vippefunktion.
- Vip sædet til vandret position og lås det ved at trykke den bagerste del af vippeknappen op.

*Sædevinklen er låst ved levering.




Sædehøjdejustering

- Tryk på knappen (med finger-riller) forrest til højre under sædet for at justere sædehøjden.
- For at **hæve** sædet, tryk på knappen og løft dig lidt. For at **sænke** sædet, tryk på knappen mens du sidder på sædet.
- Stolen har den **rigtige** højde, når sædets forkant lige akkurat rører lårets underside og begge fødder er solidt placeret på gulvet. Underbenene skal være lodrette.




Sædedybdejustering

- Tryk let indad på drejgrebet bagerst til højre og drej det **fremad** for at **mindske** sædedybden og **bagud** for at **øge** sædedybden.
- Der skal være en håndsbredde mellem knæhasen og sædets forkant.

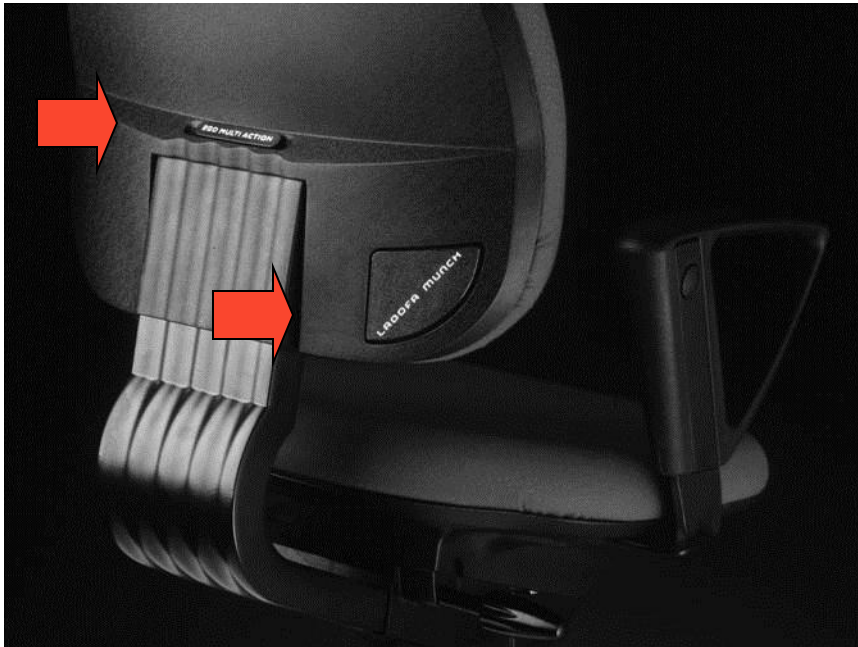

Ryghøjde / rygvip

- Tryk på knappen i ryglænets nederste højre hjørne og hold den inde. Brug begge hænder til at indstille ryglænet i højden og slip knappen.
- Med skydeknappen bag på ryglænet i højre stilling kan ryglænet vippe frit. Bevægelsen kan begrænses, hvis du skyder knappen mod venstre.

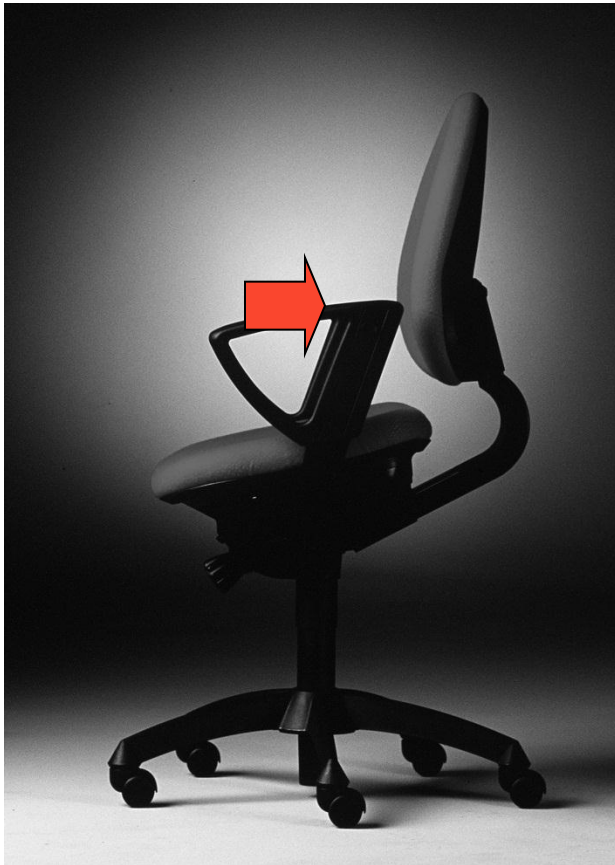


Armlæn / højde- og breddejustering

- Tryk på knappen på ydersiden af armlænet for indstilling af højden.
- Fjern sædepuden med et fast ryk opad. Brug en 5 mm unbrako-nøgle til at løsne armlænenes beslag, så de kan justeres til den ønskede bredde.




Sædevinkeljustering

- Brug vippeknappen (med finger-riller) bagerst til venstre under sædet. Tryk den forreste del af knappen ind for at frigøre stolens vippefunktion.
- Vip sædet til den ønskede position og lås det ved at trykke den bagerste del af vippeknappen op.

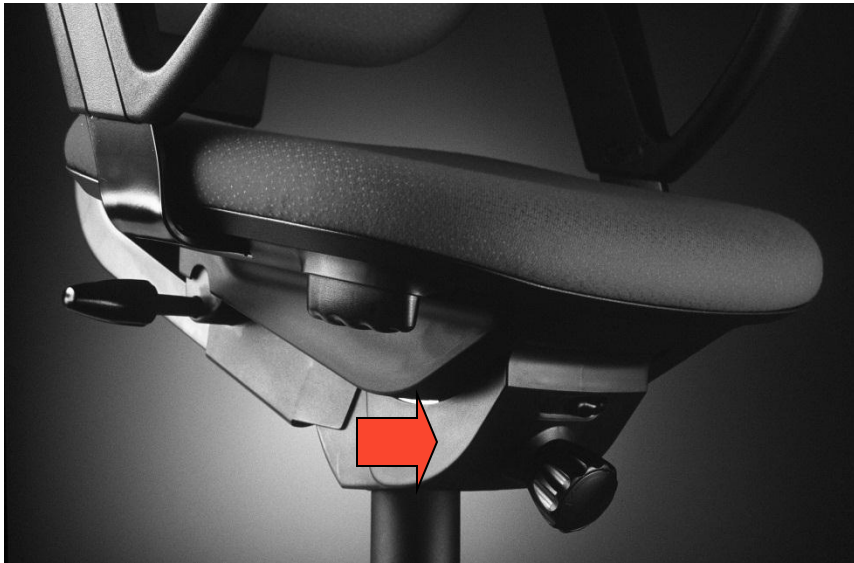

Vægtjustering

- Indstil stolen til din vægt på det runde håndtag foran under sædet.
- Sæde og ryglæn skal kunne vippe, så de med let modstand følger kroppens bevægelser.
- Skru håndtaget mod plus, hvis du har brug for mere modstand.
- Skru håndtaget mod minus, hvis du har brug for mindre modstand.

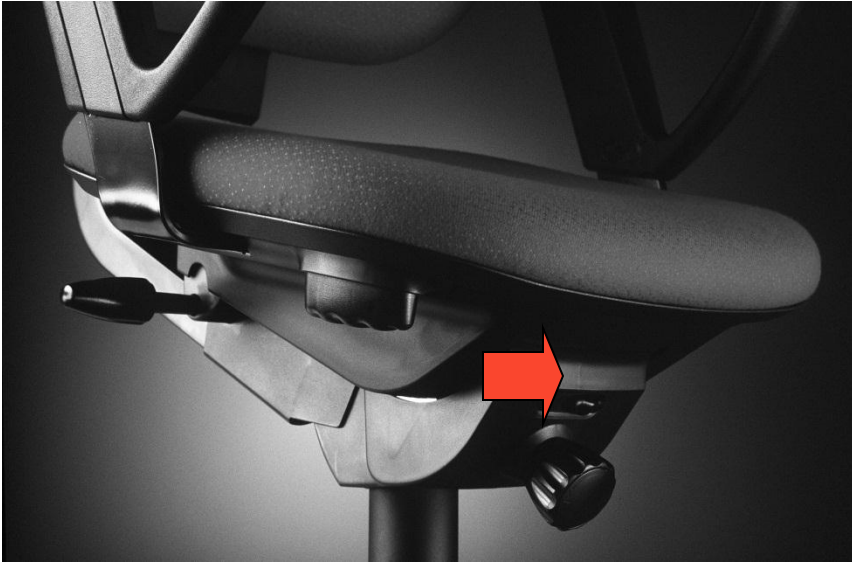

Stop for stolens vip*

- Stolens bevægelser fremad kan begrænses med skydeknappen foran under sædet.
- Vip stolen fremad til det punkt, hvor du ønsker, den skal stoppe. Skub derefter knappen til højre.

*Gælder kun EGO Multi Action