



Bellman Visit 868 Trykknapsender, BE1420

Bellman Visit 868 Trykknapsender, BE1420 (DK)

Tak, fordi du har valgt produkter fra Bellman & Symfon.

Bellman Visit 868-systemet består af et antal radiosendere og -modtagere. Senderne registrerer forskellige hændelser i det omgivende område og sender et radiosignal til modtagerne. Modtagerne opfanger dette signal og indikerer i overensstemmelse hermed via lys, lyd og/eller vibration. Senderen bestemmer, hvilken type lys, lyd eller vibration der skal afgives, så årsagen til indikeringen kan konstateres.

Gennemlæs hele brugermanualen, og påbegynd først derefter installationen af systemet. Se illustrationen af Bellman Visit 868-systemet på indersiden af omslaget.

Sådan kommer du i gang

Udpakning, installation og afprøvning af enheden

1. Adskil den forreste (6) og den bageste sektion fra hinanden. Isæt et 6 V-batteri – enten et PX28A-alkaline- eller et PX28L-litium-batteri – og tryk den forreste og den bageste sektion sammen igen.
2. Tryk på trykknappen (2). Bellman Visit 868 Trykknapsender tænder LED'en (1) for at indikere, at enheden sender et radiosignal. Bellman Visit 868-modtagerne indikerer dørsignalet.
3. Monter Bellman Visit 868 Trykknapsender på væggen ved at skrue de medfølgende skruer igennem hulmarkeringerne i vægbeslagene (7) og ind i væggen eller ved at bruge den dobbeltklæbende tape. Trykknapsenderen kan også placeres på en plan overflade, f.eks. et bord, eller bæres omkring halsen i halsstroppen (8), som fastgøres med halsstropfastgøringen (5).

Funktion

Generelt

BE1420 Bellman Visit 868 Trykknapsender er en radiosender i Bellman Visit 868-systemet til brug indendørs og udendørs på afskærmede lokaliteter. Senderen sender signaler til modtagerne i Bellman Visit 868-systemet, når der trykkes på trykknappen (2). Trykknapsenderen kan sende forskellige signalmønstre til modtagere i Bellman Visit 868-systemet afhængigt af senderens opsætning.

Radionøgle

Fra fabrikken er alle Bellman Visit 868-enheder indstillet til den samme radionøgle. Hvis en nabo har et lignende system, er det muligt at skifte til en anden radionøgle, så de to systemer ikke påvirker hinanden. Hvis radionøgleomskifteren (4) bruges til at skifte radionøgle på denne sender, skal alle andre enheder i Bellman Visit 868-systemet også ændres til samme radionøgle. Se brugermanualen til den relevante enhed.

Indikatorer og signaler

Systemindikatorer

Når LED'en (1) lyser, sender trykknapsenderen radiosignaler.

Strømforsyning

Når trykknapsenderen er aktiv, vil LED'en (1) normalt lyse grønt. Det betyder, at batteriets tilstand er god. Hvis LED'en (1) lyser gult, betyder det, at batteriet er afladt og skal udskiftes. Brug kun batterier af typen PX28A (alkaline) eller PX28L (litium).


Fejlsøgning i korte træk

Problem	Løsning
Der sker ingenting, når	• Kontrollér, at batteriet vender rigtigt.

senderen aktiveres med trykknappen (2).	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift batteriet. Brug kun batterier af typen alkaline PX28A eller litium PX28L.
LED'en (1) lyser gult, når senderen aktiveres med trykknappen (2).	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift batteriet. Brug kun batterier af typen alkaline PX28A eller litium PX28L.
LED'en (1) lyser grønt, når senderen aktiveres med trykknappen (2), men modtagerne reagerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér batteriet i modtageren. • Kontrollér, at modtagerne ikke er placeret for langt væk, ved at flytte dem tættere på senderen. • Kontrollér, at trykknapsenderen er indstillet til den rigtige radionøgle. Yderligere oplysninger findes under Funktion/radionøgle.
Modtageren signalerer, selv om der ikke aktiveres en sender.	<ul style="list-style-type: none"> • Skift radionøgle på alle enheder i systemet. Yderligere oplysninger findes under Funktion/radionøgle.

Yderligere oplysninger om produktet (engelsk tekst) findes i appendix.

1. LED. Kombineret transmissions- og back-up-batteriindikator. Yderligere oplysninger under Indikatorer og signaler
2. Trykknop
3. Signalomskifter
4. Radionøgleomskifter
5. Fastgøring til halsstrop
6. Batteridæksel/front
7. Vægbeslag
8. Halsstrop

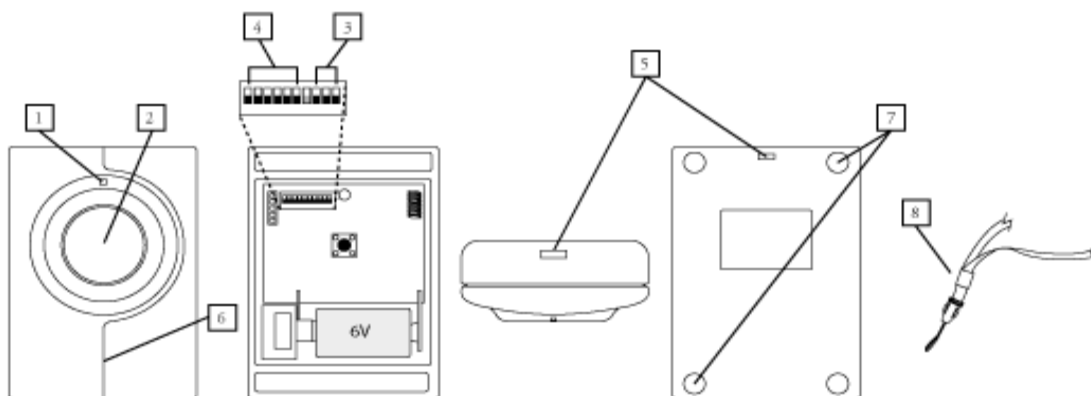

Address:
Bellman & Symfon AB
Södra Långebergsgatan 30,
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sweden

Our office hours are:
Mon-Fri 08:00-12:00, 12:45-16:30

Telephone: +46 31 682820
Fax: +46 31 682890
Homepage: www.bellman.com
Sending us company e-mail: info@bellman.symfon.se