

Yderligere praktiske anbefalinger:

- For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz® produktet indendørs.
- Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes.
- Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade nogen.
- Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra personen. Oliz® produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da indholdet kan være farligt for børn under 3 år.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast, stof og metal efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingsystemer.

Garanti: Ved produktionsfejl giver Oliz® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz produktet, er du velkommen til at kontakte os.

Ordre: År: Produkt: Liz



Godkendt ved EN12182

Dansk Design - er produceret i EU - www.oliz.dk

Oliz - Bornholmsvej 10 - 7400 Herning -DK -tlf +45 20 78 79 54

Oliz® producerer hjælpemidler, for at styrke den sensorisk integration. Målet er, at fokusere på personer, der har brug for vedvarende støtte til, at styrke deres egen selvbevidsthed.

Oliz® skulderpuden Liz er specielt designet til personer, der ofte oplever alvorlig fysisk spænding, rastløshed eller stress. Skulderpuden hjælper med til, at give afslapning og lindring i hverdagen.

Den har en effektive virkning pga. tyngden og er nem at tage med rundt.

Skulderpuden Liz kan transporteres i en taske.

Ved korrekt brug får du et produkt, der holder længe.

Sørg for at gemme dette informationsark til senere brug.

Produkt: Skulderpude "Liz"



Vigtige instruktioner for brugen af Oliz® produktet:

Oliz® skulderpuden "Liz" giver en dejlig ro og sænker skuldrene via sin tyngde. Liz er ideel at bruge i stressede situationer, ved spise tider og som støtte til undervisningsbrug.

Oliz® skulderpuden "Liz" er designet til borgere fra +14 år

Størrelse: Længde 390mm - bredde 380 mm - højde 15mm
vægt 1,5 kg - 2 kg og 2,5 kg se etiket for størrelse under rød flag label.

Materiale stof: 100% Imiteret læder/PU

Materiale indvendig: 1,5 kg 80% Polyethylene-20% metal kugler
2,0 kg 75% polyethylene - 25% metal kugler
2,5 kg 70% Polyethylene -30% metal kugler

Oliz® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Pleje instruktioner:

- Må ikke vaskes
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Rengør Oliz® produktet med en blød klud og brug et egnet rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel til kropskontakt. Skal efter tørres med rent vand for at undgå skader på stoffet.

Vigtige anvisninger:

- Oliz® skulderpuden "Liz" kan bruges ved, at placere puden på personens skuldre med "benene" hængende ned foran brystet. Den hjælper med, at føle afslappethed og personen mærker sig selv bedre. (Sommen i midten af skulderpuden skal vende ind mod ryggen)
- Det er vigtigt, at overvåge personen under brug, da produktet har godt med tyngde, der kan give fysiske påvirkninger.
- Et Oliz® produkt bør kun bruges med personens samtykke. Hvis personen føler ubehag og udviser modstand ved brug af produktet, skal den fjernes. Start evt. med at bruge produktet i korte tidsintervaller. Bliver der fortsat udvist modstand, så vil vi anbefale, at produktet ikke bliver brugt til denne person.
- Vær opmærksom på, at personen ikke bliver for vant til produktet så virkningen fortager sig. Produktet skal ses, som et terapeutisk hjælpemiddel.
- Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes fra borgeren med forsigtighed. Der må ikke kastes med produktet, da tyngden i produktet kan forårsage skade både på produktet, men også på borgere i nærheden af produktet.

Advarsler:

- Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal Oliz® produktet bruges med særlig forsigtighed.
- Vi anbefaler generelt, at borgere der bruger et Oliz® produkt overvåges under brug.
- Hold luftvejene frie, når produktet anvendes, da det ikke er et åndbart produkt.
- Et Oliz® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare.
- Hvis personen har en pacemaker, har dette produkt brug for særlig opmærksomhed. Hvis personen føler sig utilpas, kan dette være en indikation af virkningen af vores produkt. I dette tilfælde skal du straks fjerne produktet. Metallet i produktet er dog ikke magnetisk.

Opbevaring:

- Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Oliz® produktet opbevares utilgængeligt for en personer, der kræver tilsyn.
- Hold Oliz® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild.