

Yderligere praktiske anbefalinger:

- For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz® produktet indendørs.
- Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes.
- Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade nogen.
- Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra barnet. Oliz® produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da indholdet kan være farligt for børn under 3 år.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast, stof og metal efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingsystemer.

Garanti: Ved produktionsfejl giver Oliz® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz produktet, er du velkommen til at kontakte os.

Ordre: År: Produkt: Tom



Godkendt ved EN71-1-71-2-71-3 og EN12182
Dansk Design - er produceret i EU - www.oliz.dk
Oliz - Bornholmsvej 10 - 7400 Herning -DK -tlf +45 20 78 79 54



Oliz® producerer hjælpemidler, for at styrke den sensorisk integration. Målet er, at fokusere på børn der har brug for vedvarende støtte til, at styrke deres egen selvbevidsthed.

Oliz® vægt tæppet ”Tom” er specielt udviklet til børn, der ofte lider af alvorlig fysisk stress eller rastløshed.

Den venlige flagermus hjælper med, at bringe afslapning og lindring i hverdagen. Det bliver børn, såvel som voksne overbevist om med et godt udseende og effektiv funktionalitet. Tom skaber tillid, tryghed og kan bruges, som et vigtigt kommunikationsmiddel mellem børn og voksne.

Vægt tæppet Tom foldes med ørerne ind over kroppen og vingerne ligeså og kan transporteres i en taske.

Ved korrekt brug får du et produkt, der holder længe.

Sorg for at gemme dette informationsark til senere brug.

Produkt: Vægt tæppe "Tom"



Vigtige instruktioner for brugen af Oliz® produktet:

Oliz® vægt tæppet Tom er et terapeutisk tæppe, der hjælper børn med, at mærke sig selv og slappe bedre af i stressede situationer.

Det er muligt at dimse med noget i pels lommen på maven af Tom.

Oliz® vægt tæppet "Tom" er designet til børn i alderen fra +3 år.

Størrelse: Længde 770mm-Bredde 550mm Højde 30mm Vægt: 4 kg

Materiale stof: 100% Imiteret læder/PU

Materiale indvendig: 100% Polyethylene

Pels: 100% Polyester

Oliz® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Pleje instruktioner:

- Må ikke vaskes
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.

Rengør Oliz® produktet med en blød klud og brug et egnet rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel til kropskontakt. Skal efter tørres med rent vand for at undgå skader på stoffet. Pelsen kan aftages og vaskes på 40 grader, må ikke komme i tørretumbler, skal hængetørre.

Vigtige anvisninger:

- Oliz® vægt tæppet "Tom" kan bruges ovenpå et tæppe eller en dyne. Placér et øre på hver skulder og fold vingerne ud over barnets krop. Tom hjælper børn med, at føle tryk og mærker sig selv bedre og så kan de dimse med noget i lommen.
- Det er vigtigt, at overvåge barnet under brug af tæppet, da produktet har godt med tyngde, der kan påvirke dem fysisk.
- Et Oliz® produkt bør kun bruges med barnets eget samtykke. Hvis barnet føler ubehag og udviser modstand ved brug af produktet, skal det fjernes derfra. Start evt. med at bruge produktet i korte tidsintervaller. Bliver der fortsat udvist modstand, så vil vi anbefale, at produktet ikke bliver brugt til barnet.
- Vær opmærksom på, at barnet ikke bliver for vant til produktet så virkningen fortaer sig. Produktet skal ses, som et terapeutisk hjælpemiddel.
- Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes fra barnet med forsigtighed. Fold ørerne ind over kroppen og vingerne ligeså. Løft ikke i ørerne, da det kan forårsage skader, som ikke dækkes af garantien. Der må ikke kastes med produktet, da tyngden i produktet kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærheden af produktet.

Advarsler:

- Hvis barnet er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal Oliz® produktet bruges med særlig forsigtighed.
- Vi anbefaler generelt, at børn der bruger et Oliz® produkt overvåges under brug. Vi anbefaler kun, at bruge Tom til afslapning ikke til indsovning.
- Hold luftvejene frie, når produktet anvendes, da det ikke er et åndbart produkt.
- Et Oliz® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare.

Opbevaring:

- Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Oliz® produktet opbevares utilgængeligt for børn, der kræver tilsyn.
- Hold Oliz® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild.