

DK BRUGERVEJLEDNING
Signolux gateway til
smartphone A-2675



Funktionsknap

Internetstatusindikator

Slet-knap

Symboler



Netværksstik

Strømforsyningsstik
(mikro-USB)

Indhold

Pakkens indhold	4
Funktion	4
Opsætning	5
1. Tilslutning af netværkskabel.....	5
2. Tilslutning af strømforsyning	5
3a. Download og installer app	6
3b. Android: App-konfiguration.....	6
3c. Apple iOS: App-konfiguration.....	7
Alarmer	8
1. Visning på aktiv app	8
2. Visning, når appen er aktiv i baggrunden.....	8
Alarmskærm og symboler.....	9
3. Liste over modtagne alarmer (30 seneste)	9
Skærmbillede af listen over modtagne alarmer	10
Indstilling af signal og valg af symbol.....	10
Slet sender fra hukommelsen.....	11
Internetstatusindikator	11
Rækkevidde	11
Placering af Signolux gateway til smartphones.....	11
QR-koder til app stores	12
Bemærkninger om brugen af personlige oplysninger.....	12
Vedligeholdelse	12
Garanti	13
Garantiperiode.....	13
Hvad dækker garantien	13
Hvad dækker garantien ikke.....	13
Hvad gør du, hvis du har brug for service	14
Miljøinformation	14
Tekniske specifikationer	15

Tillykke med din nye Signolux gateway til smartphones.
Husk at læse denne brugervejledning grundigt. Den beskriver, hvordan enheden sættes op, og du lærer systemets muligheder at kende.

Krav

Følgende skal være til stede for, at enheden kan fungere:

- En installeret internet-router med en fungerende internetforbindelse.
- Internet-routeren skal have en fri LAN-port.
- Routerens DHCP skal være aktiveret (den er normalt aktiveret som standard)
- En Android smartphone med OS-version 4.01 eller senere eller
- En Apple iPhone med iOS 9 eller senere.

Pakkens indhold

Undersøg venligst, om de følgende dele er med i pakken:

- Signolux gateway til smartphones
- Netværkskabel, 2 meter
- 5 V strømforsyning med mikro-USB-stik
- Denne brugervejledning
- Garantibevis

Kontakt Tonax A/S, hvis nogle af disse dele mangler.

Funktion

Et Signolux-alarmsystem består af mindst én sender og én modtager.

Signolux **gateway til smartphones** er en af Signolux-systemets modtagere.

Den modtager de alarmer, der sendes fra de forskellige Signolux-sendere.

Signolux **gateway til smartphones** viser disse alarmer og videresender dem. En alarm kan modtages på en smartphone via en app, hvor end du befinder dig. Der kan parres et vilkårligt antal smartphones til én Signolux gateway til smartphones-enhed.

Bemærk: Alarmer kan ikke vises på en smartphone, hvis internetforbindelsen hjemme er afbrudt, eller hvis smartphonen befinder sig et sted uden telefonmodtagelse eller wi-fi.


Opsætning

1. Tilslutning af netværkskabel

Tilslut det medfølgende netværkskabel til netværkstikket på enhedens bagside. Tilslut den anden ende af netværkskablet til en fri LAN-port på din internet-router.

2. Tilslutning af strømforsyning

Tilslut strømforsyningens mikro-USB-stik til strømforsyningsstikket på bagsiden af Signolux-enheden. Tilslut den anden ende af strømforsyningen til en stikkontakt. Gateway til smartphones vil automatisk konfigurere sig selv med routeren. Signolux gateway til smartphones er nu klar til at modtage alarmer og sende disse videre.

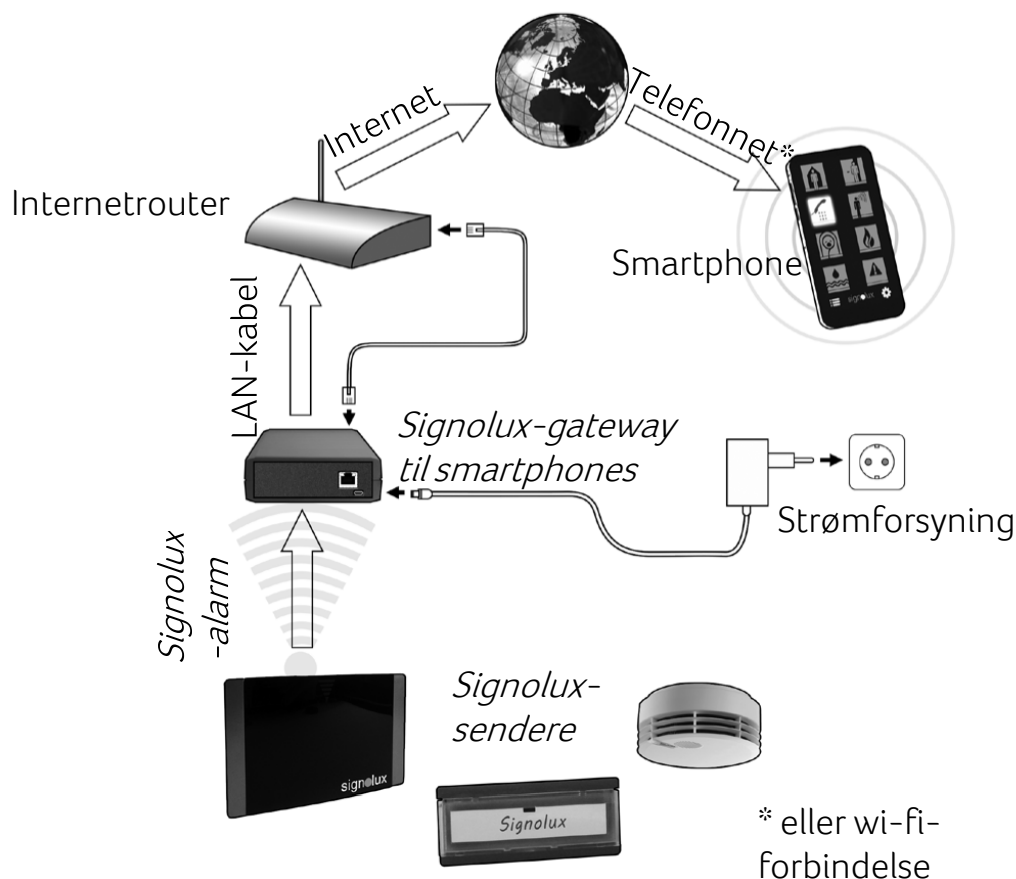

3a. Download og installer app

Søg efter, og download appen »Humantechnik: Alert«. Appen er på engelsk og fungerer på iPhone og Android-enheder. Installer den på din smartphone.


3b. Android: App-konfiguration

Åben appen og tryk på ⚙️ -ikonet for indstillinger. I indstillingerne skal du indtaste ID-nummeret, der er unikt for enheden.

Du finder ID-nummeret og koden på mærkaten i bunden af enheden samt på bagsiden af denne brugervejledning.

Efter indtastningen, vælg »Test settings«. Meddelelsen »Testing connection...« vises. Når beskeden »Test successful!« er vist, vælg da »Save settings« for at gemme indtastningen af ID-nummeret og koden, og tryk „Save“ for at vende tilbage til alarmskærmen.

Skærbillede af ”Indstillinger”

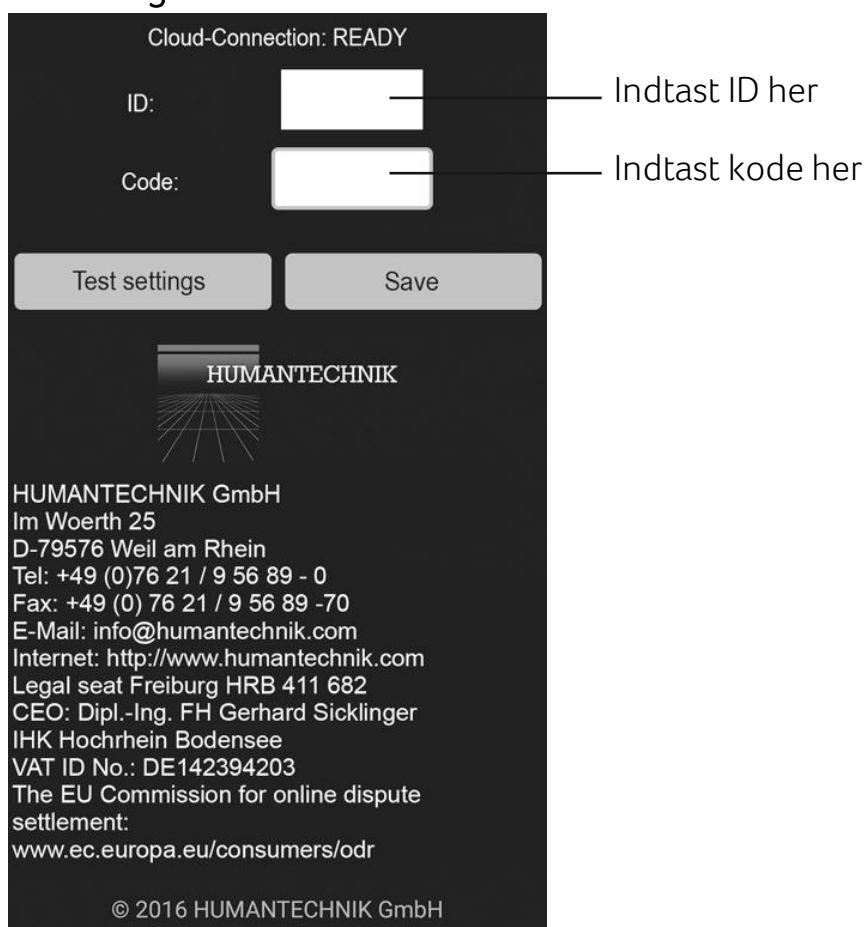

Appen vil nu modtage alarmer fra Signolux gateway for smartphones.

For at vende tilbage til de alarmskærmen uden ændringer, skal du trykke på ”tilbage” tasten.



3c. Apple iOS: App-konfiguration

Når du har installeret appen Humanteknik:Alert, skal du sørge for at aktivere en række indstillinger under "Meddelelser" på din telefon. Åbn "Indstillinger" og åbn "Meddelelser". Vælg "Humanteknik:Alert" appen og aktiver følgende indstillinger (de skal være grønne):

- Tillad meddelelser
- Vis i meddelelsescenter
- Lyde
- Etiket på appsymbol
- Vis på låst skærm

Dette sikrer dig, at du altid modtager meddelelser fra Humanteknik:Alert appen, selv når telefonen er låst.

Første gang du bruger appen, vil du blive bedt om tilladelse til, at Humanteknik:Alert appen må sende dig meddelelser. Vælg "Tillad".

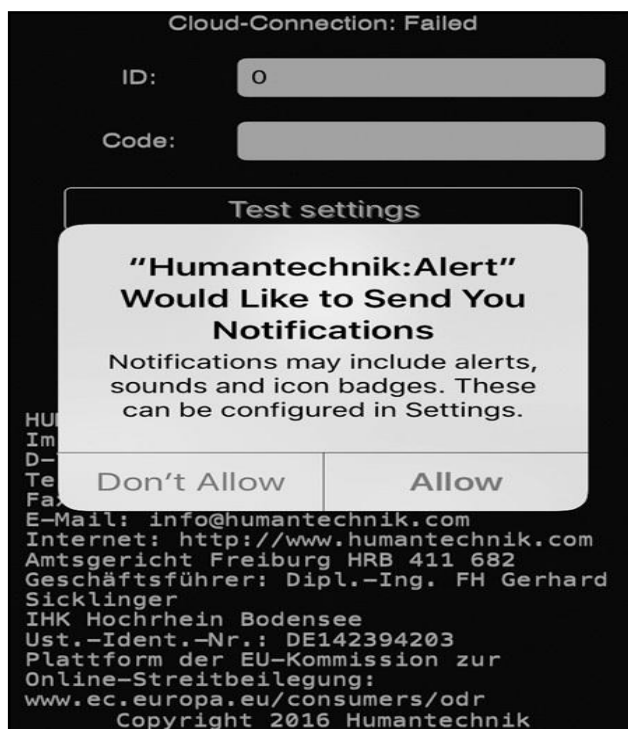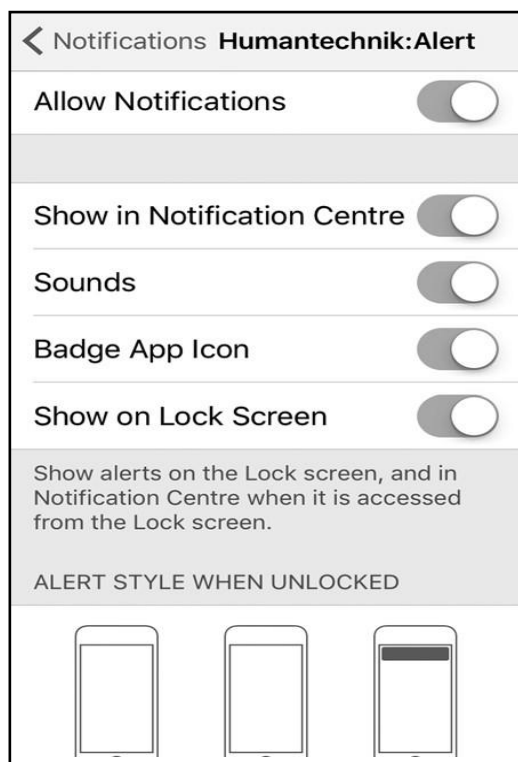

Åben appen og tryk på -ikonet for indstillinger. I indstillingerne skal du indtaste ID-nummeret, der er unikt for enheden.

Du finder ID-nummeret og koden på mærkaten i bunden af enheden samt på bagsiden af denne brugervejledning.

Efter indtastningen, vælg »Test settings«. Meddelelsen »Testing connection...« vises. Når beskeden »Test successful!« er vist, vælg da »Save settings« for at gemme indtastningen af ID-nummeret og koden, og tryk „Save“ for at vende tilbage til alarmskærmen.

Appen vil nu modtage alarmer fra Signolux gateway for smartphones.

Alarmer

1. Visning på aktiv app


Alarmsymbolet vises med det samme og kan bekræftes ved at trykke på det.

2. Visning, når appen er aktiv i baggrunden

En meddelelse vises på din smartphone (tilsvarende meddelelser fra andre meddelelsetjenester som fx WhatsApp).

Ved at trykke på meddelelsen vises appens alarmskærm, og den tilsvarende alarm kan ses og bekræftes ved at trykke på det oplyste alarmsymbol.

Alarmskærm og symboler

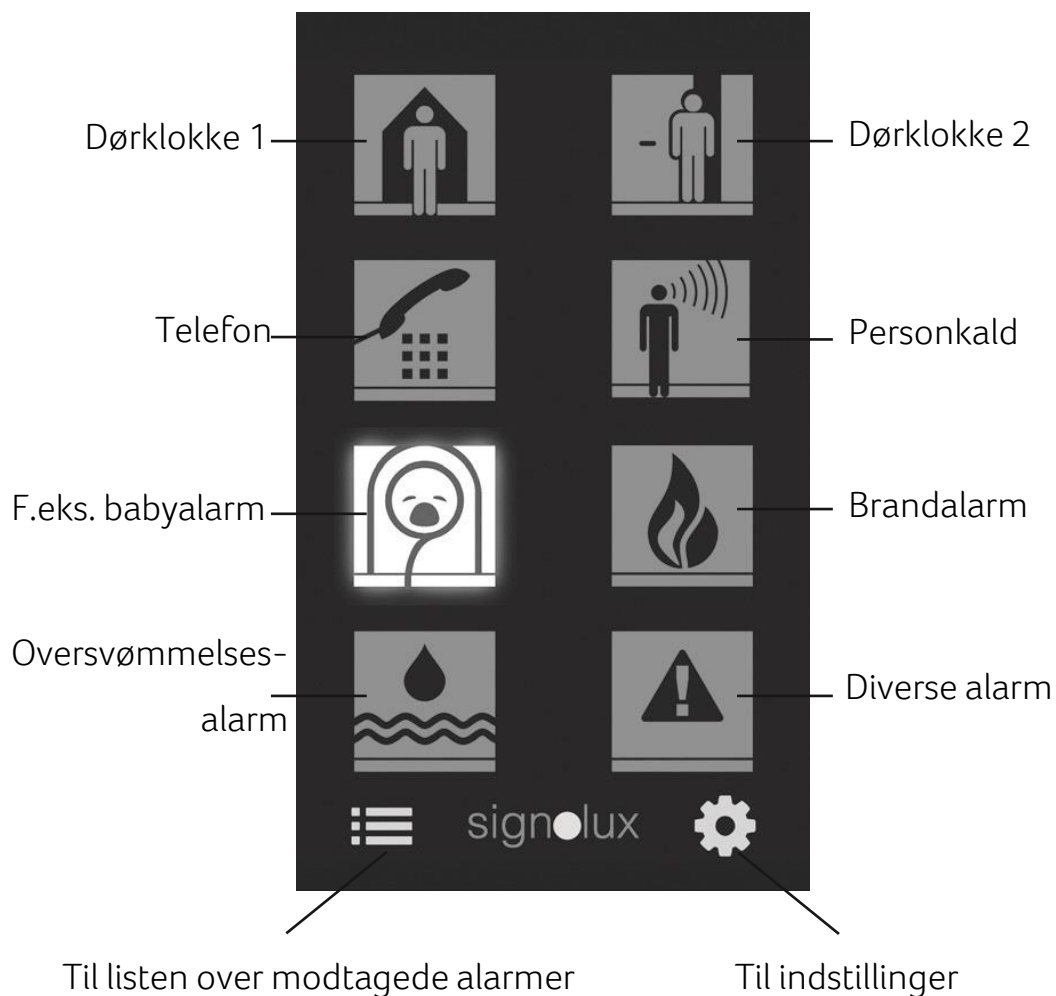

Bemærk: Da systemet benytter internettet, kan der forekomme en forsinkelse på nogle sekunder mellem aktiveringen af en alarm og visningen af alarmerne på appen.


3. Liste over modtagne alarmer (30 seneste)

Modtagne alarmer gemmes på en liste, som viser alarmtype (fx dørklokke, telefon osv.), dato og tidspunkt for, hvornår de blev modtaget.

Listen kan åbnes ved at trykke på ☰-ikonet.

Listen kan slettes ved at trykke på skraldespands-ikonet 🗑️.

Skærmbillede af listen over modtagne alarmer

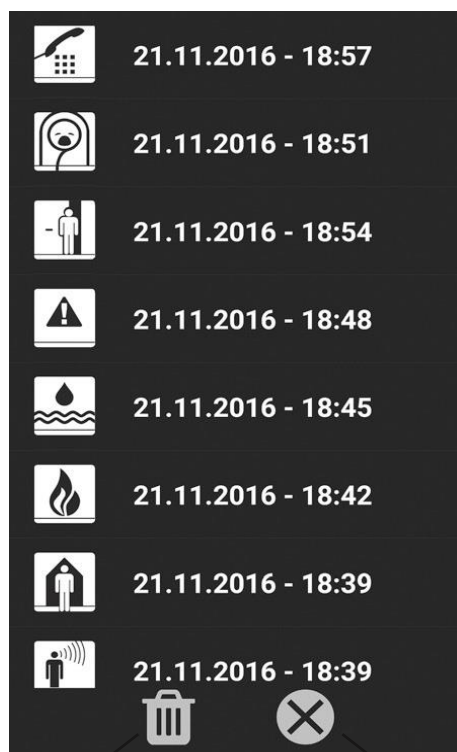

Skraldespand Tilbage til alarmskærmen

Indstilling af signal og valg af symbol

Du kan selv vælge, hvilket symbol en sender (fx et dørtryk) skal tildeles. Der kan benyttes op til 8 sendere for hvert symbol.

Vær opmærksom på, at en sender kun kan tildeles, hvis den endnu ikke er kendt i Signolux gateway til smartphones hukommelse. Du skal om nødvendigt først slette senderen fra hukommelsen (se næste afsnit).

1. Tryk og hold funktionsknappen »•« nede i noget tid. Symbolerne blinker i rækkefølge. Slip funktionsknappen så snart, det ønskede symbol lyser (fx dørklokkesymbolet).
2. Udløs nu signalet, du ønsker at tildele det oplyste symbol, ved hjælp af senderen (tryk fx på dørtrykket).
3. Vent i ca. 20 sekunder og test funktionen.

Slet sender fra hukommelsen

Gør følgende, hvis du ønsker at slette en sender fra hukommelsen:

1. Tryk og hold funktionsknappen »« nede i noget tid. Symbolerne blinker i rækkefølge. Slip funktionsknappen så snart, det ønskede symbol lyser.
2. Tryk nu samtidigt på funktionsknappen » « og slet-knappen »°«, til alle symbolerne lyser kort på samme tid.

Bemærk, at dette sletter alle tildelte sendere fra det valgte symbol.

Internetstatusindikator

Indikatoren lyser: Internetforbindelsen er oprettet og aktiv.

Indikatoren blinker: Ingen internetforbindelse. Kontroller netværkskablets forbindelse eller din internet-routers DHCP-indstillinger (DHCP skal være aktiveret).

Rækkevidde

Rækkevidden mellem *Signolux*-sendere og -modtagere er op til 200 meter under ideelle forhold. Følgende forhold kan reducere rækkevidden:

- Bygninger og planter.
- Interferens fra fjernsyn, computerskærme og mobiltelefoner. Under visse omstændigheder kan dette forhindre modtageren i helt at fungere.
- Placering af senderen i en ufordelagtig afstand fra overflader, der reflekterer radiobølger fx gulve og vægge. Dette kan medføre, at signalbølgen svækkes eller bliver helt annulleret af den reflekterede bølge.
- Metalgenstande.
- Enheder kørende på tilsvarende frekvenser kan skabe interferens.
- Særligt i byer kan der være mange andre kilder til radiobølger, som kan afbryde det originale signal.

Placering af Signolux gateway til smartphones

Signolux gateway til smartphones bør placeres i nærheden af internet-routeren. I forbindelse med opsætningen skal du være opmærksom på følgende:


- Enheden bør ikke placeres i nærheden af stærke interferens-kilder såsom fjernsyn, computerskærme eller mobiltelefoner.
- Enheden bør ikke placeres på metaloverflader eller -genstande, da den indgående signalstyrke kan svækkes af metallets afskærmende effekt.

QR-koder til app stores

For hurtig adgang til appen, kan du også benytte følgende QR-koder:



Android

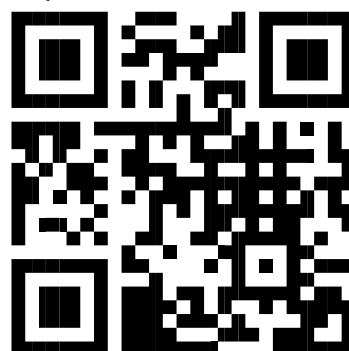

iOS

Bemærkninger om brugen af personlige oplysninger

For at Signolux-gateway til at fungere er det nødvendigt at sende ID, koden, det tidspunkt og den type alarm til serveren. Ingen yderligere data overføres.

Advarslerne er gemt i 30 dage, hvorefter de automatisk slettes.

Brugere af Apple-enheder modtager deres advarsler også over Apple pushmeddelelser servere til deres enheder.

Vedligeholdelse

Signolux gateway til smartphones kræver ingen vedligeholdelse. Hvis enheden bliver beskidt, kan den tørres af med en blød og fugtig klud. Brug aldrig sprit, fortyndere eller andre organiske opløsningsmidler.

Sæt ikke enheden op et sted, hvor den bliver udsat for direkte sollys i lange perioder. Den skal beskyttes mod høj varme, fugt og voldsomme mekaniske rystelser.

Bemærk: Dette produkt er **ikke** beskyttet mod vandstænk. Anbring ikke beholdere med vand fx vaser eller åben ild som fx stearinlys på eller i nærheden af produktet.

Garanti

Der yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejls opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.
3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Vi forbeholder os ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer.

Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til Tonax A/S. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til Tonax A/S eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.

Miljøinformation

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.



Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved udviklingen og fremstillingen af produktet er der anvendt materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. Batterier er mærket med viste overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Ved bortskaffelse af udtjente batterier

skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning:	5 V strømforsyning med mikro-USB-stik
Driftstemperatur:	0 °C – 40 °C
Højde:	42 mm
Bredde:	119 mm
Dybde:	138 mm
Vægt:	260 g

Dette produkt lever op til kravene i følgende EU-direktiver:



- 2011/65/EF RoHS-direktivet
- 2002/96/EF WEEE-direktivet - 1999/5/EF R&TTE-direktivet

Overholdelsen af direktiverne anført ovenfor bekræftes af CE-mærket på produktet.

Erklæringer vedr. opfyldelse af CE-krav kan findes på internettet på

www.humantechnik.com.

Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel.