



MEMO Timer Manual

Artikel nr. 500150/500155/500160/500165

Rev B DK




Brug

MEMO Timer tæller ned ved hjælp af lyspunkter i en tidsøjle. Når alle punkter er slukket, er tiden gået, og en alarm starter.

Produktet er udviklet til personer, som har brug for hjælp til tidsopfattelse. Den er vandtæt og kan bruges indendørs og udendørs.

Produktbeskrivelse

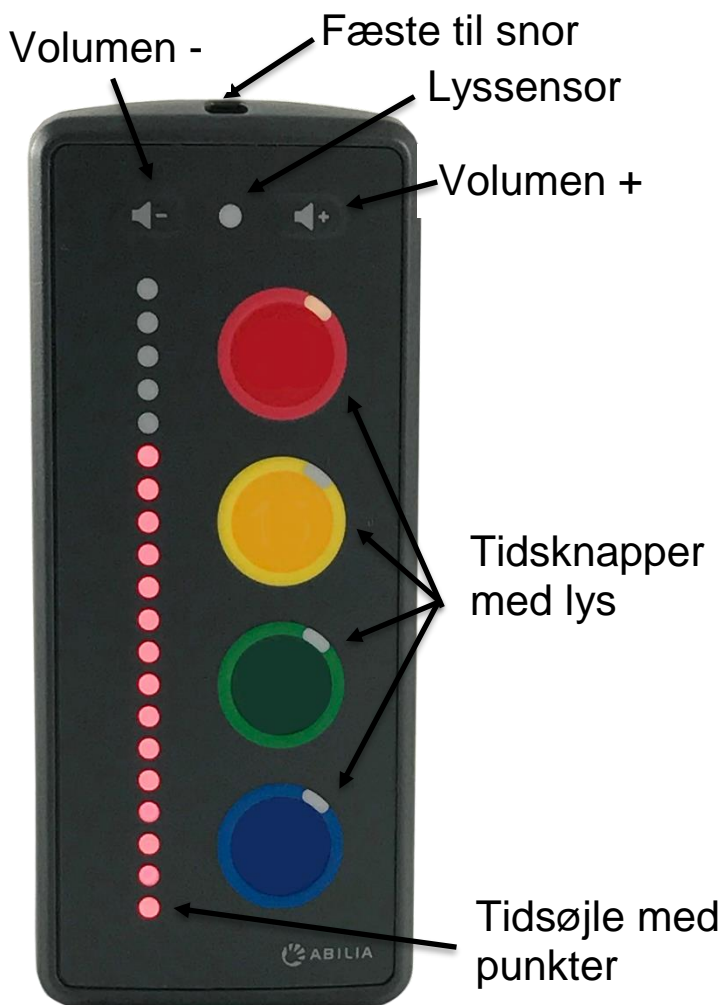

Tidsknapperne i de forskellige modeller har forskellige minut interval.

Tidsknapp	MEMO Timer			
	8	20	60	80
	2	5	15	20
	4	10	30	40
	6	15	45	60
	8	20	60	80

Lyssensoren justerer punkternes lysstyrke i forhold til dagslyset.


Den leveres med en kort og en lang snor til at hænge MEMO Timer på en krog eller rundt om halsen.

Kom i gang

Monter om nødvendigt en af snorene.

Indsæt batterierne på følgende måde:

snor

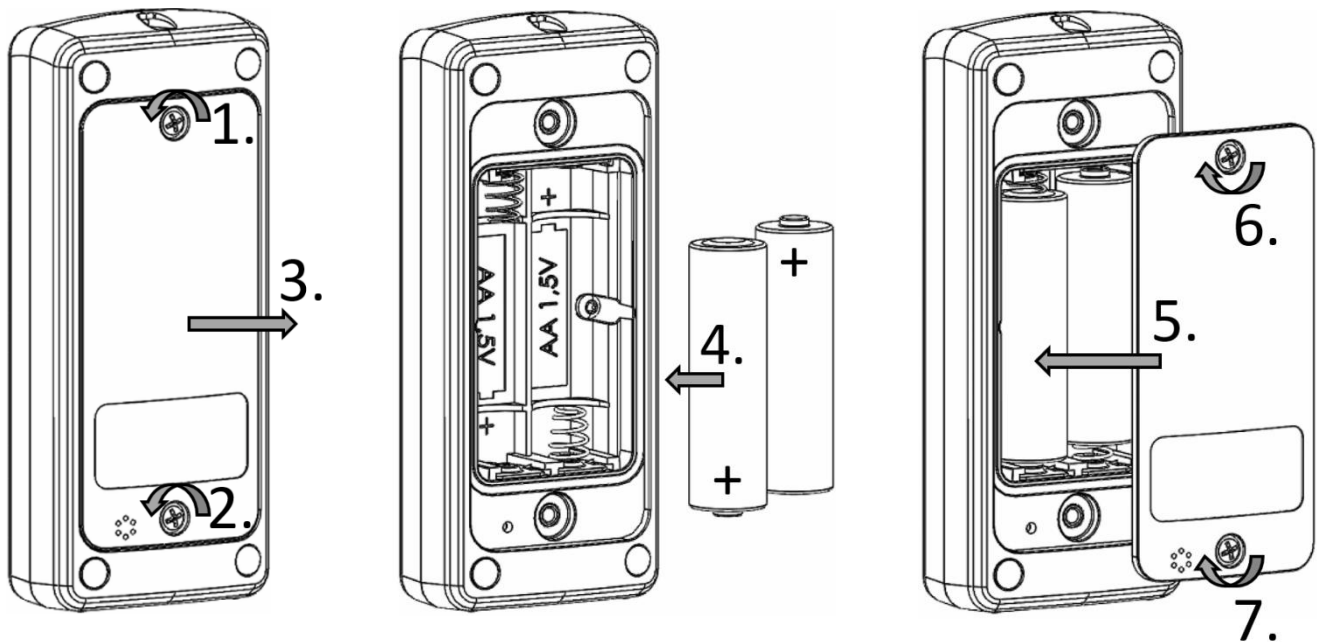

Sørg for, at batteridækslet er uskadt og rent, inden du lukker det.

Oplys brugeren om, hvordan man bruger dette produkt sikkert.

Vedligeholdelse og rengøring

Når det er tid til batteriskift, lyder et signal hver time. Se *Kom i gang* med udskiftning af batterier, men fjern gamle batterier efter trin 3. Tag batterierne ud ved lang tids opbevaring.






















Rengør produktet med en klud fugtet i lunkenet sæbevand.

Funktioner og indstillinger

● = Tryk og hold de viste tidsknapper samtidigt.

Grundindstillinger er angivet med **fed kursiv** i tabellerne.

Funktion	Knapper	Information
Starte timer	Tryk og slip ønsket tidsknap	Det tilsvarende antal punkter vil lyse op. Lyset tændes på den valgte knap (ved indstilling "Knaplys På"). Når timertiden er forbi, aktiveres en lydalarm med blinkende tidsøjle og alarmsignal / vibration.
Slå alarm fra	Tryk og slip en hvilken som helst knap.	
Afbryde timer	● + ● 2 sek	Nedtællingen annulleres.
Juster alarmvolumen	Tryk og slip Volumen + / - for at øge / mindske alarmvolumen.	Volumen i fem trin: 1 = stille, 5 = max (grundstilling = 3). Signal med indstillet lydstyrke lyder ved hvert trin. Et lille vibrationssignal markerer trin 1 og 5.

Indstilling	Knapper	Information			
Alarmsignal	 +  2 sek	Brug Volumen +/- til at ændre indstilling. Den indstillede alarm lyder ved hvert trin	Lyd 1	Lyd 2	Lyd 3
Vibration	 +  2 sek	Brug Volumen +/- til at ændre indstilling.	Af	På	På ved lydløs
Knaplys	 +  2 sek	Brug Volumen +/- til at ændre indstilling.	Af	På	
Max lysstyrke	 +  2 sek	Lysstyrke i fem trin: 1 = min, 5 = max (grundindstilling = 3). Brug Volumen +/- til at ændre indstilling. Den indstillede lysstyrke vises ved hvert trin.			
Forlade indstillinger	 + 	Lyspunkter blinker tre gange. Valg: Vent 10 sekunder.			
Knaplås	 + ( ,  , ) se info *	Låst = Tidsøjlet blinker 1 gang. Kun start af timer og afbrydelse af alarm mulig. Ulåst = Tidsøjlet blinker 2 gange.			
Gendannelse	 +  +  +  2 sek	Gendanner produktet til grundindstillinger.			

* Tryk og hold den blå tidsknap, indtil du, i den angivne rækkefølge, har trykket på grøn, gul og rød tidsknap.

Pakkeindhold

1 x MEMO Timer

1 x Halssnor

1 x Kort snor

2 x AA batterier 1,5 V

Tekniske specifikationer

Mål: 107 x 46 x 25 mm

Vægt: 0,12 kg


Batteri: 2 x AA 1,5 V

Alarmvolumen: max 80 dB (1 meter)

Tæthedegrad: IP67

Omgivelsetemp: -10° til +40°C

Genbrug og bortskaffelse

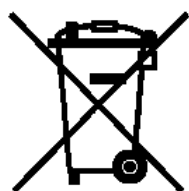

Elektronik og batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Reguleringsinformation

Produktet opfylder sikkerheds- og funktionskravene i direktivet om medicinsk udstyr 93/42/EEG og standarder EN 12182:2012 och EN 14971:2012.

Sikkerhed og ansvar



Kontakt din leverandør eller Abilia straks, hvis der er sket skade eller risiko for skade.

Ved opstart og ved brug af produktet er det altid vigtigt at overveje sikkerheden. Kontakt din leverandør, hvis du er i tvivl om, at du har sat produktet i brug eller installeret korrekt.

Produktet må ikke bruges til noget formål eller i et andet miljø end beskrevet i afsnittet *Brug*. Brug ikke produktet som eneste hjælp til medicinering, medicinsk behandling eller andre vigtige aktiviteter.

Advarsel! Kun medfølgende halssnor med sikkerhedslås bør anvendes rundt om halsen.

Brug kun de medfølgende snore for at undgå risiko for kvælning og anden skade.

Batterier indeholder farlige stoffer. Opbevar batterier uden for uautoriserede personers rækkevidde. Oplad kun batterier, der er genopladelige. Kast ikke batterier i ilden.

Abilia er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tab som følge af ukorrekt brug, manglende opfølgning, forkert indstilling eller lignende. Abilias økonomiske ansvar er altid begrænset til selve produktets værdi.

Behold brugsanvisningen til senere brug. Den nyeste version er tilgængelig til download fra www.abilia.se.



CE