



DIGITAL

# Bure™

## Gangbord

Bure Double 2.0 56-303

# Kære bruger.

Tillykke! Du har anskaffet et Bure Double. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet og hvordan det skal vedligeholdes. Vi anbefaler, at denne brugsanvisning gennemlæses omhyggeligt, inden hjælpemidlet tages i brug.

Vi hos GATE Rehab Development ønsker dig held og lykke med dit produkt. Vi hører gerne fra dig hvis du har kommentarer, spørgsmål eller synspunkter.

Yderligere information fås i dokumentet "Teknisk manual", som kan bestilles hos din lokale distributør eller downloades via [www.gaterd.se](http://www.gaterd.se) alt [www.gaterd.com](http://www.gaterd.com).

Gangborde forenkler hverdagen, eftersom det kan anvendes på flere måder – som oprejsningshjælp, ved forflytning (med ståplade) eller ved rehab/gangtræning.

Et gangbord er beregnet til anvendelse på plane underlag/indendørs. Husk, at produktet skal have et årligt eftersyn af en tekniker eller tilsvarende.

Bure Double er et traditionelt gangbord, som er blevet forfinet med en elektrisk spredning af benstativet. Elbenspredningen gør det enkelt at føre gangbordet helt hen til brugeren, uafhængigt af kørestolsbredde, sengekonstruktion eller stolebredde. Dette letter især ved oprejsning for plejepersonalet. Med benene i yderposition bliver gangbordet meget

stabil og kan med fordel benyttes af brugeren selv. Dette gør det især meget lettere for patienter med behov for ekstra gangplads.

Den lave højde over gulvet minimerer problemer med at komme ind til brugeren eksempelvis ved sengesidning.

Max brugervægt er 150 kg.

## Justering af højde/bredde




Ønsket højde justeres med Pil <OP> eller Pil <NED> Spredning af bundstativet justeres med Pil <BREDERE> eller Pil <SMALLERE>

## Justering af håndtag



Håndtagene justeres til ønsket position ved at: Knap løsnes, håndtagene justeres, knap låses.

## Højre- og venstrejustering af armlænsplader

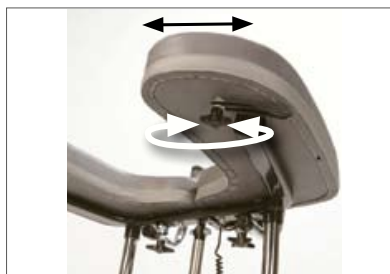

Håndtagene justeres til ønsket position ved at: Knap løsnes, håndtagene justeres, knap låses.

## Låsning af hjul/ Oplåsning af hjul



Bure Double er udstyret med låsbare/bremsede hjul (grøn pedalbremse). Hjulene låses ved at fodbremsen trykkes nedad og aktiveres. Ved oplåsning presses den opstikkende del af bremsen ned. Låsning påvirker både rulning og svingning.

## Forbindelsesskema styreboks



For at håndtere forbindelser ifølge nedenstående skal styreboksens dæksel tages af. Dette gøres ved hjælp af en skrue-trækker eller lignende - se særlig mærkning på styreboksen.

**OBS!** Sørg for at kontakter tilsluttes til korrekte udtag, eftersom dette ellers kan beskadige apparatet.

1. Udtag til motor - hævs/sænk.
2. Udtag til motor - spredning.
3. Udtag til fjernbetjening.
4. Udtag til batterikontakt.
5. Udtag til stikkontakt (**OBS!** For at IP-klassificering skal gælde, skal stikkontakt **ALTID** være tilsluttet til styreboks).

## Opladning af batteri

- Stikkontakt tilsluttes til 230V – vægudtag. Opladning starter automatisk, og LED på batteriet blinker grønt.
- Oplad batteriet i mindst 8t.
- Hvis produktet stilles væk, fordi det ikke skal anvendes i længere tid (mere end en uge), anbefaler vi, at batteriet kobles fra styreboksen, alternativt at der slukkes for batteriet med on/off knappen. På denne måde undgår man risiko for, at batteriet bliver ødelagt, idet styreboksen bruger en smule strøm, også når bordet ikke bliver benyttet.

## LED på styreboks og batteri

- Styreboks – lyser grønt, når der er spænding fra batteri/netudtag.

### • Batteri:

- Ved opladning lyser LED blinkende grønt
- On/Off For at anvende produktet - tryk på <ON>. Grøn lampe begynder at lyse/blink. Med <OFF> knappen (hold inde i 5s) kan man afbryde batteriet, hvis produktet ikke skal anvendes i længere tid.
- Når batteriet er fuldt opladet, lyser LED konstant grønt
- Når batteriet er i normaltilstand/drift, blinker LED grønt med UREGELMÆSSIGT interval -0,5 sek tændt, 4 sek slukket.
- Når batteriet skal oplades (resterende kapacitet <25%) blinker LED orange/rødt med REGELMÆSSIGT interval - 0,5 sek tændt, 4 sek slukket.



**OBS!** Batteriet har en indbygget funktion, som automatisk slukker batteriet, når den resterende kapacitet er <20%. LED er da slukket. Batteriet skal nu oplades helt, inden elektronikken igen kan anvendes.

## Vedligeholdelse (anbefales mindst 1 gang årligt)

### Kontroller at/om

#### Generelt

Bordet føles stift/uden slør.  
Bordet ikke støjer ved manøvrering.  
Bordet er plant, og alle hjul er i kontakt med underlaget.  
Bordet ikke er snavset.

#### Armlæns puder

Armlæns puder er hele og rene.  
Spredning armlæns puder fungerer.

#### Håndtag

Greb ikke er beskadede/snavsede.

Håndtagsindstilling fungerer.

#### Batteri

Kontroller at opladningskablet er forbundet til styreboks

Kontroller at fjernbetjeningen er forbundet til styreboks

Kontroller at forbindelser er foretaget ifølge skemaet

Kontroller at batteri, motor og styreboks ikke sidder/hænger løst.

#### Justering højde/bredde

Hævning og sænkning fungerer.  
Bordet virker stabilt ved maksindstilling.  
Intet slør mellem vertikalt stativ og bundstativ.

Klemmer til højdejustering låser.  
Fæstning af elmotor skal være uden slør.

Regulering af højde/spredning med fjernbetjening fungerer.  
Elmotoren skal gå jævnt og med konstant hastighed.

#### Stativdele

Ingen mekaniske skader.  
Ingen ridser.  
Endebeskytter/bundstativ sidder på.

#### Hjul/bremse

Hjul ruller let / slidbanen ikke beskadiget

Hjulene er hårdt spændt til bundstativ.

Blokeringsbremse fungerer på alle hjul.

Håndbremse fungerer.

### Foranstaltning

Rens med mild sæbeopløsning/alkoholbaseret rengøringsmiddel (ikke petroleumsprodukter)

Rens og udskift, hvis der er skader.  
Skift låseknop.

Rens med mild sæbeopløsning (ikke petroleumsprodukter).  
Udskift håndtagsgreb.  
Suppler evt. låseknapper/skiver

Suppler med nyt opladningskabel, dette skal altid være tilsluttet styreboks (IP65-klassificering).  
Tilslut, evt. suppler med ny fjernbetjening.

Se forbindelsesskema i Teknisk manual.

Stram, suppler evt. med nye skruekoblinger.

Udskift evt. bøsning (i stativ) alt. endemøtrik (i forkromet rør).

Teknisk manual viser konstruktion samt hvilke dele, der skal kontrolleres. Kontakt distributøren, hvis slør ikke kan afhjælpes.

Udskift klemmer  
Stram det aktuelle fæstningsbånd, suppler med skrue/låsemøtrik.  
Kontroller at batteri/fjernbetjening/motor er forbundet korrekt ifølge skemaet. Oplad batteriet. Kontakte kundetjenesten.

Hvis der er skader, kontakt GATE's kundetjeneste.  
Suppler med reparationsmaling.  
Supper med nye endebeskyttere.

Rens alt. udskift hjul (OBS! Hjulene låses altid i bundstativ med kemisk låsning af låsemøtrik). Hjulene er indkapslede, og vi anbefaler ikke at de afmonteres. Udskift i stedet hele hjulpakken.

Stram hjulbolte - suppler med låsemøtrik alt. kemisk låsning (afhængigt af model)

Udskift hjulpakken.

Juster bremse alt suppler med nye hjul.

## Generelle pasningsråd

- Tør gangbord og armlænsplader af efter behov - anvend sæbeopløsning/alkoholbaseret overfladedesinfektionsmiddel.
- Produktet kan rengøres i højtryksvask/maskine, idet elektronikken er IP65-klassificeret. Produktet er imidlertid ikke rustfrit, så derfor kan rengøring i maskine forkorte produktets levetid.
- Udskift defekte dele omgående – skal foretages af kyndigt personale.
- Produktet er kun beregnet til indendørs brug.

## Tekniske specifikationer

Mål angivet for bord med 125 mm hjul.

Art. Nr.	Produkt Bredde	Max brugervægt	Længde	Højde	Vægt	Armlæn/ Indermål
56-303	69-95 cm	150 kg	87 cm	90-130 cm	40 kg	25-50 cm

 CE mærket ifølge MDD 93/42/EEC

Testet og godkendt ifølge EN-11199-3/2005

**GATE**

**WE DO BETTER.**

Vil du vide mere?

Kontakt os på: tel +46 371-318 00  
Gate Rehab Development AB  
Industrigatan 2 | SE-333 75 Reftele  
info@gaterd.se | www.gaterd.se



GATE COLLECTION