

# Brugsanvisning



DIGITAL

# Bure<sup>TM</sup> Gangbord

**GATE**

REHAB DEVELOPMENT AB

Bure Ortho 56-317T  
Bure Space 56-304

## Kære bruger

Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger dit Bure Gangbord og hvordan det skal vedligeholdes.

Vi hos GATE Rehab Development ønsker dig held og lykke med dit produkt. Vi hører gerne fra dig, hvis du har kommentarer, spørgsmål eller synspunkter.

Ring +46 371 – 318 00.

## Hævning og sænkning af stativ

Ønsket højde justeres ved hjælp af fjernbetjeningen  
Pil <OP> resp.  
Pil <NED>



## Justering af håndtag

Håndtagene justeres til ønsket position ved at:  
Knap løsnes, håndtagene justeres, knap låses.




## Højre- og venstrejustering af armlænsplader

For optimal støtte kan armlænspladerne justeres sidelæns: Knap løsnes, armlænspladens position justeres, knap låses.

OBS! Bageste fæste på stativ/armlæn kan udskiftes (højre mod venstre og omvendt)

for at få en anden spredning. Styretapper på pudens underside/bagkant kan også flyttes. Disse indstillingsmuligheder giver mulighed for en individuel tilpasning.

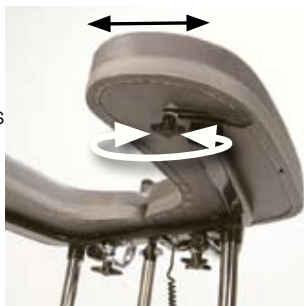

## Låsning af hjul

Hjulene låses ved at fodbremsen trykkes nedad og aktiveres.



## Oplåsning af hjul

Pres opstikkende del af bremsen ned for at løsne bremsen.



## Forbindelsesskema styreboks



For at håndtere forbindelser ifølge nedenstående skal styreboksens dæksel tages af. Dette gøres ved hjælp af en skruetrækker eller lignende - se særlig mærkning på styreboksen.

1. Udtag til motor - hævsænke. OBS! Sørg for at kontakterne tilsluttes til rette udtag eftersom dette ellers kan beskadige motoren.
2. Udtag til fjernbetjening.
3. Udtag til batterikontakt.
4. Udtag til stikkontakt (OBS! For at IP-klassificering skal gælde, skal stikkontakt **ALTID** være tilsluttet til styreboks).

## Opladning af batteri

- Stikkontakt tilsluttes til 230V – vægudtag. Opladning starter automatisk, og LED på batteriet blinker grønt.
- Oplad batteriet i mindst 8t.
- Hvis produktet stilles til side, fordi det ikke skal anvendes i længere tid (mere end en uge), anbefaler vi, at batterikontakten tages af styreboksen alternativt at batteriet afbrydes med on/off knappen.  
På denne måde undgår man risiko for, at batteriet bliver ødelagt idet styreboksen bruger en smule strøm, også når bordet ikke bliver benyttet.

## LED på styreboks og batteri

- Styreboks – lyser grønt, når der er spænding fra batteri/ netudtag.
- Batteri:
  - Ved opladning lyser LED blinkende grønt
  - On/Off For at anvende produktet - tryk på <ON>. Grøn lampe begynder at lyse/blink. Med <OFF> knappen (hold inde i 5s) kan man afbryde batteriet ,hvis produktet ikke skal anvendes i længere tid.
  - Når batteriet er fuldt opladet, lyser LED konstant grønt.
  - Når batteriet er i normaltilstand/drift, blinker LED grønt med UREGELMÆSSIGT interval - 0,5 sek tændt, 4 sek slukket.
  - Når batteriet skal oplades (resterende kapacitet <25%) blinker LED orange/rødt med REGELMÆSSIGT interval - 0,5 sek tændt, 4 sek slukket.



**OBS!** Batteriet har en indbygget funktion, som automatisk slukker batteriet, når den resterende kapacitet er <20%. LED er da slukket. Batteriet skal nu oplades helt, inden elektronikken igen kan anvendes.

# Vedligeholdelse

Anbefales mindst 1 gang årligt.

## Kontroller at/om

## Foranstaltning

### Generelt

Bordet føles stift/uden slør.

Bordet ikke støjer ved manøvrering.

Bordet er plant, og alle hjul er i kontakt med underlaget.

Bordet ikke er snavset.

Rens med mild sæbeopløsning/  
alkoholbaseret rengøringsmiddel  
(ikke petroleumsprodukter).

Rens og udskift, hvis det er skader.

### Armlænsplader

Armlænsplader er hele og rene.

Spredning af armlænsplader fungerer.

Suppler evt. låseknapper/skiver

Rens med mild sæbeopløsning  
(ikke petroleumsprodukter).

### Håndtag

Greb er ikke beskadigede/snavsede.

Håndtagsindstilling fungerer.

Udskift håndtagsgreb.

Suppler evt. låseknapper/skiver

### Batteri

Kontroller at opladningskabel er tilsluttet  
til styreboks

Kontroller at fjernbetjeningen er  
tilsluttet til styreboks

Kontroller at forbindelserne er foretaget ifølge skemaet

Kontroller at batteri, motor og  
styreboks ikke sidder/hænger løst.

Suppler med nyt opladningskabel, dette  
skal altid være tilsluttet til styreboks  
(IP65-klassificering).

Tilslut, evt. suppler med ny  
jernbetjening.

Se forbindelsesskema i Teknisk manual.

Stram, suppler evt. med nye  
skruekoblinger.

### Højdejustering

Hævning og sænkning fungerer.

Bordet virker stabilt ved maksindstilling.

Intet slør mellem vertikalt stativ  
og bundstativ.

Klemmer til højdejustering låser.

Fæstning af elmotor skal være uden slør.

Regulering af højde med fjernbetjening fungerer. Elmoto-  
ren skal gå jævnt og med konstant hastighed.

Udskift evt. bøsning (i stativ) alt. endemøtrik  
(i forkromet rør).

Spænd låseskruer

Skift klemmer

Stram det aktuelle fæstningsbånd,  
suppler med skrue/låsemøtrik.

Kontroller at batteri/fjernbetjening/motor er forbundet  
korrekt ifølge skemaet. Oplad batteriet. Kontakte  
kundefjenesten.

### Stativdele

Ingen mekaniske skader.

Ingen ridser.

Endebeskytter/bundstativ sidder på.

Hjul/bremse

Hjul ruller let /slidbanen er ikke beskadiget

Hjulene er spændt hårdt til bundstativ.

Blokeringsbremse fungerer på alle hjul.

Håndbremse fungerer.

Hvis der er skader, kontakt GATE's  
kundefjeneste.

Suppler med reparationsmaling.  
Supper med nye endebeskyttere.

Rens alt. udskift hjul (OBS! Hjulene  
låses altid i bundstativ med  
kemisk låsning af låsemøtrik). Hjulene  
er indkapslede, og vi anbefaler  
ikke at de afmonteres. Udskift i stedet  
hele hjulpakken.

Stram hjulbolte - suppler med  
låsemøtrik alt. Kemisk låsning  
(afhængigt af model)

Udskift hjulpakken.

Juster bremse alt suppler med  
nye hjul.

# Generelle pasningsråd

- Tør gangbord og armlænsplader af efter behov - anvend sæbeopløsning/alkoholbaseret overfladedesinfektionsmiddel.
- Produktet kan rengøres med højtryksrens/maskine, idet elektronikken er IP65-klassificeret. Produktet er imidlertid ikke rustfrit, så derfor kan rengøring i maskine forkorte produktets levetid.

Udskift defekte dele omgående – skal foretages af kyndigt personale.

Produktet er kun beregnet til indendørs brug.

# Tekniske specifikationer

Mål angivet for bord med 125 mm hjul.

Bure Ortho	Bure Space
<b>Art. Nr.</b> 56-317T	<b>Art. Nr.</b> 56-304
<b>Bredde</b> 78 cm	<b>Bredde</b> 78 cm
<b>Max brugervægt</b> 150 kg	<b>Max brugervægt</b> 150 kg
<b>Længde</b> 80 cm	<b>Længde</b> 79 cm
<b>Højde</b> 90-130 cm	<b>Højde</b> 90-130 cm
<b>Armlæn/Indermål</b> 25-50 cm	<b>Armlæn/Indermål</b> 25-50 cm

**CE** CE-mærket ifølge MDD 93/42/EEC.  
Testet og godkendt ifølge EN-11199-3/2005



**WE DO BETTER.**

Vil du vide mere?

Kontakt os på: tel +46 371-318 00  
Gate Rehab Development AB  
Industrigatan 2 | S-333 75 Pfeffele  
info@gaterd.se | www.gaterd.se



GATE COLLECTION