

JAY PUDER

Brugervejledning & Vedligeholdelse

G2 A/S

**Graham Bells vej 21-23A
8200 Århus N**

Tlf. 86 28 60 88

36 70 50 88

Fax. 86 28 65 88

Herforuden findes der flere typer faste rygge, som kan afløse den normale rygpulstring.

Jay 2 ryggen

Er skabt til klienter, der ønsker en stabilisering af bækkenet bagtil.

Herudover tillader den forskellig graders bagudlæning af den øvre del af ryggen.

Jay Care ryggen

Er til de brugere, som har en kyfotisk/sammenfaldende ryg.

Jay Modul ryggen

Er til brugere med ryg deformiteter/brugere, der har brug for megen støtte.

GARANTI

Samtlige produkter har 2 års garanti. (Combi puden har dog 5 år og Basic puden 1 år) (Ingen garanti på betræk.)

SPØRGSMÅL

G2 A/S står gerne til rådighed med besvarelse af eventuelle spørgsmål og oplysninger om nye produkter. Tlf. 86 28 60 88.

KORREKT TRYKAFLASTNING MED JAY PUDER, DER INDEHOLDER JAY FLUID

Trykaflastning er nøglen til at forebygge tryksår

Hos mennesker der sidder ned, er trykket størst på sædeknoglerne (og på halebenet, hvis personen sidder og synker sammen). Derfor er det også disse steder, hvor risikoen for at udvikle tryksår, er størst. Jay puderne består alle af en faconformet skumbase, der er udhulet bagtil, hvor sædeknoglerne synker ned. Dette bevirker, at trykket fordeles over hele den siddende flade.

Ovenpå skumbasen ligger der svarende til sædepartiet Jay Fluid, som er en tyktflydende masse, der er designet til at udligne trykket mest muligt.

JAY 2 PUDEN

Jay 2 puden er den optimale trykaflastende og stabiliserende pude.

Den lange fordybning bagtil og det 3-delte Fluid indlæg sikrer, at der er Fluid under begge sædeknogler og halebenet.

Puden skal placeres korrekt i stolen, så langt bagud som muligt og således, at brugeren sidder midt på Fluid indlægget. Kørestolens fodstøtter indstilles, så brugerens ben hviler behageligt på pudens forkant. Herved mindskes trykket på sædeknoglerne.

Nu bør der være mindst 1 cm Jay Fluid under sædeknoglerne.

Såfremt der er mindre end dette, taler man om, at brugeren sidder igennem. Herved rammer sædeknoglerne den faste skumbase og puden giver ikke tilstrækkelig aflastning.

Således vurderer man om brugeren sidder igennem

Lad brugeren sidde på puden uden betræk i 2 minutter.

Løft/flyt brugeren af puden uden, at Fluid indlægget ændrer form. Find det laveste sted på puden. Placer en finger her og pres den ned mod skumbasen. Hvis der er mere end 1 cm Jay Fluid, kan puden umiddelbart benyttes.

Hvis der er mindre end 1 cm Jay Fluid, bør puden forsynes med et Jay Fluid supplement indlæg. Indlægget placeres forrest i fordybningen i skumbasen.

Indlægget kan lægges i den ene eller begge sider alt efter behov og mål.

JAY X-TREME

Jay X-treme er afløseren for Jay Active puden. Jay X-treme puden er lettere i vægt, Fluid indlægget er 3-delt og den har et special designet betræk, som lettere transporterer sved bort og nedsætter friktionen mellem beklædning og betræk.

Puden skal placeres korrekt i stolen, så langt bagud som muligt og således, at brugeren sidder midt på Fluid indlægget. Kørestolens fodstøtter indstilles, så brugerens ben hviler behageligt på pudens forkant. Herved mindskes trykket på sædeknoglerne.

Da Jay X-treme puden består af en meget blød skumbase vil der være minimal risiko for, at brugeren sidder igennem.

JAY DUO

Jay Duo puden er designet for at mindske sædeafstanden til gulvet og er til de brugere, der formår at gå stolen frem med ét eller to ben.

Den har ligeledes indbygget Jay Fluid, men dog ikke nok til at være tryksårsforebyggende. Det er beregnet til at nedsætte friktionen, der uvilkaarligt kommer på sædeknoglerne, når brugeren går stolen frem. Jay Duo puden består af en facon formet aluminiumsskal, der påmonteres på kørestolsrammen.

Ovenpå denne ligger en blød skumbase der har facon efter skallen. Bagtil, svarende til sædeknoglerne, ligger et lille 3-delt Fluid indlæg.

BRUG KUN ORIGINALE JAY BETRÆK

De originale betræk til Jay puderne er udformet, så brugeren kan synke ned i Fluid indlæggene og flytte sig på puden uden risiko for tryk eller træk i huden.

Et uoriginalt betræk vil forringe pudens trykaflastende egenskab.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring og vedligeholdelse er vigtig for at sikre puden lang levetid og korrekt funktion.

Alle betrækkene er forsynet med en vaskeanvisning på selve betrækket.

Jay Fluid indlæggene, Jay Fluid supplementerne og baserne kan tørres af med en fugtig klud. (Benyt varmt vand og almindelig sæbe).

Fluid indlæggene forbliver bløde både i brug og under forskellige temperaturer.

Derudover kræver puderne ingen vedligeholdelse.

ØVRIGE PRODUKTER

Jay producerer også puder uden Fluid indlæg.

Det er Jay Combi og Basic puden. Disse puder er skumpuder, hvis primære formål er komfort og stabilitet.