

# ERGOTIP CARE

HMI-nr. 120847  
(IPx6W klassificeret)

## BRUGSVEJLEDNING


WWW.DANREHAB.DK



Læs brugsvejledningen nøje igennem, før du anvender produktet.  
Vær opmærksom på alle anvisninger og følg dem.

Max belastning: 130 kg.

# BRUGSVEJLEDNING TIL ERGOTIP CARE

 ERGOTip X EL skal anvendes på et vandret underlag – stolen må aldrig bruges på skrånende underlag.

Oplad stolens batteri før ibrugtagning.

HVIS stolen anvendes til **patienttransport** gælder følgende forholdsregler:

- Stolen må IKKE være fremadklippet
- Stolen skal være i LAVESTE position
- Udvis største forsigtighed ved kørsel over fx dørtrin o. lign.
- Læs brugsvejledningen nøje igennem, før du anvender produktet. Vær opmærksom på alle anvisninger og følg dem. Opbevar brugsvejledningen sammen med stolen.


Max. belastning: 130 kg.


ERGOTip Care er CE-mærket, testet og godkendt i henhold til ISO/EN 12182:2012.


## OPLADNING KAN FORETAGES PÅ STOLEN



- Tag ladestikket ud af holderen bag på stolen og sæt i en almindelig stikkontakt. Under opladning vil håndbetjeningen lyse. Når opladning ikke længere er påkrævet, vil håndbetjeningen lyse grøn.
- Indsæt ladestikket i holderen igen, når opladningen er slut.
- Oplad batteriet SENEST, når indikatorerne for batteriniveaet skifter til det nederste af de tre niveauer.

 Opladning må ikke foretages i vådrum, eller hvis stolen er våd eller med en bruger siddende i stolen.  
**STOLEN MÅ IKKE ANVENDES UNDER OPLADNING!**

 **OBS!** Ved rengøring af stolen skal motorernes stempler være kørt HELT ind i "huset".

 **OBS!** ERGOTip Care er et redskab til professionel patient håndtering og vi anbefaler at produktet udelukkende bruges af faguddannet personale.

dan  rehab a/s

# BRUGSVEJLEDNING TIL ERGOTIP CARE

## Betjening af stolen

### HVORDAN INDSTILLES SÆDEHØJDEN:


Tryk på den **øverste** af tasterne i **øverste** firkant på håndbetjeningen, og **hæv** stolen til den ønskede højde. **Slip** tasten igen. Indikatorer for batteriniveau. **STOLEN ER NU FASTLÅST I STILLINGEN.**



Tryk på den nederste af de to taster i den øverste firkant på håndbetjeningen for at sænke stolen til en ønsket sædehøjde. Slip tasten igen: **STOLENS POSITION ER NU FASTLÅST.**

### 1 HVORDAN TIPPES STOLEN BAGUD:

Tryk på den **højre** af håndbetjeningsboksens taster i den midterste række knapper, **tip** stolen til den ønskede siddeposition. **Slip** tasten: **STOLEN ER NU FASTLÅST I STILLINGEN.**

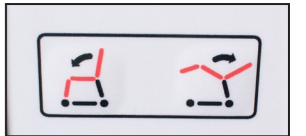

FØR tipping påses, at spanden er skubbet ind forbi det lodrette rørstykke på bakkenglideren, så den ikke falder ud ved tippingen.

### 2 HVORDAN TIPPES STOLEN FREMAD:

Tryk på den **venstre** af håndbetjeningsboksens to taster i den midterste række knapper, **tip** stolen til den ønskede siddeposition. **Slip** tasten igen. **STOLEN ER NU FASTLÅST I DENNE STILLING.**

### 3 HVORDAN LØFTES SÆDET:

Tryk på den **venstre** af håndbetjeningens to taster i den nederste række knapper, hæv sædet til den ønskede højde.



### HVORDAN LØFTES RYGLÆNET:

Tryk på den **højre** af håndbetjeningens to taster i den nederste række knapper, hæv ryggen til den ønskede højde.

 Ved brugers ind-/udstigning i/fra stolen samt ved tipping **SKAL** det sikres, at stolens hjul er aflåst, og at hjulenes bremsepedaler **IKKE** "peger" ind under stolen!

dan  rehab a/s

# BRUGSVEJLEDNING TIL ERGOTIP CARE



**STANDS ØJEBLIKKELT, HVIS STOLEN KØRER SKÆVT OP!**  
Konsultér fejlsøgningsskemaet på [www.danrehab.dk](http://www.danrehab.dk) eller ring til Teknisk Support på tlf. +45 86 44 73 55.



Ved brugers ind- og udstigning må særlig opmærksomhed vies til evt. tipningsfare.



**STÅ ALDRIG PÅ FODHVILERNES FODPLADER!**  
Hvis brugeren læner sig kraftigt fremad, kan der opstå tipningsfare, hvis forhjulene ikke er låst, og hvis bremsepedalerne ikke peger væk fra stolen.

## Håndtering af armlæn



Vær opmærksom på potentiel klemning af væv eller fingre ved nedfældning af armlæn!

## Rengøring og vedligeholdelse

Ved usædvanlige lyde og/ eller evt. ujævn motorgang STANDSES tipningen. Kontakt evt. en fagmand eller forhandleren/producenten. Rengøring foretages med ikke-ætsende rengøringsmidler, hvorefter stolen spules. Den efterfølgende aftørring sker bedst med en blød klud. Armlæn, ryglæn, sæde og hjul kontrolleres med jævne mellemrum – efterspændes eventuelt – og holdes fri for hår m.m. for at bevare den optimale køreevne.

# BRUGSVEJLEDNING TIL ERGOTIP CARE

## Brugsvejledning af fodhvilere



Et fodhvilerpar består af to højdeindstillelige fodhvilere (én til højre og én til venstre fod).

1. Anbring fodhvileren i beslaget, som er svejset på stolens forkant. I hver side af beslaget er en slidse, som fodhvilerens "knopper" glider ned i og derved låser fodhvileren for sidedrej.

2. Ønskes fodhvileren svinget ud til siden, løftes fodhvileren godt 1 cm lodret - nemmest i krumningen: Herved glider fodhvilerens "knopper" op af slidserne, og fodhvileren kan nu drejes til siden.

3. Fodhvileren kan indstilles i længden ved at fjerne dens låseclip og derefter trække eller skubbe fodhvilerens inderrør til den ønskede længde.

HUSK: Fodhvilerens låseclip sættes på plads igen efter indstillingen.

4. Rullernes højde kan indstilles med håndskruen bagpå.



Under indstillingen skal man tage hensyn til den klemrisiko, der altid er til stede.



Disse slidser kan have skarpe kanter, som man kan rive sig på ved et uheld, når fodhvilerne ikke er monteret på en stol.

## Ekstra tilbehør

Se [www.danrehab.dk](http://www.danrehab.dk)