



Brugsanvisning

Elefantfod - Stole- og sengeforhøjer

1. Anvendelse

Derby elefantfødder er konstrueret til at hæve stole, senge, borde osv. i højden med 9 cm eller 14 cm afhængig af modellen. Elefantfødder vil tage bendiameter på op til 8,5 cm.

- Sørg for, at de skridsikre puder er på plads oven på elefantfødderne.
- Stil to elefantfødder tæt på de eksisterende fødder på møblet.
- Løft forsigtigt møblet op på elefantfødderne.
- Gentag for den anden side af møblet.
- Sørg for, at hvert enkelt ben stilles midt i elefantfoden. Afprøv, om de er stabile. Må kun bruges, når møblet står stille.

2. Sikkerhedsforanstaltninger

Pas på dig selv når du bruger stoleforhøjeren. Spørg om hjælp hvis møblet er for tungt eller stort.

Møblet må ikke placeres på kanten af stoleforhøjeren - Vægten skal være inde i fordybningen.

Bør ikke anvendes under møbler der ikke flyttes rundt.

Anvend ikke på ujævnt gulv.

3. Rengøring

Rengør jævnligt med en fugtig klud for at fjerne støv og skidt.



Danish **CARE** Supply

- fremtidens hjælpemidler



Specifikationer

9 cm:

Højde: 9cm

Diameter top: 9cm

Diameter bund: 15,8cm

Maks belastning: 380 kg

Varenr.: 380160

HMI nr.: 48478

14 cm:

Højde: 14cm

Diameter top: 9cm

Diameter bund: 15,8cm

Maks belastning: 380 kg

Varenr.: 380161

HMI nr.: 48479

Leveres som et sæt af 4 stk.