

Brugervejledning

2019-09-09

Curera® Positionering

Vedrører følgende produkter:

Curera® Positioneringspude

Curera® Positioneringsrulle

Curera® Rygpude

Curera® Nakkepude

Curera® Multipude

Curera® Støttekile

Brugervejledningens varenummer: 95-001371



7 331345 044811



Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsforskrifter	2
Indledning	3
Rengøring	5
Øvrige oplysninger	6

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Læs alle instruktioner før brug.

ADVARSEL!

- 1 Dette produkt må kun anvendes til det tiltænkte formål som beskrevet i denne vejledning. Produktet må ikke kombineres, samles eller repareres med andre dele, andet tilbehør eller andre reservedele end dem, der er beskrevet i denne vejledning eller i anden dokumentation fra Care of Sweden.
- 2 **PRODUKTET MÅ IKKE ANVENDES** i nærheden af eller i forbindelse med brandkilder/varme overflader som f.eks. ild, brændende cigaretter eller varme lamper. Selvom produktet er brandtestet, kan det beskadiges, hvis det kommer i kontakt med brandkilder.
- 3 Produktet skal placeres og anvendes på en måde, så det ikke kan blive klemt eller beskadiget. **BEMÆRK!** Vær særlig opmærksom på risikoen for, at produktet kan komme i klemme ved brug af sengeheste.
- 4 Hygiejnebetrækket er væskebestandigt og lufttæt, men er gennemtrængeligt for fugt. Sørg for, at patienten placeres korrekt, så risiko for kvælning undgås. Undgå at bruge flere hygiejnebetræk samtidigt til disse produkter. Dette er for at undgå risikoen for, at fugtgennemtrængeligheden ødelægges.

1 Indledning



Læs altid brugervejledningen før brug.


1.1 Generelle oplysninger

Disse puder er medicinsk udstyr i henhold til direktiv nr. 93/42/EEC om medicinsk udstyr. I henhold til myndighedernes bestemmelser vedrørende medicinsk udstyr er det producentens pligt at indberette ulykker og hændelser, som involverer deres produkter. Vi beder derfor om, at alle oplysninger om eventuelle ulykker og hændelser, som vedrører vores produkter, omgående indberettes til Care of Sweden. Disse puder er blevet testet og godkendt i overensstemmelse med følgende standarder: SS-876 00 01, SS 876 00 04, SS 876 00 02, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, SS-EN ISO 12952-1, EN 14126.

1.2 Tilsigtet anvendelse

Curera® Positionering er en række puder og kiler, som er konstrueret til at aflaste og positionere patienter i alle slags behandlingsmiljøer. Produktsortimentet er bredt og opfylder behovene for støtte og aflastning. Positionering handler om at gøre det behageligt for patienten, og det er vigtigt altid at spørge, hvordan det føles for patienten. Med hensyn til følelsen og komforten anbefales det, at hygiejnebetækket ikke placeres direkte mod huden. Brug Curera® Positionering, så der ikke opstår stræk eller kontrakturer. Positioneringen kan baseres på diagnosen, og eventuelle kontraindikationer skal tages med i betragtning. Det anbefales, at patientens stilling ændres regelmæssigt. Tidsintervallet skal vurderes af det ansvarlige personale alt efter patientens status, diagnose og almindelige tilstand.

Puderne er nemme at bruge og kan bruges til flere forskellige formål.

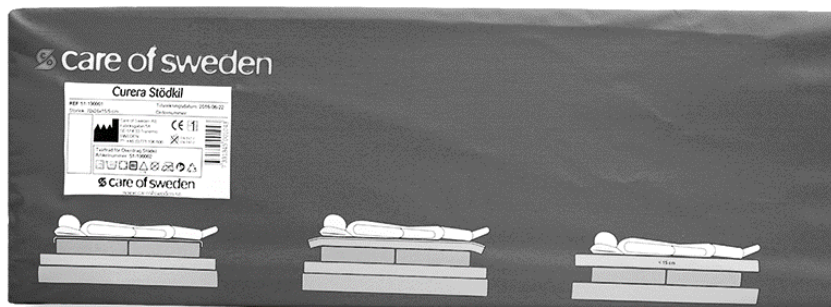

Støttekilerne skal placeres forskelligt, afhængigt af hvilken madras der anvendes. Hvis madrassen har en højde på op til 15 cm, placeres kilerne under madrassen. Hvis der anvendes en topmadras, skal kilerne placeres mellem topmadrassen og madrassen. Hvis der anvendes en madras med vekseltryk, skal kilerne placeres mellem lagenet og madrassen.

1.3 Produktbeskrivelse

Curera® Positionering fås i mange forskellige former og størrelser.

- Positioneringsrullen fås i størrelserne 15 x 60, 20 x 80, 20 x 125 og 20 x 225 cm.
- Positioneringspuden fås i størrelserne 25 x 80, 50 x 60 og 50 x 85 cm.
- Multipuden fås i størrelsen 60 x 70 cm.
- Støttekilen fås i størrelsen 70 x 26 x 15/5 cm og 50 x 26 x 15/5 cm.
- Nakkepuden fås i størrelsen Ø50 cm.
- Rygpuden fås i størrelsen 50 x 85 cm.

Materiale – Positioneringsrulle, Multipude, Rygpude, Positioneringspude og Nakkepude:

50 % skum, 50 % polyesterfibre

Materiale – Støttekile: 100 % koldskum (HR-skum)

1.4 Øvrige oplysninger

Plan for behandling af tryksår

For at opnå det bedst mulige resultat med dette produkt anbefales det at benytte et velplanlagt og velstruktureret arbejdsmiljø. I vores retningslinjer med overskriften "Plan for behandling af tryksår" er der eksempler på, hvordan vores produkter bruges.

Madrasguide

I denne praktiske guide får plejepersonalet hjælp til at vælge den korrekte madras fra Care of Swedens sortiment. Disse oplysninger er tilgængelige på vores website www.careofsweden.com. Du kan også bestille et eksemplar fra vores kundeserviceafdeling ved at sende dine kontaktoplysninger til info@careofsweden.se.

1.5 Udpakning

Begynd med at kontrollere, om emballagen er ubeskadiget. Hvis der opdages skader, skal du kontakte leverandøren, inden produktet tages i brug.

2 Rengøring

Det er vigtigt at følge nedenstående anvisninger, før produktet anvendes igen af en ny bruger. Spørg den hygiejneansvarlige, eller bed leverandøren om hjælp og anvisninger, hvis du er i tvivl.

INDVENDIG PUDE

Hvis der anvendes et hygiejnebetræk, beskytter det den indvendige pude, og det er sjældent nødvendigt at rengøre puden. Hvis den indvendige pude af en eller anden årsag skal rengøres, kan den maskinvaskes ved højst 95 °C. Puden kan tørretumbles ved højst 100 °C. Undgå at tørre den for meget. For at opnå en hurtigere tørretid, kan den centrifugeres 3-4 gange.

BOMULDSBETRÆK (tilbehør)



Betrækket kan maskinvaskes ved højst 70 °C, tørretumbles eller dryptørres.

HYGIEJNEBETRÆK (tilbehør)



Betrækkene kan tørres af med en mild rengøringsopløsning til formålet, f.eks. alkohol med eller uden tensider, isopropanol 70 %, en oxiderende opløsning eller maks. 1 % klor. Afførings- og blodpletter skal straks fjernes med koldt vand. Følg de lokale retningslinjer og brugsanvisningen til rengøringsmidlet nøje.



Betræk, som består af flere dele, skal adskilles inden vask. Skal vaskes med lignende farver.



Klor- og fenolbaserede rengøringsmidler kan have en negativ indvirkning på PU-overfladen og bør undgås. Hvis der anvendes klor, anbefales en blanding med maks. 1 %.

BEMÆRK!

Kontrollér hygiejnebetrækket, hver gang produktet rengøres. Hvis det er beskadiget, skal det udskiftes eller repareres.

3 Diverse

3.1 Opbevaring

Produktet skal altid opbevares ved stuetemperatur et tørt sted. Sørg for, at produktet opbevares et sted, hvor det ikke udsættes for stød, slag eller andet, der kan beskadige det. Undgå at udsætte produktet for direkte sollys.

3.2 Mærkning

Produktet er mærket med produktnavn, produktionsdato, varenummer, størrelse, pleje- og vaskeanvisninger samt EAN-stregkode og har plads til påsætning af egen mærkat.

3.3 Garanti

Dette produkt er omfattet af en 1-årig garanti. Garantien dækker produktionsfejl. Garantien dækker ikke almindeligt slid og forringelse af produktet eller skader, der opstår som følge af skødesløs håndtering eller pleje af produktet.

3.4 Service og vedligeholdelse

Produktet kræver ingen anden service eller vedligeholdelse end rengøring som beskrevet i denne brugervejledning.

3.5 Forventet levetid

Produktets forventede levetid er 2 år.

3.6 Genvinding

Alle produkter er fuldt ud genvindelige og bør genvindes som "brændbart affald". Produktet skal ikke skilles ad.

3.7 Returneringer og reklamationer

Reklamationer skal sendes til leverandøren. Returnering af et produkt skal ske i henhold til leverandørens anvisninger og kan først finde sted, når reklamationen er indberettet. Skader, der opstår under transport, skal indberettes til transportfirmaet.

3.8 Tilvalg og tilbehør

Beskrivelse	Varenummer
Hygiejnebetræk - Curera® Nakkepude	14-001125
Hygiejnebetræk - Curera® Positioneringsrulle 15x60 cm	14-001137
Hygiejnebetræk - Curera® Positioneringsrulle 20x80 cm	14-001145
Hygiejnebetræk - Curera® Positioneringsrulle 20x125 cm	14-001136
Hygiejnebetræk - Curera® Positioneringsrulle 20x225 cm	14-001135
Hygiejnebetræk - Curera® Multipude 60x70 cm	14-001130
Hygiejnebetræk - Curera® Positioneringspude 25x80 cm	14-001110
Hygiejnebetræk - Curera® Positioneringspude 50x60 cm	14-001111
Hygiejnebetræk - Curera® Positioneringspude 50x85 cm	14-001112

Hygiejnebetræk - Curera® Støttekile 50x26x15/5 cm

51-100004

Hygiejnebetræk - Curera® Støttekile 70x26x15/5 cm

51-100002

Beskrivelse

Bomuldsbetræk - Curera® Nakkepude

Varenummer

14-001125B

Bomuldsbetræk - Curera® Positioneringsrulle 15x60 cm

14-001137B

Bomuldsbetræk - Curera® Positioneringsrulle 20x80 cm

14-001145B

Bomuldsbetræk - Curera® Positioneringsrulle 20x125 cm

14-001136B

Bomuldsbetræk - Curera® Positioneringsrulle 20x225 cm

14-001135B

Bomuldsbetræk - Curera® Multipude

14-001130B

Bomuldsbetræk - Curera® Støttekile 50x26x15/5 cm

51-100004B

Bomuldsbetræk - Curera® Støttekile 70x26x15/5 cm

51-100002B

3.9 Symbolforklaring



Varenummer



Producent

XXXX-XX-XX

År-måned-dag



Læs brugervejledningen



CE-mærket iht. direktiv nr. 93/42/EEC om medicinsk udstyr



Genvinding



Maskinvaskes ved 95° C



<1%
Klor



Tørretumbling



Dryptørring




Må ikke stryges



Tåler ikke kemisk rensning



Aftørres

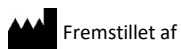

 care of sweden

SUPPORTING LIFE

Kontakt:

Tlf.: + 46 771 106 600

Fax: + 46 325 128 40

E-mail: export@careofsweden.se

Internet: www.careofsweden.com

Adresse:

Care of Sweden AB
P.O. Box 146
SE-514 23 Tranemo
SVERIGE

Besøgsadresse:

Fabriksgatan 5A
SE-514 33 Tranemo
SVERIGE

Leveringsadresse:

Byns väg 4A
SE-514 33 Tranemo
SVERIGE