

## Brugsanvisning

2019-09-09

### Optimal Hygiejnepude & Optimal Sens

Artikelnummer brugsanvisning: 95-001394



# Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsforskrifter	2
Introduktion	3
Rengøring	4
Øvrige oplysninger	5
Egna notater	6

## VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Læs alle instruktioner inden brug

### ADVARSEL!

1. Produktet må kun anvendes til det formål, som det er beregnet til i henhold til beskrivelsen i denne brugsanvisning. Produktet må heller ikke kombineres, monteres eller repareres med andre dele, andet tilbehør eller andre reservedele end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning eller anden dokumentation fra Care of Sweden eller din leverandør.
2. Må ikke anvendes i nærheden af eller i forbindelse med brandkilder/varme overflader, såsom ild, tændte cigaretter eller varme lamper. Produktet er brandtestet, men kan beskadiges ved kontakt med brandkilder.
3. Produktet er væske- og lufttæt, men er fugtgennemtrængeligt (fugt ledes væk). Sørg for, at patienten positioneres således, at luftvejene holdes fri.
4. Undlad at anvende anden heldækkende, plastbetrukken beskyttelse i kombination med produktet. Dette kan påvirke betrækkets fugtgennemtrængelighed.

# 1 Introduktion



Læs altid brugsanvisningen inden brug.

## 1.1 Generelle oplysninger

Optimal Hygiejnepude og Optimal Sens er medicinsk udstyr og er CE-mærket iht. Rådets direktiv nr. 93/42/EEC om medicinsk udstyr. Ifølge Lægemiddelstyrelsens forskrifter om medicinsk udstyr er det producentens pligt at indberette ulykker og hændelser. Vi beder derfor om, at alle oplysninger om eventuelle ulykker og hændelser, som vedrører vores produkter, omgående indberettes til Care of Sweden. Produkterne opfylder de relevante dele i følgende standarder: SS 876 00 01, SS 876 00 02, SS 876 00 04, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, SS-EN ISO 12952-1, EN 14126.

## 1.2 Tilsigtet anvendelse

Optimal Hygiejnepuder er udviklet til behandlingsmæssige behov, men er også velegnet til brug i hjemmet.

## 1.3 Produktbeskrivelse

### OPTIMAL HYGIEJNEPUDE

Optimal Hygiejnepude er en pude af høj kvalitet og med god komfort, som er fyldt med boldfibre.

**Fyld:** Polyester/boldfibre

**Betræk Optimal pudebeskyttelse:** Polyuretanbelagt polyestervæv

**Størrelser:** 35 x 45, 50 x 60, 50 x 70 cm

**Garanti:** 1 år

### OPTIMAL SENS

Optimal Sens er en anatomisk sovepude af høj kvalitet, som er udformet iht. ergonomiske principper, og som støtter hoved og nakke.

**Fyld:** Viskoelastiskt skum

**Betræk:** Polyuretanbelagt polyestervæv

**Størrelse:** 30 x 48 x 11/9 cm

**Garanti:** 1 år

## 1.4 Øvrige oplysninger

### Plan for behandling af tryksår

For at opnå det bedste mulige resultat ved brug af disse produkter anbefales det at benytte en velstruktureret og veltilrettelagt arbejdsmetode. I vores retningslinjer med overskriften "Plan for behandling af tryksår" er der eksempler på, hvordan produkterne bruges.

### Madrasguide

I denne guide får plejepersonalet hjælp til valg af madrasser fra Care of Sweden. Disse oplysninger kan hentes på vores hjemmeside [www.careofsweden.se](http://www.careofsweden.se) eller bestilles via vores kundeservice. Kontaktoplysningerne findes på sidste side.

## 1.5 Udpakning

Ved udpakning skal det kontrolleres, at ingen dele er beskadiget. Hvis der opdages skader, skal du kontakte din leverandør, inden produktet tages i brug.

## 2 Rengøring

Det er vigtigt at følge nedenstående anvisninger, inden produktet anvendes igen til en ny bruger. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte den hygiejneansvarlige eller leverandøren for at få hjælp og vejledning.

### HYGIEJNEBETRÆK



Betrækket kan tørres af med et mildt rengøringsmiddel (f.eks. opvaskemiddel) og vand eller med et desinfektions- og/eller rengøringsmiddel, såsom DAX overfladedesinfektionsmiddel eller lignende. Virkon, Perform eller Desisoft kan også anvendes. Afførings- og blodpletter skal straks fjernes med koldt vand. Følg de lokale retningslinjer og brugsanvisningen til rengøringsmidlet nøje.



Betrækket kan maskinvaskes ved højst 95 °C, tørretumbles eller dryptørres.



Rengøringsmidler, som indeholder klor og fenoler, kan påvirke PU-overfladen negativt og bør undgås. Hvis der anvendes klor, anbefales en blanding på maks. 1 %.

### PUDE



Puden Twill kan maskinvaskes ved højst 60 °C, tørretumbles eller dryptørres.



Hygiejnebetrækket omslutter og beskytter puden, så det sjældent er nødvendigt at rengøre den. Hvis Optimal Sens-puden alligevel skulle blive beskidt, skal den beskidte del rengøres med et mildt rengøringsmiddel (f.eks. opvaskemiddel) og vand (f.eks. med en brusere).

Pres derefter forsigtigt vandet ud. OBS! Du må ikke vride eller rulle skumkernen for at få vandet ud. Lad kernen tørre på et varmt, ventileret sted (ikke i sollys). Kernen skal være helt tør, inden den tages i brug igen. Anvend efter behov et alkoholbaseret desinfektionsmiddel.

### Vigtigt!

Kontrollér hygiejnebetrækket, hver gang produktet rengøres. Hvis det er beskadiget, skal det repareres eller udskiftes.

## 3 Øvrige oplysninger

### 3.1 Garanti

Dette produkt er omfattet af 1 års garanti. Garantien gælder ikke almindeligt slid eller forringelse af produktet eller skader, der er opstået som følge af uagtsomhed eller forkert håndtering/pleje.

### 3.2 Levetid

Produktets forventede levetid er 2 år.

### 3.3 Demontering og kildesortering

Produktet er helt genanvendeligt og skal kildesorteres som "brændbart affald". Ingen demontering er nødvendig.

### 3.4 Returnering og reklamationer

Reklamationer skal indberettes til din leverandør. Returnering af et produkt skal ske i henhold til vores instruktioner og må først ske, efter at reklamationen er indberettet til din leverandør. Transportskader skal indberettes til fragtfirmaet.

### 3.5 Symbolforklaring



Varenummer



Producent

XXXX-XX-XX

År-Måned-Dag



Læs brugsanvisningen



CE-mærket iht. Rådets direktiv nr. 93/42/EEC om medicinsk udstyr



Genvinding



Maskinvaskes ved 60° C



Maskinvaskes ved 95° C



<1%  
Klor



Tørretumbling



Dryptørring



Må ikke stryges



Tåler ikke kemisk rensning



Aftørring



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Producent/fremstillet af

 care of sweden

SUPPORTING LIFE

**Kontakt:**

Telefon: +46 (0)771 106 600

Fax: +46 (0)325 128 40

E-mail: [export@careofsweden.se](mailto:export@careofsweden.se)

Internet: [www.careofsweden.se](http://www.careofsweden.se)

**Postadresse:**

Care of Sweden AB  
Box 146  
SE-514 23 Tranemo

**Besøgsadresse:**

Fabriksgatan 5A  
SE-514 33 Tranemo

**Leveringsadresse:**

Byns väg 4A  
SE-514 33 Tranemo