

Vor supportserie er CE-mærket.



Sørg for, at der er plads nok rundt om halsen.

Selen skal anvendes i kombination med et hoftebælte!

Produktet skal monteres og justeres af relevant kompetent personale.



Eksempel på montering med nedre beslag Zitzi Delfi/ Sharky Pro

Thoraxselen er et positioneringshjælpemiddel for funktionshæmmede og bør bruges sammen med et hoftebælte. Læs hele brugervejledningen før brug.

Montering på siddesystem eller kørestol:

Se vores *Monteringsguide Support* for flere eksempel på forskellige monteringer på vores hjemmeside.

Se webstedet under fæster og beslag for forskelligt monteringsudstyr.

- 1) Monter først hoftebæltet, f.eks. Sittbelt, (i henhold til den separate brugsanvisning) for at placere og muligvis korrigerer brugerens bækken optimalt.
- 2) Monter selen nedre bespændingspunkter efter brugerens behov, for at selen skal give den bedste støtte på lænderyggen.
- 3) Montering af øverste bespændingspunkter. Monter selens øvre fastepunkter på passende sted. Bemærk Høje fastgørelsespunkter kræves for optimal positionering. Trækretningen for de øverste bespændingspunkter bør være ca. 7-10 cm højere end skulderpartiet for at forhindre at skuldrene trykkes nedad. For at fastgøre selestroppeerne til fastgørelsespunkterne skal du bruge Tri-glide-metoden (se billede).

Justering af Thoraxsele:

- 1) Juster de nederste stropper, så de passer til brugerens længde. Start fra lændenryggen.
- 2) Spænd selen med justeringsstropperne øverst. Monter med rette trækretning for at positionere og korrigerer brugerens torso optimalt.
- 3) Juster bryststroppen efter brugerens torso-dimensioner.

Efterkontrol - kontroller ved hvert tilfælde, hvordan brugeren sidder i stolen:


- trækretning • tryk eller skav af stropperne/selen • Tilstrækkelig plads omkring halsen, ca 10 cm.

Vask/vedligeholdelse

Tør let af med en fugtig klud. Visuel revision af sømme, bånd og spænder, så de er hele og funktionelle. Selser og bæltter kan med fordel tørres dagligt med en fugtig klud.

Garanti

2 års reklamationsret ifølge købeloven. Anvend kun reservedele bestilt fra Anatomic SITT A/S.

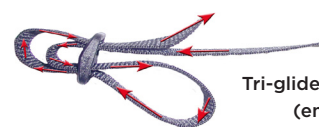

Tri-glide metoden (enkel)

Kontrolrutine

Kontroller brugeren efter hver anvendelse for at opdage eksempelvis hudrødme. Hvis dette opstår, opfør da med anvendelse af hjælpemidlet. Kontroller stropperne regelmæssigt, især på fastgørelsespunkterne for at opdage slid eller om noget er gået i stykker.

Sikkerhed

Visuel revision af sømme, stropper og spænder, så de er komplette og funktionelle. Kontrollering af eventuelt slid af stropper og spænder skal udføres for at sikre, at enheden fungerer trygt og sikkert inden brug. Hvis du føler dig usikker, er du altid velkommen til at kontakte Anatomic SITT A/S.

Tilladelige tilpasninger inden for rammerne af CE-mærkning.

- Kapning af bånd, (brænd enderne for at forhindre, at båndet trævler). En tilpasning er en ændring, som gøres inden for rammerne af produktets CE-mærke. Alt andet er specialtilpasning. At produktet er CE-mærket indebærer at den opfylder alle relevante europæiske sikkerhedskrav.
- En tilpasning er en ændring, som gøres inden for rammerne af produktets CE-mærke. Alt andet er specialtilpasning. At produktet er CE-mærket indebærer at den opfylder alle relevante europæiske sikkerhedskrav.

Placeringsanvisning/Genplacering

Produktet er mærket med Anatomic SITT i tekst, der skal være læselig forfra. Vaskeråds etikette er placeret på bagsiden, som ikke skal ses, når selen bruges. For at forenkle og lette genmontering, f.eks. Ved vask, tag et billede af den rigtige indstilling under afprøvning eller lav en markering med en tekststipen.

Genbrug

En brugt del eller et produkt adskilles og genanvendes i henhold til den gældende standard for genbrug.

Dette produkt er beregnet til at blive brugt til at positionere en bruger sikkert. Produktet må ikke bruges som sikkerhedssele under transport, eller til at holde en person fast med, eller på anden måde bruges, så der kan forårsages personskade.

OBS! Den der bevilger hjælpemidlet eller en person med tilsvarende kompetencer og viden om brugeren og enheden skal altid udføre en risikoanalyse inden brug. Hvis denne analyse viser, at der kan være en risiko for alvorlig personskade, bør brugeren aldrig efterlades uden opsyn, når han bruger enheden.

Produkten er fremstillet af Anatomic SITT AB



Anatomic SITT AB
Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Tel: +46 (0)11 16 18 00
www.anatomicsitt.com



Anatomic SITT A/S
Viengevej 4, DK-8240 RISSKOV
Tel: +45 861 701 74
www.anatomicsitt.com



Bardum A/S
Håndverksvein 8, N-1405 LANGUS
Tel: +47 64 91 80 60
www.bardum.no



Rehaco OY
Haaransuontie 6 A7, 90240 OULLU
Tel: +358 40 77 522 88
www.rehaco.fi