

Produktbeskrivelse

DEKUCARE VISCO er en 2-lags madras, der både fungerer profylaktisk og som et led i den lindrende og behandlende del af brugerens decubitus-problematik op til og med kategori 3.

DEKUCARE VISCO har en liggeflade i Viscoelastisk skum samt en vaffelskåret skumkerne.

Skummadrassen er dækket af et shear-forebyggende trikotlag samt et brandhæmmende og beskyttende inkontinensbetræk.

Indikation

DEKUCARE VISCO-madrassen er velegnet til både tryksårsprofylakse og tryksårsbehandling.

Den bløde tryksårsaflastende madras er beregnet til brugere/patienter, der på grund af sygdom, handicap eller alder har brug for længerevarende eller permanent sengeleje, og derved har risiko for tryksår. Madrassen er velegnet til smertefølsomme og kakektiske patienter.

Funktion / Anvendelsesformål

DEKUCARE VISCO har en liggeflade i Viscoelastisk skum samt en vaffelskåret skumkerne, hvilket muliggør den bedste tilpasningsevne til patientens anatomiske kropskonturer, hvorved kontaktrykket fordeles over et meget større område. Dette forbedrer blodcirkulationen i vævsområderne og minimerer risikoen for tryksår.

Madrassens inkontinensbetræk KOMFORT er kendetegnet ved stabilitet og lang holdbarhed. Det bi-elastiske beskyttelsesbetræk tilpasser sig konturerne i kroppen og er modstandsdygtig for bl.a. virus og bakterier.

En høj vanddamppermeabilitet og dermed åndbarhed sikrer et behageligt soveklima.

Husk:

- Kontrollér madrassen før og under brug for mulige skader og defekter. Sørg for, at der ikke er opstået nogen skade eller mangler under opbevaring eller transport af madrassen. En beskadiget eller defekt madras må ikke bruges.
- Kontrollér om sengen er egnet til brug af DEKUCARE VISCO-madrassen (er det den rigtige størrelse? etc.).
- Inkontinensbetrækket er påsat madrassen ved levering.

Anvendelsesområde

DEKUCARE VISCO er velegnet til brug i hjemmet, plejecentret, sygehuse og klinikker.

Madrassen kan anvendes i enhver type seng – både faste og indstillelige. Sengen skal være stabil og have en jævn liggeflade, der matcher de ydre kanter af madrassen. Sengen må ikke have nogen skarpe hjørner eller kanter, der kan beskadige madrassen. Det er vigtigt, at sengerammen forhindrer, at DEKUCARE VISCO-madrassen kan glide ud af sengen. Den optimale trykaflastning opnås, når madrassen er plan. Madrassen må kun anvendes med det medfølgende betræk samt et lagen, der passer optimalt til madrassens mål, så der ikke opstår folder.

DEKUCARE VISCO velegnet til patienter, der vejer 40 kg til højst 140 kg. De klimatiske forhold skal være følgende: Lufttemperatur mellem 10° C og 40° C, og luftfugtighed mellem 20% og 75%.

Anvendelsesrisici / kontraindikation

VIGTIGT! DEKUCARE VISCO må ikke anvendes til brugere/patienter, som har skumallergi.

Bruger/personale skal have den rette ekspertise til at kontrollere produktets egnethed og for at vurdere eksisterende risici. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne for denne madras.

Undgå at bruger ligger direkte på eksisterende sår.

Ved brug i en seng med sengehest, skal det kontrolleres og sikres, at der ingen risiko er for, at patienten kan komme i klemme/til skade eller falde ud. **Husk**, at der skal være en frihøjde på mindst 22 cm målt fra liggeflade på madras og til toppen af sengehestene.

Beskyt madrassen mod åben ild (f.eks. fra cigaretter, stearinlys o.lign.). Der er risiko for brand, selv om madrassen er brandhæmmende.

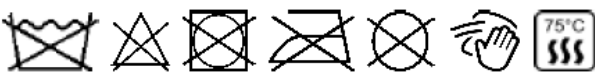
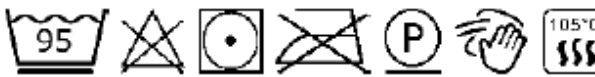
Materiale / Pleje og rengøring

DEKUCARE VISCO er en 2-lags madras bestående af en elastisk Polyurethan skumkerne samt en liggeflade af Viskoelastisk skum. Madrassen kan rengøres/tørres af med alm. husholdnings-rengøringsmidler eller ved at tørre af med et desinfektionsmiddel, som er på en klud. Kan autoklaveres ved op til 75 °.

Inkontinensbetrækket KOMFORT er aftageligt og kan åbnes ved hjælp af en skjult 3-vejs lynlås. Det kan vaskes i vaskemaskinen ved 60 ° - 95 ° C. Kan autoklaveres ved op til 105 °.

Betrækket kan desinficeres. Aftørring med desinfektionsmiddel er muligt med kommercielt tilgængelige desinfektionsmidler, men der bør kun anvendes klorfri midler. Brugervejledningen til brug af rengøringsmidler og desinfektionsmidler skal følges, ligesom den angivne vaskeanvisning skal følges.

Teknisk data

Materiale / Tæthed / Kompressionshårdhed	<u>Liggeflade:</u> Viskoelastisk skum - 50 kg/m ³ , 1,2 kPa, 60 N <u>Skumkerne:</u> Elastisk Polyurethanskum – 45 kg/m ³ , 3,2 kPa, 120 N
Inkontinensbetræk	PES-stof med Polyurethan belægning
Brandhæmmende	BS 7175 (CRIB 5)
Rengøring / vedligeholdelse	
Skumkerne	
PU-inkontinensbetræk	

Bemærk

Fremstillingen af DEKUCARE VISCO er underlagt de højeste kvalitetsstandarder. For eventuelle spørgsmål, henvises til vores hjemmeside.

Madrassen skal anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, og denne skal følge madrassen. Dette for at sikre korrekt brug.

Der tages forbehold for fejl og mangler i oversættelsen af brugervejledningen.

Mål

Varenr.	HMI-nr.	Mål	Vægt	Tilladt brugervægt
DEKUV8320014	124641	83 x 200 x 14 cm	10,0 kg	40 – 140 kg
DEKUV8520014	124653	85 x 200 x 14 cm	10,3 kg	40 – 140 kg
DEKUV9020014	124665	90 x 200 x 14 cm	11,1 kg	40 – 140 kg
DEKUV10020014	124677	100 x 200 x 14 cm	12,3 kg	40 – 140 kg

HMI-basen's produktserie QR-kode

QRickit



Serie 68786 fra hmi-basen.dk

