

Produktbeskrivelse

CUBE GEL er en siddepude, der både fungerer profylaktisk og som et led i den lindrende og behandlende del af brugerens decubitus-problematik især i det sakrale område.

Puden har en vaffelskåret struktur bestående af elastisk Polyetherskum samt et Geltouch indlæg.

Puden har et PU-inkontinensbetræk med en skridsikker underside. Et bærehåndtag på forsiden af pudens inkontinensbetræk gør det lettere at håndtere og transportere puden.

Indikation

CUBE GEL-puden er velegnet til både tryksårsprofylakse og tryksårsbehandling.

Puden er velegnet til kørestolsbrugere, der har brug for permanent aflastning i siddende stilling.

CUBE GEL kan generelt også bruges til smertefølsomme patienter, der har brug for en god aflastning i den siddende stilling.

Funktion / Anvendelsesformål

CUBE GEL-puden's kombination af en Polyether skumstruktur i forskellige højder samt et Geltouch sikrer en optimal punktelasticitet og en behagelig siddeposition.

Skummets porestruktur sikrer en høj luftpermeabilitet eller åndbarhed, hvilket skaber et behageligt siddeklima. De forskellige højder på den vaffelskårede skumstruktur danner en anatomisk stabil siddestilling og en optimeret kontrol af lårene. Bagtil på puden er der et Geltouch indlæg, der sikrer en behagelig trykaflastning især i området ved tuber ischii (sædeknuderne).

Dette reducerer kontaktrykket og giver en forbedret blodgennemstrømning til huden og subkutant fedt og er således med til at forebygge og behandle tryksår.

Husk:

- Kontrollér puden før og under brug for mulige skader og defekter. Sørg for, at der ikke er opstået nogen skade eller mangler under opbevaring eller transport af puden. En beskadiget eller defekt pude må ikke bruges.
- Kontrollér om sædet er egnet til brug af CUBE GEL-puden (er det den rigtige størrelse? etc.).
- Placér puden så den skridsikre underside er placeret ned mod sædet (på kørestol, stol o.lign.).
- Tjek om bærehåndtaget på puden er placeret foran ved stolens/sædets forkant.
- Betrækket er påsat puden ved levering.

Anvendelsesområde

CUBE GEL er velegnet til brug i hjemmet, plejecentret, sygehuse og klinikker.

Puden er beregnet til brug i sædet på en kørestol eller stol. Sædet skal være stabilt og have en plan overflade, der matcher de ydre kanter af puden. Sædet må ikke have nogen skarpe hjørner eller kanter, der kan beskadige puden.

Afhængig af størrelsen på puden er CUBE GEL velegnet til patienter, der vejer 20 kg til højst 225 kg. Den ideelle temperatur for puden er mellem 10 ° C og 40 ° C.

Anvendelsesrisici / kontraindikation

VIGTIGT! CUBE GEL må ikke anvendes til brugere, som er helt immobile eller har skumallergi.

Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne for disse puder.

Undgå at bruger sidder direkte på eksisterende sår, når du placerer patienten.

Beskyt puden mod åben ild (f.eks. fra cigaretter, stearinlys o.lign.). Der er risiko for brand, selv om puden er brandhæmmende.

Materiale / Pleje og rengøring

CUBE GEL består af elastisk Polyetherskum og et Geltouch indlæg. Skumkernen kan rengøres/tørres af med alm. husholdningsrengøringsmidler eller ved at tørre af med et desinfektionsmiddel, som er på en klud. Kan autoklaveres ved op til 75 °.


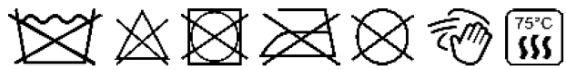




Betrækket er aftageligt og kan åbnes ved at åbne lynlåsen.

Kombinationsbetrækket kan vaskes i vaskemaskinen ved 60 ° C. Kan autoklaveres ved op til 105 °.

Det blå PU-inkontinensbetræk kan vaskes ved maks. 95 ° C. Kan autoklaveres ved op til 105 °.

Begge betræk kan desinficeres. Aftørring med desinfektionsmiddel er muligt med kommercielt tilgængelige desinfektionsmidler, men der bør kun anvendes klorfri midler. Brugervejledningen til brug af rengøringsmidler og desinfektionsmidler skal følges, ligesom den angivne vaskeanvisning skal følges.

Teknisk data

Pude Materiale / Tæthed / Kompressionshårdhed	Elastisk Polyetherskum – 50 kg/m ³ , 6,5 kPa Geltouch skum – 50 kg/m ³ , 2,5 kPa
Kombinationsbetræk Skridsikker bund	65 % Polyurethan, 35 % Polyester 57 % Polyurethan, 43 % Polyester
Brandhæmmende	DIN EN 597 I+II
PU-inkontinensbetræk	58 % Polyurethan, 42 % Polyester
Brandhæmmende	BS 7175 (CRIB 5)
Rengøring / vedligeholdelse	
Skumkerne 	
Kombinationsbetræk 	
PU-inkontinensbetræk 	

Bemærk

Fremstillingen af CUBE GEL er underlagt de højeste kvalitetsstandarder. For eventuelle spørgsmål, henvises til vores hjemmeside.

Puden skal anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, og denne skal følge puden. Dette for at sikre korrekt brug.

Der tages forbehold for fejl og mangler i oversættelsen af brugervejledningen.

Mål

Varenr.	HMI-nr.	Mål	Vægt	Tilladt brugervægt
GEL3838	124742	38 x 38 x 8 cm	0,60 kg	20 – 140 kg
GEL3842	124745	38 x 42 x 8 cm	0,60 kg	20 – 140 kg
GEL4040	124748	40 x 40 x 8 cm	0,60 kg	20 – 140 kg
GEL4042	124751	40 x 42 x 8 cm	0,60 kg	20 – 140 kg
GEL4242	124754	42 x 42 x 8 cm	0,65 kg	20 – 140 kg
GEL4245	124757	42 x 45 x 8 cm	0,70 kg	20 – 140 kg
GEL4542	124760	45 x 42 x 8 cm	0,70 kg	20 – 140 kg
GEL4545	124763	45 x 45 x 8 cm	0,75 kg	20 – 140 kg
GEL4843	124766	48 x 43 x 8 cm	0,80 kg	20 – 140 kg
GEL4845	124769	48 x 45 x 8 cm	0,80 kg	20 – 140 kg
GEL5143	124772	51 x 43 x 8 cm	0,90 kg	40 – 175 kg
GEL5145	124775	51 x 45 x 8 cm	0,90 kg	40 – 175 kg
GEL5151	124778	51 x 51 x 8 cm	1,00 kg	40 – 175 kg
GEL5543	124781	55 x 43 x 8 cm	1,10 kg	60 – 225 kg
GEL5545	124784	55 x 45 x 8 cm	1,10 kg	60 – 225 kg

HMI-basen's produktserie QR-kode

QRickit



Serie 68788 fra hmi-basen.dk

