

Produktbeskrivelse

CUBE FLEXI er en siddepude, der både fungerer profylaktisk og som et led i den lindrende og behandlende del af brugerens decubitus-problematik især i det sakrale område.

CUBE FLEXI er opbygget af en Polyether skumkerne med individuelt udskiftelige eller aftagelige elementer i to højder lavet af tre forskellige skumkvaliteter. Dette giver den største fleksible tilpasningsevne og dermed den bedst mulige trykfordeling på de allermest sårbare og udsatte områder.

Puden har et PU-inkontinensbetræk med en skridsikker underside. Et bærehåndtag på forsiden af pudens inkontinensbetræk gør det lettere at håndtere og transportere puden.

Indikation

CUBE FLEXI-puden er velegnet til både tryksårprofylakse og tryksårsbehandling.

Puden er velegnet til kørestolsbrugere, der har brug for permanent aflastning i siddende stilling.

CUBE FLEXI kan generelt også bruges til smertefølsomme patienter, der har brug for en god aflastning i den siddende stilling.

Funktion / Anvendelsesformål

CUBE FLEXI-puden er opbygget af individuelt udskiftelige eller aftagelige elementer i to højder lavet af tre forskellige skumkvaliteter. Denne fleksible kombination sikrer en optimal punktelasticitet.

De forskellige skumelementers porestruktur sikrer en høj luftpermeabilitet eller åndbarhed, hvilket skaber et behageligt siddeklima. De forskellige højder på de terninglignende skumstrukturer danner en anatomisk sadelkontur, der forhindrer brugeren i at glide fremad, og skaber dermed en stabil siddestilling bag lårene.

Dette reducerer kontaktrykket og giver en forbedret blodgennemstrømning til huden og subkutant fedt og er således med til at forebygge og behandle tryksår.

Husk:

- Kontrollér puden før og under brug for mulige skader og defekter. Sørg for, at der ikke er opstået nogen skade eller mangler under opbevaring eller transport af puden. En beskadiget eller defekt pude må ikke bruges.
- Kontrollér om sædet er egnet til brug af CUBE FLEXI-puden (er det den rigtige størrelse? etc.).
- Placér puden så den skridsikre underside er placeret ned mod sædet (på kørestol, stol o.lign.).
- Tjek om bærehåndtaget på puden er placeret foran ved stolens/sædets forkant.
- Betrækket er påsat puden ved levering.

Anvendelsesområde

CUBE FLEXI er velegnet til brug i hjemmet, plejecentret, sygehuse og klinikker.

Puden er beregnet til brug i sædet på en kørestol eller stol. Sædet skal være stabilt og have en plan overflade, der matcher de ydre kanter af puden. Sædet må ikke have nogen skarpe hjørner eller kanter, der kan beskadige puden.

Afhængig af størrelsen på puden er CUBE FLEXI velegnet til patienter, der vejer 20 kg til højst 225 kg. Den ideelle temperatur for puden er mellem 10 ° C og 40 ° C.

Anvendelsesrisici / kontraindikation

VIGTIGT! CUBE FLEXI må ikke anvendes til brugere, som er helt immobile eller har skumallergi.

Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne for disse puder.

Undgå at bruger sidder direkte på eksisterende sår, når du placerer patienten.

Beskyt puden mod åben ild (f.eks. fra cigaretter, stearinlys o.lign.). Der er risiko for brand, selv om puden er brandhæmmende.

Materiale / Pleje og rengøring

CUBE FLEXI består af elastisk Polyetherskum og delvise elementer af Viskoelastisk skum. Skumkernen kan rengøres/tørres af med alm. husholdningsrengøringsmidler eller ved at tørre af med et desinfektionsmiddel, som er på en klud. Kan autoklaveres ved op til 75 °.


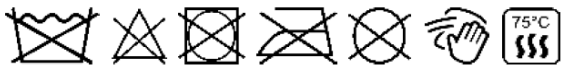


Betrækket er aftageligt og kan åbnes ved at åbne lynlåsen.

Kombinationsbetrækket kan vaskes i vaskemaskinen ved 60 ° C. Kan autoklaveres ved op til 105 °.

Det blå PU-inkontinensbetræk kan vaskes ved maks. 95 ° C. Kan autoklaveres ved op til 105 °.

Begge betræk kan desinficeres. Aftørring med desinfektionsmiddel er muligt med kommercielt tilgængelige desinfektionsmidler, men der bør kun anvendes klorfri midler. Brugervejledningen til brug af rengøringsmidler og desinfektionsmidler skal følges, ligesom den angivne vaskeanvisning skal følges.

Teknisk data

Pude Materiale / Tæthed / Kompressionshårdhed Gule skumelementer Grønne skumelementer Grå skumelementer	 Elastisk Polyetherskum – 50 kg/m ³ , 6,5 kPa og 8,0 kPa Viskoelastisk skum - 52 kg/m ³ , 2,5 kPa Elastisk Polyetherskum - 45 kg/m ³ , 4,5 kPa Elastisk Polyetherskum - 50 kg/m ³ , 6,5 kPa
Kombinationsbetræk Skridsikker bund	65 % Polyurethan, 35 % Polyester 57 % Polyurethan, 43 % Polyester
Brandhæmmende	DIN EN 597 I+II
PU-inkontinensbetræk	58 % Polyurethan, 42 % Polyester
Brandhæmmende	BS 7175 (CRIB 5)
Rengøring / vedligeholdelse Skumkerne Kombinationsbetræk PU-inkontinensbetræk	  

Bemærk

Fremstillingen af CUBE FLEXI er underlagt de højeste kvalitetsstandarder. For eventuelle spørgsmål, henvises til vores hjemmeside.

Puden skal anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, og denne skal følge puden. Dette for at sikre korrekt brug.

Der tages forbehold for fejl og mangler i oversættelsen af brugervejledningen.

Mål

Varenr.	HMI-nr.	Mål	Vægt	Tilladt brugervægt
FLEXI3838	124785	38 x 38 x 8 cm	0,60 kg	20 – 140 kg
FLEXI3842	124788	38 x 42 x 8 cm	0,60 kg	20 – 140 kg
FLEXI4040	124791	40 x 40 x 8 cm	0,60 kg	20 – 140 kg
FLEXI4042	124794	40 x 42 x 8 cm	0,60 kg	20 – 140 kg
FLEXI4242	124797	42 x 42 x 8 cm	0,65 kg	20 – 140 kg
FLEXI4245	124800	42 x 45 x 8 cm	0,70 kg	20 – 140 kg
FLEXI4542	124803	45 x 42 x 8 cm	0,70 kg	20 – 140 kg
FLEXI4545	124806	45 x 45 x 8 cm	0,75 kg	20 – 140 kg
FLEXI4843	124809	48 x 43 x 8 cm	0,80 kg	20 – 140 kg
FLEXI4845	124812	48 x 45 x 8 cm	0,80 kg	20 – 140 kg
FLEXI5143	124815	51 x 43 x 8 cm	0,90 kg	40 – 175 kg
FLEXI5145	124818	51 x 45 x 8 cm	0,90 kg	40 – 175 kg
FLEXI5151	124821	51 x 51 x 8 cm	1,00 kg	40 – 175 kg
FLEXI5543	124824	55 x 43 x 8 cm	1,10 kg	60 – 225 kg
FLEXI5545	124827	55 x 45 x 8 cm	1,10 kg	60 – 225 kg

HMI-basen's produktserie QR-kode

QRickit



Serie 68789 fra hmi-basen.dk

