

CUBE VISCO - Brugervejledning

Produktbeskrivelse

CUBE VISCO er en siddepude, der både fungerer profylaktisk og som et led i den lindrende og behandlende del af brugerens decubitus-problematik især i det sakrale område.

Puden har et terninglignende struktureret sæde med fritstående konturer, som består af elastisk Polyetherskum og en Viskoelastisk skumindsats.

Puden har et PU-inkontinensbetræk med en skridsikker underside. Et bærehåndtag på forsiden af pudens inkontinensbetræk gør det lettere at håndtere og transportere puden.

Indikation

CP VISCO-puden er velegnet til både tryksårsprofylakse og tryksårsbehandling.

Puden er velegnet til kørestolsbrugere, der har brug for permanent aflastning i siddende stilling.

CUBE VISCO kan generelt også bruges til smertefølsomme patienter, der har brug for en god aflastning i den siddende stilling.

Funktion / Anvendelsesformål

CP VISCO-puden er opbygget af en kombination af Polyetherskum og Viskoelastisk skum. Denne kombination sikrer en optimal punktelasticitet.

Skummets porestruktur sikrer en høj luftpermeabilitet eller åndbarhed, hvilket skaber et behageligt siddeklima. De forskellige højder på de terninglignende skumstrukturer danner en anatomisk sadelkontur, der forhindrer brugeren i at glide fremad, og skaber dermed en stabil siddestilling bag lårene. Bagtil på puden er der et skumfyldt Viskoelastisk område, der sikrer en god trykaflastning især i området ved tuber ischii (sædeknuderne).

Dette reducerer kontaktrykket og giver en forbedret blodgennemstrømning til huden og subkutant fedt og er således med til at forebygge og behandle tryksår.

Husk:

- Kontroller puden før og under brug for mulige skader og defekter. Sørg for, at der ikke er opstået nogen skade eller mangler under opbevaring eller transport af puden. En beskadiget eller defekt pude må ikke bruges.
- Kontroller om sædet er egnet til brug af CP VISCO-puden (er det den rigtige størrelse? etc.).
- Placer puden så den skridsikre underside er placeret ned mod sædet (på kørestol, stol o.lign.).
- Tjek om bærehåndtaget på puden er placeret foran ved stolens/sædets forkant.
- Betrækket er påsat puden ved levering.

Anvendelsesområde

CUBE VISCO er velegnet til brug i hjemmet, plejecentret, sygehuse og klinikker.

Puden er beregnet til brug i sædet på en kørestol eller stol. Sædet skal være stabilt og have en plan overflade, der matcher de ydre kanter af puden. Sædet må ikke have nogen skarpe hjørner eller kanter, der kan beskadige puden.

Afhængig af størrelsen på puden er CUBE VISCO velegnet til patienter, der vejer 20 kg til højst 225 kg. Den ideelle temperatur for puden er mellem 10 ° C og 40 ° C.

Anvendelsesrisici / kontraindikation

VIGTIGT! CUBE VISCO må ikke anvendes til brugere, som er helt immobile eller har skumallergi.

Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne for disse puder.

Undgå at bruger sidder direkte på eksisterende sår, når du placerer patienten.

Beskyt puden mod åben ild (f.eks. fra cigaretter, stearinlys o.lign.). Der er risiko for brand, selv om puden er brandhæmmende.

Materiale / Pleje og rengøring

CUBE VISCO består af elastisk Polyetherskum og et Viskoelastisk skumindsats. Skumkernen kan rengøres/tørres af med alm. husholdningsrengøringsmidler eller ved at tørre af med et desinfektionsmiddel, som er på en klud. Kan autoklaveres ved op til 75 °.

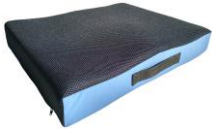

Betrækket er aftageligt og kan åbnes ved at åbne lynlåsen.

Kombinationsbetrækket kan vaskes i vaskemaskinen ved 60 ° C. Kan autoklaveres ved op til 105 °.

Det blå PU-inkontinensbetræk kan vaskes ved maks. 95 ° C. Kan autoklaveres ved op til 105 °.

Begge betræk kan desinficeres. Aftørring med desinfektionsmiddel er muligt med kommercielt tilgængelige desinfektionsmidler, men der bør kun anvendes klorfri midler. Brugervejledningen til brug af rengøringsmidler og desinfektionsmidler skal følges, ligesom den angivne vaskeanvisning skal følges.

Teknisk data

Pude Materiale / Tæthed / Kompressionshårdhed	Elastisk Polyetherskum – 50 kg/m ³ , 6,5 kPa Viskoelastisk skum – 52 kg/m ³ , 2,5 kPa
Kombinationsbetræk Skridsikker bund	65 % Polyurethan, 35 % Polyester 57 % Polyurethan, 43 % Polyester
Brandhæmmende	DIN EN 597 I+II
PU-inkontinensbetræk	58 % Polyurethan, 42 % Polyester
Brandhæmmende	BS 7175 (CRIB 5)
Rengøring / vedligeholdelse	
Skumkerne 	
Kombinationsbetræk 	
PU-inkontinensbetræk 	

Bemærk

Fremstillingen af CUBE VISCO er underlagt de højeste kvalitetsstandarder. For eventuelle spørgsmål, henvises til vores hjemmeside.

Puden skal anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, og denne skal følge puden. Dette for at sikre korrekt brug.

Der tages forbehold for fejl og mangler i oversættelsen af brugervejledningen.

Mål

Varenr.	HMI-nr.	Mål	Vægt	Tilladt brugervægt
VISCO3838	124842	38 x 38 x 8 cm	0,60 kg	20 – 140 kg
VISCO 3842	124845	38 x 42 x 8 cm	0,60 kg	20 – 140 kg
VISCO 4040	124848	40 x 40 x 8 cm	0,60 kg	20 – 140 kg
VISCO 4042	124850	40 x 42 x 8 cm	0,60 kg	20 – 140 kg
VISCO 4242	124853	42 x 42 x 8 cm	0,65 kg	20 – 140 kg
VISCO 4245	124856	42 x 45 x 8 cm	0,70 kg	20 – 140 kg
VISCO 4542	124859	45 x 42 x 8 cm	0,70 kg	20 – 140 kg
VISCO 4545	124862	45 x 45 x 8 cm	0,75 kg	20 – 140 kg
VISCO 4843	124865	48 x 43 x 8 cm	0,80 kg	20 – 140 kg
VISCO 4845	124868	48 x 45 x 8 cm	0,80 kg	20 – 140 kg
VISCO 5143	124871	51 x 43 x 8 cm	0,90 kg	40 – 175 kg
VISCO 5145	124874	51 x 45 x 8 cm	0,90 kg	40 – 175 kg
VISCO 5151	124877	51 x 51 x 8 cm	1,00 kg	40 – 175 kg
VISCO 5543	124880	55 x 43 x 8 cm	1,10 kg	60 – 225 kg
VISCO 5545	124883	55 x 45 x 8 cm	1,10 kg	60 – 225 kg

HMI-basen's produktserie QR kode



Serie 69789 fra hmi-basen.dk

