

KOMFORT INKONTINENSBETRÆK - Brugervejledning

Produktbeskrivelse

KOMFORT, et bi-elastisk PU-betræk, er kendetegnet ved stabilitet og lang holdbarhed. En høj vanddamppermeabilitet og dermed åndbarhed sikrer et behageligt soveklima.

Betrækket er et brandhæmmende og beskyttende inkontinensbetræk.

Betrækket kan nemt trækkes af skummadrassen via en skjult 3-vejs lynlås.

Funktion / Anvendelsesformål

Inkontinensbetrækket må anvendes til CARFLEX og DEKUCARE VISCO Tryksårs skummadrasser, TOPPER RG45 VISCO Topmadras samt andre madrasser i samme serie leveret af Carepartner.

Husk:

- Kontrollér madrassen og betræk før og under brug for mulige skader og defekter. Sørg for, at der ikke er opstået nogen skade eller mangler under opbevaring eller transport. En beskadiget eller defekt madras/betræk må ikke anvendes.

Anvendelsesområde

Inkontinensbetrækket KOMFORT bør kun anvendes til CARFLEX og DEKUCARE VISCO Tryksårsmadrasser, TOPPER RG45 VISCO Topmadras samt andre tryksårsmadrasser i samme serie, leveret af Carepartner.

De til inkontinensbetrækket tilhørende skummadrasser er velegnet til brug i hjemmet, plejecentret, sygehuse og klinikker.

Skummadrassen kan anvendes i enhver type seng – både faste og indstillelige. Sengen skal være stabil og have en jævn liggeflade, der matcher de ydre kanter af madrassen. Sengen må ikke have nogen skarpe hjørner eller kanter, der kan beskadige madrassen. Det er vigtigt, at sengerammen forhindrer, at skummadrassen kan glide ud af sengen. Den optimale trykaflastning opnås, når madrassen er plan.

Skummadrassen må kun anvendes jf. den brugervejledning, der følger med selve madrassen.

Anvendelsesrisici / kontraindikation

Beskyt madras og betræk mod åben ild (f.eks. fra cigaretter, stearinlys o.lign.). Der er risiko for brand, selv om betrækket er brandhæmmende.

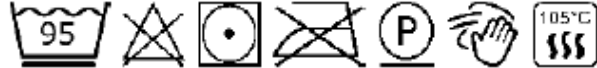

Materiale / Pleje og rengøring

Betrækket er aftageligt og kan åbnes ved hjælp af en skjult 3-vejs lynlås.

Det blå PU-inkontinensbetræk kan vaskes ved maks. 95 ° C. Kan autoklaveres ved op til 105 °.

Betrækket kan desinficeres. Aftørring med desinfektionsmiddel er muligt med kommercielt tilgængelige desinfektionsmidler, men der bør kun anvendes klorfri midler. Brugervejledningen til brug af rengøringsmidler og desinfektionsmidler skal følges, ligesom den angivne vaskeanvisning skal følges.

Teknisk data

Materiale	PES-stof med Polyurethan belægning.
Overflade/vægt	220 g/m ² bi-elastisk
Brandhæmmende	BS 7175 (CRIB 5)
Rengøring / vedligeholdelse	
KOMFORT Inkontinensbetræk	

Bemærk

Fremstillingen af betrækket er underlagt de højeste kvalitetsstandarder. For eventuelle spørgsmål, henvises til vores hjemmeside.

Betrækket skal anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, og denne skal følge betrækket. Dette for at sikre korrekt brug.

Der tages forbehold for fejl og mangler i oversættelsen af brugervejledningen.

Varenr.	HMI-nr.	Mål
KOMF832005	125295	83 x 200 x 5 cm
KOMF852005	125298	85 x 200 x 5 cm
KOMF8320014	125697	83 x 200 x 14 cm
KOMF8520014	125700	85 x 200 x 14 cm
KOMF9020014	125302	90 x 200 x 14 cm
KOMF10020014	125305	100 x 200 x 14 cm



HMI-basen's produktserie QR-kode

QRickit



Serie 70862 fra hmi-basen.dk