

# ECO INKONTINENSBETRÆK - Brugervejledning

## Produktbeskrivelse

**ECO, et bi-elastisk PU-betræk**, er kendetegnet ved stabilitet og lang holdbarhed. En høj vanddamp-permeabilitet og dermed åndbarhed sikrer et behageligt soveklima.

Betrækket er et brandhæmmende og beskyttende inkontinensbetræk. Betrækket kan nemt trækkes af skummadrassen via en skjult 3-vejs lynlås.

## Funktion / Anvendelsesformål

Inkontinensbetrækket ECO må anvendes til TOPPER RG45 VISCO Topmadras samt andre madrasser i samme serie leveret af Carepartner.

## Husk:

- Kontrollér madrassen og betræk før og under brug for mulige skader og defekter. Sørg for, at der ikke er opstået nogen skade eller mangler under opbevaring eller transport. En beskadiget eller defekt madras/betræk må ikke anvendes.

## Anvendelsesområde

Inkontinensbetrækket ECO må anvendes til TOPPER RG45 VISCO Topmadras samt andre madrasser i samme serie leveret af Carepartner.

**De til inkontinensbetrækket tilhørende skummadrasser** er velegnet til brug i hjemmet, plejecentret, sygehuse og klinikker.

Skummadrassen kan anvendes i enhver type seng – både faste og indstillelige. Sengen skal være stabil og have en jævn liggeflade, der matcher de ydre kanter af madrassen. Sengen må ikke have nogen skarpe hjørner eller kanter, der kan beskadige madrassen. Det er vigtigt, at sengerammen forhindrer, at skummadrassen kan glide ud af sengen. Den optimale trykaflastning opnås, når madrassen er plan.

**Skummadrassen må kun anvendes jf. den brugervejledning, der følger med denne madras.**

## Anvendelsesrisici / kontraindikation

Beskyt madras og betræk mod åben ild (f.eks. fra cigaretter, stearinlys o.lign.). Der er risiko for brand, selv om betrækket er brandhæmmende.


## Materiale / Pleje og rengøring

Betrækket er aftageligt og kan åbnes ved at åbne lynlåsen.

Det blå PU-inkontinensbetræk kan vaskes ved maks. 95 ° C. Kan autoklaveres ved op til 105 ° C.

Betrækket kan desinficeres. Aftørring med desinfektionsmiddel er muligt med kommercielt tilgængelige desinfektionsmidler, men der bør kun anvendes klorfri midler. Brugervejledningen til brug af rengøringsmidler og desinfektionsmidler skal følges, ligesom den angivne vaskeanvisning skal følges.

**Teknisk data**

Materiale	PES-stof med Polyurethan belægning.
Overflade/vægt	120 g/m <sup>2</sup>
Brandhæmmende	BS 7175 (CRIB 5), DIN EN 597-1; DIN EN 597-2
Rengøring / vedligeholdelse	
ECO Inkontinensbetræk	

**Bemærk**

Fremstillingen af betrækket er underlagt de højeste kvalitetsstandarder. For eventuelle spørgsmål, henvises til vores hjemmeside.

Betrækket skal anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, og denne skal følge betrækket. Dette for at sikre korrekt brug.

Der tages forbehold for fejl og mangler i oversættelsen af brugervejledningen.

Varenr.	HMI-nr.	Mål
ECO832005	125325	83 x 200 x 5 cm
ECO852005	125328	85 x 200 x 5 cm
ECO832006	125712	83 x 200 x 6 cm
ECO852006	125715	85 x 200 x 6 cm
ECO902006	125718	90 x 200 x 6 cm
ECO1002006	125721	100 x 200 x 6 cm

HMI-basen's produktserie QR-kode:

QRickit



Serie 70866 fra hmi-basen.dk