

# TOPPER RG45 VISCO Topmadras - Brugervejledning

## Produktbeskrivelse

TOPPER RG45 VISCO er trykaflastende topmadras i Viscoelastisk skum til forebyggelse og behandling af tryksår op til og med kategori 2.

TOPPER RG45 VISCO med en højde på 6 cm er et trykaflastende hjælpemiddel og **skal** anvendes sammen med en standardmadras til plejesenge. Topmadrassen fastgøres til selve madrassen via 4 stk. elastikstropper, et i hvert hjørne.

Skummadrassen er dækket af et shear-forebyggende trikotlag samt et brandhæmmende og beskyttende inkontinensbetræk.

## Indikation

TOPPER RG45 VISCO er velegnet som hjælpemiddel i kombination med en standardmadras til plejesenge til behandling af både tryksårsprofylakse og tryksår.

**TOPPER RG45 VISCO er i kombination med en standardmadras til plejesenge** beregnet til brugere/patienter, der på grund af sygdom, handicap eller alder har brug for længerevarende eller permanent sengeleje, og derved har risiko for tryksår. Madrassen er velegnet til smertefølsomme og kakektiske patienter.

## Funktion / Anvendelsesformål

Det bløde Viscoelastiske skum muliggør en god tilpasningsevne til patientens anatomiske kropskonturer, idet kontaktrykket fordeles over et meget større område. Dette forbedrer blodgennemstrømningen til vævsområderne og minimerer risikoen for tryksår – specielt på udsatte områder, som f.eks. hæle, bækken og albuer.

Topmadrassens inkontinensbetræk ECO er kendetegnet ved stabilitet og lang holdbarhed. Det bi-elastiske beskyttelsesbetræk tilpasser sig konturerne i kroppen og er modstandsdygtig for bl.a. virus og bakterier.

En høj vanddamppermeabilitet og dermed åndbarhed sikrer et behageligt soveklima.

## Husk:

- Kontrollér madrassen før og under brug for mulige skader og defekter. Sørg for, at der ikke er opstået nogen skade eller mangler under opbevaring eller transport af madrassen. En beskadiget eller defekt madras må ikke bruges.
- Kontrollér om plejesengen og den tilhørende madras er egnet til brug af TOPPER RG45 VISCO (er det den rigtige størrelse? etc.).
- Inkontinensbetrækket er påsat madrassen ved levering.

## Anvendelsesområde

**TOPPER RG45 VISCO** er velegnet til brug i hjemmet, plejecentret, sygehuse og klinikker.

Topmadrassen kan anvendes i enhver type seng sammen med en standardmadras – både faste og indstillelige. Sengen skal være stabil og have en jævn liggeflade, der matcher de ydre kanter af madrassen. Sengen må ikke have nogen skarpe hjørner eller kanter, der kan beskadige madrassen. Det er vigtigt, at sengerammen forhindrer, at TOPPER RG45 VISCO topmadras kan glide ud af sengen. Den optimale trykaflastning opnås, når madrassen er plan. **Topmadrassen må kun anvendes i kombination med en standardmadras til plejesenge, og den brugervejledning, der følger med en sådan madras.**

**TOPPER RG45 VISCO er (i kombination med en standardmadras til plejesenge) velegnet til patienter, der vejer 40 kg til højst 110 kg.** De klimatiske forhold skal være følgende: Lufttemperatur mellem 10° C og 40° C, og luftfugtighed mellem 20% og 75%.

### Anvendelsesrisici / kontraindikation

VIGTIGT! TOPPER RG45 VISCO må ikke anvendes til brugere/patienter, som har skumallergi.

Bruger/personale skal have den rette ekspertise til at kontrollere produktets egnethed og for at vurdere eksisterende risici.

Ved brug i en seng med sengehest, skal det kontrolleres og sikres, at der ingen risiko er for, at patienten kan komme i klemme/til skade eller falde ud. **Husk**, at der skal være en frihøjde på mindst 22 cm målt fra liggeflade på madras og til toppen af sengehestene.

Beskyt topmadrassen mod åben ild (f.eks. fra cigaretter, stearinlys o.lign.). Der er risiko for brand, selv om madrassen er brandhæmmende.

### Materiale / Pleje og rengøring




TOPPER RG45 VISCO er bestående af Viscoelastisk skum. Madrassen kan rengøres/tørres af med alm. husholdningsrengøringsmidler eller ved at tørre af med et desinfektionsmiddel, som er på en klud. Kan autoklaveres ved op til 75 °.

**Inkontinensbetækket ECO er aftageligt og kan åbnes ved hjælp af en skjult 3-vejs lynlås. Det kan vaskes i vaskemaskinen ved 60 ° - 95 ° C. Kan autoklaveres ved op til 105 ° C.**

Den samlede enhed, inkontinensbetæk samt skumkerne, kan med betrækket lynet op, forsigtigt autoklaveres sammen ved 75° C.

Betrækket kan desinficeres. Aftørring med desinfektionsmiddel er muligt med kommercielt tilgængelige desinfektionsmidler, men der bør kun anvendes klorfri midler. Brugervejledningen til brug af rengøringsmidler og desinfektionsmidler skal følges, ligesom den angivne vaskeanvisning skal følges.

### Teknisk data

Materiale / Tæthed / Kompressionshårdhed	Viscoelastisk skum - 45 kg/m <sup>3</sup> , 1,5 kPa, 50 N
Inkontinensbetæk	PES-stof med Polyurethan belægning Overflade/vægt: 120 g/m <sup>2</sup> , bi-elastisk
Brandhæmmende	BS 7175 (Crib 5), DIN EN 597-1; DIN EN 597-2
Rengøring / vedligeholdelse	
Skumkerne	 
PU-inkontinensbetæk	 

**Bemærk**

Fremstillingen af TOPPER RG45 VISCO er underlagt de højeste kvalitetsstandarder. For eventuelle spørgsmål, henvises til vores hjemmeside.

Topmadrasen skal anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, og denne skal følge madrassen. Dette for at sikre korrekt brug.

Der tages forbehold for fejl og mangler i oversættelsen af brugervejledningen.

Varenr.	HMI-nr.	Mål	Vægt
TOPPER832006	125747	83 x 200 x 6 cm	4,2 kg
TOPPER852006	125750	85 x 200 x 6 cm	4,4 kg

HMI-basen's produktserie QR-kode

QRickit



Serie 71973 fra hmi-basen.dk

