

Tak for dit køb af 0/1 kontakten!

Vi hos rafle.dk ønsker dig/jer god fornøjelse med 0/1 kontakten og håber du/i får mange aktive stunder med 0/1 kontakten.

Der kan med fordel sættes velcro eller skridsikker materiale under 0/1 kontakten for bedre at kunne styre den, alt efter formål. Den kan også blot holdes i hånden.

0/1 kontakten er designet til at virke med Rafle.dks produkter, men kan også bruges til andre apparater, hvis de er beregnet til det. Her tager Rafle.dk dog ikke ansvar for eventuelle skader.

En klud med husholdningsprit kan bruges til at rengøre 0/1 kontakten.

Følg os på Facebook for nye informationer/produkter eller kontakt os på www.rafle.dk

0/1 kontakten er designet og produceret i Danmark af Rafle.dk

Brugervejledning til 0/1 kontakten

0/1 kontakten kan placeres hvor man ønsker og det 3.5 mm minijack stik sættes i det apparat man ønsker at styre med kontakten.

Der er 4 aktiverings punkter i 0/1 kontakten som kan individuelt eller sammen aktiver det tilsluttede apparat.

Advarsel: Ledningen kan vikles rundt om hals og kropsdele og dermed udgøre kvælningfare.

Advarsel: 0/1 kontakten er en knap, og må derfor kun sættes i apparater som er tiltænkt en 0/1 kontakt.

Skulle der være problemer eller spørgsmål med 0/1 kontakten, kontakt os da endelig.



Hvis 0/1 kontakten skal bortskaffes skal dette ske til småt elektronik, og ikke i skraldespanden.

God fornøjelse med 0/1 kontakten.