

## Yderligere praktiske anbefalinger:

- For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz® produktet indendørs.
- Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes.
- Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade nogen.
- Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra personen. Oliz® produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da indholdet kan være farligt for børn under 3 år og mennesker med demens.

## Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som træ, plast og stof efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingsssystemer.

## Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz® produktet, er du velkommen til at kontakte os.

Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der holder længe. **Sørg for at gemme dette informationsark til senere brug.**

Ordre:

År:

Produkt: Eva



Godkendt ved EN71-3 og EN12182

Dansk Design - er produceret i EU - [www.oliz.dk](http://www.oliz.dk)

Oliz - Bornholmsvej 10 - 7400 Herning -DK -tlf +45 20 78 79 54

# Oliz®



Sidde puden Eva er specielt designet til børn, der ofte oplever alvorlig fysisk spænding, rastløshed eller stress. Sidde puden hjælper med til at give afslapning og lindring i hverdagen. Kan bruges i undervisningsøjemed på en hård stol i enten træ eller plast.

**Advarsel. Ikke egnet for børn under 3 år.**

**Lang snor. Stranguleringsfare.**

Eva blød/ hård

## Vigtige instruktioner før brugen af Oliz® produktet:

Oliz® sidde puden Eva blød/ hård er en spændende pude, som har nogle faste kugler der ligger under stoffet. Kuglerne gør at personen bliver mere bevidst om sin egen krop og finder ro ved at sidde på den. Lukningen er et bånd med velcro og kan justeres i længden rundt om en stol.


Oliz® sidde puden Eva blød/ hård er designet til personer fra +3 år  
Størrelse: Længde 350 mm - Bredde 380 mm - Højde 30mm

|                             |      |                   |
|-----------------------------|------|-------------------|
| <b>Materiale stof:</b>      | 100% | Imiteret læder/PU |
| <b>Stropper:</b>            | 100% | Polyester         |
| <b>Materiale indvendig:</b> | 100% | Træperler         |

Oliz® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

## Pleje instruktioner:

- Må ikke vaskes
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.

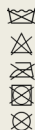

Rengør Oliz® produktet med en blød klud og brug et egnet rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel til kropskontakt. Skal efter tørres med rent vand for at undgå skader på stoffet.

## Opbevaring:

- Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Oliz® produktet opbevares utilgængeligt for en person, der kræver tilsyn.
- Hold Oliz® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild.

## Vigtige anvisninger:

- Oliz® sidde puden Eva blød/ hård kan bruges ved at placere puden på en hård stol og forbinde stropperne bag ryggen af stolen. Derved kan personen sidde på stolen og mærke sig selv bedre, da kuglerne giver øjeblikkelig stimuli.
- Det er vigtigt, at overvåge personen under brug, da produktet har et binde bånd med velcro lukning. Lange bånd giver altid risiko for kvælningfare, derfor skal produktet fjernes fra øjeblikkeligt efter endt brug.
- Et Oliz® produkt bør kun bruges med personens samtykke. Hvis personen føler ubehag og udviser modstand ved brug af produktet, skal det fjernes derfra. Der kan evt. forsøges med brug af produktet i korte tidsintervaller. Bliver der fortsat udvist modstand, så vil vi anbefale at produktet ikke bliver brugt til denne person.
- Vær opmærksom på, at personen ikke bliver for vant til produktet, så virkningen fortager sig. Produktet skal ses som et hjælpemiddel mod uro.
- Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes fra personen med forsigtighed. Der må ikke kastes med produktet, da kuglerne i produktet kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærheden af produktet.
- **MÅ IKKE VENDES FOR AT OPNÅ BLØD SIDE HVIS DET ER EVA HÅRD SIDDEPUDE, DETTE KAN SKADE STOFFET PGA. KUGLERNES TRYK PÅ STOF OG STOL. Se bag på rødt label B= blød H= hård**

## Advarsler:

- Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal produktet bruges med særlig forsigtighed.
- Vi anbefaler generelt, at personer der bruger et Oliz® produkt overvåges under brug.
- Hold luftvejene frie når produktet anvendes, da det ikke er et åndbart produkt.
- Velcro lukningen kan ridse personen, sørg derfor altid for, at hjælpe personen med at lukke stroppen. Ligeså kan velcroen hænge fast i beklædning og lign. vær derfor opmærksom, når du bruger sidde puden, og undgå kontakt mellem velcro og beklædning og lign.
- Et Oliz® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare.
- **Advarsel. Ikke egnet for børn under 3 år. Lang snor. Stranguleringsfare.**