



Brugermanual

V-500



Forholdsregler

Denne brugermanual skal gennemlæses inden din Varsø el-scooter tages i brug.

Manualen indeholder en række vigtige informationer herunder Opladning, betjening og vedligeholdelse m.m.

Kør aldrig hvis du er påvirket af alkohol eller andre stoffer, som kan påvirke kørslen.

Hold altid begge hænder på styret under kørsel.

Overhold altid gældende færdselslov.
Hold altid til højre, for en sikker trafik.

Lav aldrig retningskift uden brug af blinksignal, da det kan være farligt for dig selv og andre i trafikken, nær el-scooteren.

Undgå forhindringer med en stejl stigning, høje kanter eller ujævnheder, som kan gøre kørslen usikker.

Der tages forbehold for trykfejl.
Manualens oplysninger var gældende på tryk-
tidspunktet. Afvigelser og opdateringer i forhold
til produktet kan forekomme. Ved afvigelser
anbefaler vi at kontakte Varsø's kundeservice.

Tlf.

70 60 56 26

Mail

kundeservice@varsoe.dk



Specifikationer

V-500



Modellen er udstyret med

Affjedring på alle 4 hjul, som giver en god stabilitet og komfort.

Komfortabelt sæde med nakkestøtte og armlæn.

Sidespejle, og en kurv foran.

Solide gummikofangere for og bag.

For- og baglys, blinklys og bremselys.

Batterierne kan opgraderes til 2x75 Ah batterier, og opnår derved en rækkevidde på op til 60 km

Rækkevidde	Op til 40 km
Hastighed	Op til 15 km/t
Maks Brugervægt	140 kg
Max Stigning	15 grader
Mål (LxBxH)	140 cm x 69 cm x 130 cm
Vægt	135 kg
Batteri	12V55Ah x2
Oplader	24V/5.0A

Bremsetype	Elektrisk bremse
Hastighedsjustering	Trinløs
Venderadius	1.6 meter
Bremselængde	1.8 meter (tør overflade)
Motoreffekt	800W
Hjulstørrelse	13"


Farve



Funktioner



Instrumentbordets funktioner

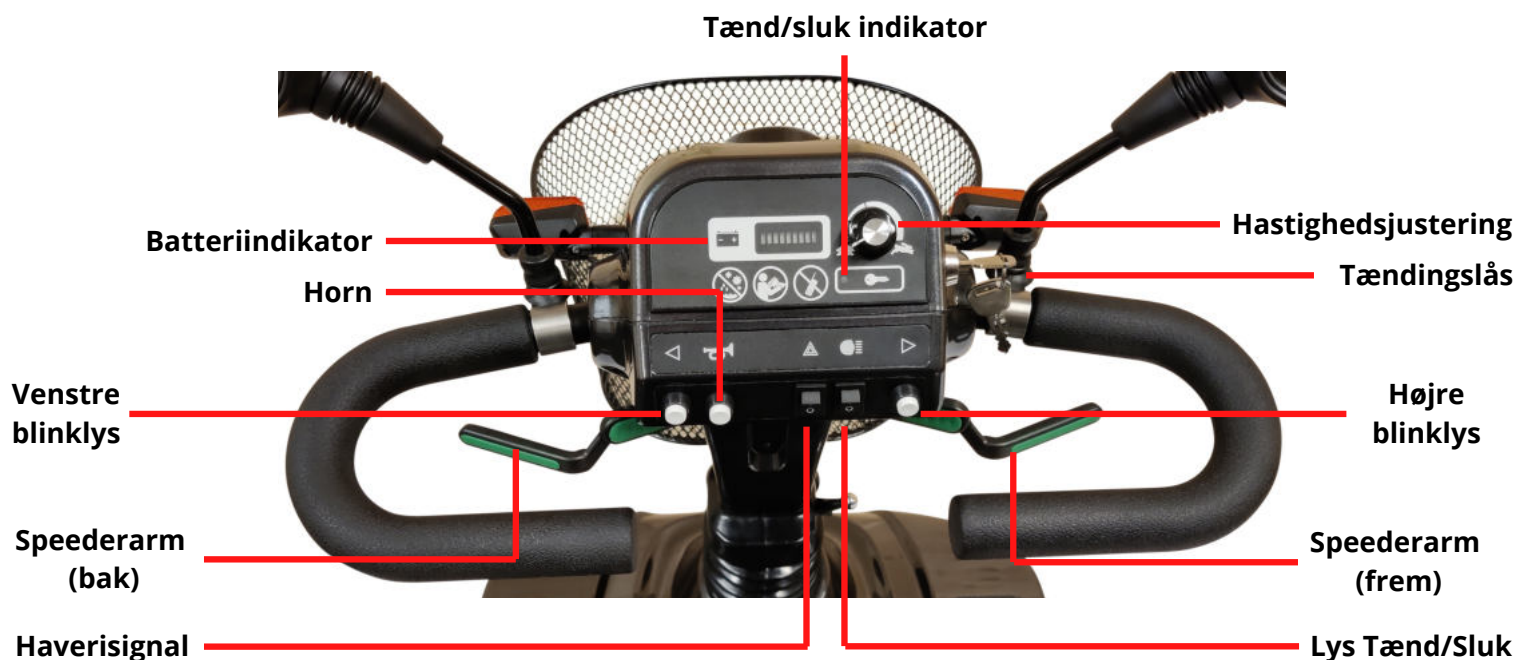

Inden du kører på scooteren, skal du sørge for, at du har en fuld forståelse af alle dens funktioner, og hvordan du betjener kontrolpanelet korrekt.

Tændingslås

Drej nøglen med uret for at tænde el-scooteren.
Sluk ved at dreje mod uret.

Lys

Tryk på lyskontakten for at tænde og slukke for scooterens lys.
Der skal lovpligtigt være lys på scooteren efter mørkets frembrud.

Blinklys

Tryk på venstre eller højre blinklyskontakt, for at vise hvilken vej du ønsker at dreje.
Tryk igen for at slukke for blinklyset.

Horn

Tryk på denne kontakt for at aktiverer hornet.

Havari signal

Tryk på denne kontakt for at aktiverer havari signalet for og bag.
Tryk igen for at slukke havari signalet.

Batteriindikator

Angiver det aktuelle strøm niveau.

Når batteriindikatoren viser **3 røde**, **2 gule** og **4 grønne** streger, er batteriet fuldt opladt.

I takt med strømmen bliver brugt, slukker 1 streg ad gangen.

Først slukker de **GRØNNE streger**, derefter de **GULE streger**, og til sidst de **RØDE streger**.

Er batteriet brugt ned til de **RØDE** streger, anbefaler vi, at du hurtigst muligt, får sat scooteren til opladning. Derved undgår du at køre tør for strøm.

Hastighedsjustering

Justerer scooterens laveste og højeste hastighed. Skildpadde-symbolet angiver laveste fart, mens kanin-symbolet angiver højeste fart.

Tænd-/sluk indikator / funktionsfejl

Er scooteren tændt, lyser denne indikatorlampe konstant.

Ved funktionsfejl blinker indikatorlampen.

Antallet af gange lampen blinker, indikerer fejlen.

Se fejlkoder på sidste side i denne manual.

Speederarm

Bruges til at få scooteren til, at køre frem eller tilbage, samt kontrollere fart og acceleration.

- Træk højre side ned mod dig, selv for at køre frem. Skub den frem for at bakke.
- Træk venstre side ned mod dig selv, for at bakke. Skub den frem for at køre frem.
- Farten stiger i takt med, at speederarmen trækkes tilbage.
- Scooteren kan køres med én hånd.

Parkeringsbremse og frikobling

Scooteren bremses automatisk, når speederarmen slippes.

Ved stop aktiveres parkeringsbremsen, og scooteren står helt fast. Den kan ikke skubbes, eller trille (ved parkering på mindre stigning).

Kommer du i en situation, hvor det er nødvendigt at flytte scooteren manuelt, skal du først slukke scooteren, og derefter frigøre dens motor ved at trække frikoblingshåndtaget **OP.↑**

Frikoblingshåndtaget har farven RØD og findes i højre side under scooterens bagkofanger.

Husk altid at slå frikoblingshåndtaget **NED↓**, ellers kan scooteren ikke køre.

Er dette håndtag **ikke** slået ned (aktiveret), vil batteriindikatoren blinke, og scooteren kan ikke køre.

Sluk derefter scooteren, slå håndtaget ned, og tænd scooteren igen.

Scooteren kan nu køre igen.



Frikoblingshåndtag

Styr

Ratstammens position kan tilpasses dit behov for en behagelig kørestilling. For at justere ratstammen skal du holde fast i styret med den ene hånd og løsne låsehåndtaget med den anden hånd. Juster ratstammen til den ønskede position og spænd låsehåndtaget.



Sæde

Justering sædedybde:

Sædet er udstyret med skyderen, som vist i figuren ovenfor. Trækkes skyderen op, kan sædet bevæges frem eller tilbage - for at tilpasse afstand til styret eller plads til benene.

Rotation:

Skub og hold sædets drejhåndtag frem, drej sædet til den ønskede position, Slip håndtaget igen for at låse sædet.

Justering af ryglæn:

Træk håndtaget op og juster sædets ryglæn til den ønskede vinkel. Slip håndtaget igen for at låse ryglænet.

Justering af armlænets bredde:

På sædets bagside er der to bolte på hver side på armlænets fastgørelsesrør. Løsnes boltene, frigøres armlænet, og det kan trækkes ud til den ønskede position. Spænd derefter boltene for at låse armlænet.

Justering af nakkestøttens højde:

Hold nakkestøttens låsestift inde. Juster derefter støttens højde og slip låsestiften for at låse nakkestøtten.

Opladning

For at oplade din Varsø el-scooter skal du bruge den medfølgende oplader.



BEMÆRK! Oplades der i fugtige og våde miljøer, f.eks. En carport eller halvtag, skal der anvendes en vejrbestandig oplader, for at bevare opladerens garanti. Denne vejrbestandige oplader kan tilkøbes hos Varsø.

HUSK! Sluk scooteren inden den tilsluttes opladning



Scooterens ladestik er placeret under instrumentbordet.



For at komme til scooterens ladestik, er det vigtigt du skubber dækslet til side, hvis du trækker ud i det, risikere du at dækslet brækker.

Tilslut oplader:

Sæt opladerens runde stik i scooterens ladestik.

Opladerens andet stik tilsluttes en almindelig 220V stikkontakt.

Husk at skub ladestikket helt i bund.

Vi anbefaler at oplade scooteren efter hver køretur, uanset hvor langt du har kørt.

Opladerens farveindikator betyder:

RØDT LYS = Strøm tilsluttet.

ORANGE LYS = Scooter oplader.

GRØNT LYS = Scooteren er opladet.

Bruges scooteren ikke i længere tid, anbefaler vi, at den tilsluttes oplader hver 14. dag, så batterier og scooter ikke tager skade.

Vedligehold

For en problemfri og lang levetid på dit køretøj er vedligeholdelse vigtigt.

Du bør dagligt tjekke at:

- Bremserne virker optimalt.
- Scooteren er helt opladet.

Du bør månedligt tjekke:

- **Dæktryk.**

Det er vigtigt at køre med korrekt dæktryk.

Vi anbefaler dæktryk på 2,0 - 2,5 bar.

- **Rengøring.**

Rengør scooterens plastkåber og sæde med en fugtig klud eller brug alm. Glasrens på spray og tør efter med klud.

Undgå at sprøjte vand direkte på scooteren.

Du bør årligt få udført:

Serviceeftersyn af en Varsø-servicetekniker, for at sikre dit køretøj er i god stand, og derved sikre en problemfri drift.

HUSK! Er din scooter ny, skal den serviceres 1. gang efter 9 måneder og efterfølgende med 12 måneders intervaller for at opretholde 3 års garanti inklusiv nedbrudsgaranti.

Batteriinformation

Dit køretøj er udstyret med 2 x 12v batterier, der er vedligeholdelsesfri.

Batteriet er en sliddel, og det slides fra den dag, du tager scooteren i brug. Dermed nedsættes din maksimale kørselsdistance efterhånden, indtil batterierne skal udskiftes.

Deres levetid kan variere, alt efter hvor meget scooteren bruges, og om den bliver sat til opladning efter hver køretur.

Din maksimale rækkevidde afhænger af din kørestil.

Jævn kørsel lige ud øger scooterens rækkevidde.

Kørsel med f.eks. mange start og stop nedsætter rækkevidden.

Andre faktorer som kulde, vind, vejr og kørselsunderlag, herunder græs, grus og asfalt, kan også påvirke scooterens rækkevidde.

Batteriets levetid er typisk fra 12 måneder til 5 år, alt efter forbrugsmønster.

Vi anbefaler altid at tilslutte scooteren til opladning efter hver køretur. Uanset distance.

VIGTIGT! Undgå at aflade batterierne helt, da det reducerer levetiden kraftigt.

Er batterierne slidt, er det vigtigt, at de udskiftes med det rigtige type batteri.

**Kontakt Varsø Kundeservice på tlf. 70 60 56 26
for yderligere information og udskiftning.**

Batterier og kulde

- Opbevareres kørestolen ved 10 grader eller derunder, kan man ikke forvente samme rækkevidde. Forvent op til 20% reduceret rækkevidde.
- Opbevareres kørestolen ved 5 grader eller derunder, kan man ikke forvente samme rækkevidde. Forvent op til 40% reduceret rækkevidde.

Fejlsøgning

Hvis fejlindikatoren på instrumentbrættet blinker, indikere det, at der er sket en fejl.



Antallet af blink indikere hvilken type fejl.

Se hvad fejlen betyder.

Antal blink:

2 blink: Lav batterispænding

3 blink: Høj batterispænding

4 blink: Manuel bremse (frikoblingshåndtag)

5 blink: Speeder Potmeter problem

6 blink: Hastighedsregulator problem

7 blink: Motoren er afbrudt

8 blink: Tjek styreboksens forbindelse

**Kontakt Varsø kundeservice på tlf. 70 60 56 26
for yderligere information og reparation.**

